



 symmetric
designs

FreeForm Seating

Il sistema di postura personalizzabile, che ti supporta e ti segue continuamente

FreeForm Seating fornisce un sistema di postura (seduta e schienale o solo seduta o solo schienale) su misura che si modifica a seconda delle esigenze posturali della persona. Questo sistema regolabile fornisce a chi lo installa la possibilità di sagomare lo schienale sulle esigenze specifiche dell'utente. A seconda delle caratteristiche morfologiche delle persone, delle modificazioni strutturali durante il corso della vita, del bisogno di sostegno nel periodo della crescita, FreeForm ci consente di regolare il sistema di postura in che sia sempre in grado di adattarsi ad ogni esigenza. FreeForm Seating è un vero e proprio sistema personalizzato che può essere installato e adattato ovunque e in qualsiasi momento.



Perché funziona:



- Modellabile in 3D per una distribuzione uniforme della pressione con la possibilità di aumentare il sostegno in qualsiasi punto del sistema;
- Posizionamento facilmente regolabile in caso di cifosi, scoliosi e altre esigenze di sostegno posturale;
- Si può facilmente aumentare o diminuire la dimensione dei supporti laterali con l'aggiunta o la rimozione dei moduli;
- Angolo, profondità e altezza regolabile;
- Copertura traspirante, lavabile;
- Disponibile in 4 misure preformate, configurazioni personalizzate o fogli interi per l'assemblaggio di qualsiasi conformazione;
- Possibilità di agganci a sgancio rapido singoli o con barra stabilizzatrice unica;
- Moduli in alluminio e agganci di collegamento costituiti da sfere di nylon rinforzate in fibra di vetro creano uno schienale estremamente resistente. È progettato per avere una leggera flessibilità per assorbire le vibrazioni e fornire una sensazione dinamica pur essendo di supporto.



FreeForm Kit Fit

I kit per le posture FreeForm sono costituiti da un foglio, hardware di montaggio, accessori e utensili. Ci sono tre diversi kit disponibili con varie misure. I Kit Fit FreeForm sono la migliore soluzione per risolvere problemi su posture complesse che non possono essere risolte con nessun altro prodotto sul mercato.

Rivestimento e imbottitura

Il rivestimento e l'imbottitura del sistema di postura personalizzato è tipicamente svolto dall'officina ortopedica. Una varietà di schiume e materiali di copertura può essere utilizzato per dare all'utente il sistema di sedute appropriato. Si consiglia di rendere il rivestimento e l'imbottitura più sottili possibile.

La redistribuzione della pressione e le aree di rilievo possono essere sagomate regolando la scocca, invece di aggiungere schiuma o imbottitura spessa. I moduli possono anche essere completamente rimossi per il totale scarico nelle zone a rischio di lesioni da decubito, come le protuberanze ossee.



Particolare dei connettori di rinforzo in alluminio

I Kit Fit FreeForm sono 3:

- Essential Kit
- Base Kit
- Full Kit

FreeForm Back Kit



Tutto quello di cui hai bisogno per uno schienale personalizzato in una scatola...

Gli schienali FreeForm back kit ci consentono di realizzare delle posture su misura facilmente ed efficacemente.

Il guscio può essere aumentato o diminuito nelle dimensioni, per ottenere la forma desiderata. L'accoglienza tra i supporti laterali, la curva lombare e la cifosi toracica, possono essere rapidamente e facilmente gestiti con le opportune modifiche.

Gli schienali FreeForm Back Kit sono una soluzione eccellente per una scoliosi, una cifosi accentuata, per le fluttuazioni del peso, per la crescita e per tutte le modificazioni morfologiche che possano sopraggiungere col passare del tempo, o con il progredire della patologia.

Tutto il necessario per uno schienale personalizzato, in una scatola.

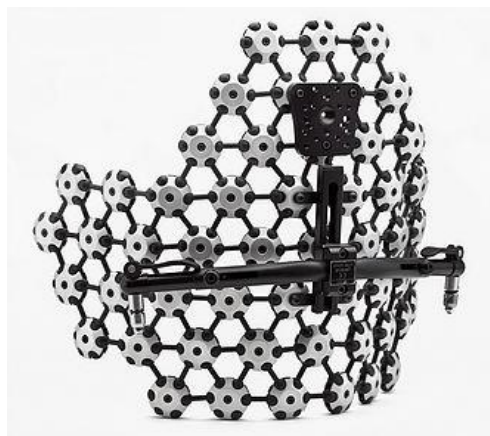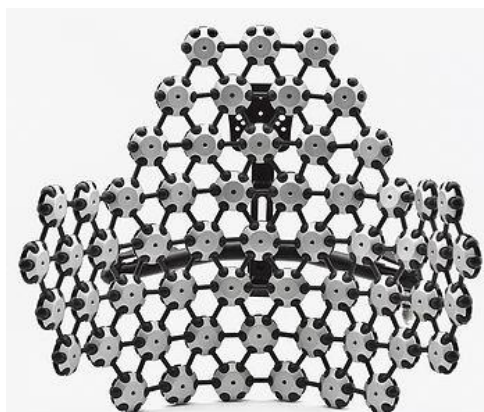


Gli schienali FreeForm Back Kit sono già preformati in determinate dimensioni; è prevista una fodera di rivestimento già sagomata, con un materiale elastico che consente di modificare leggermente la forma dello schienale.

Il materiale dell'imbottitura può essere scelto tra un materiale classico in schiuma e un rivestimento con materiale Stimulate che garantisce un ottimo confort e la massima traspirabilità.

Gli schienali FreeForm Back Kit sono disponibili in 4 misure:

- Low Back Kit
- Small Back Kit
- Medium Back Kit
- Large Back Kit

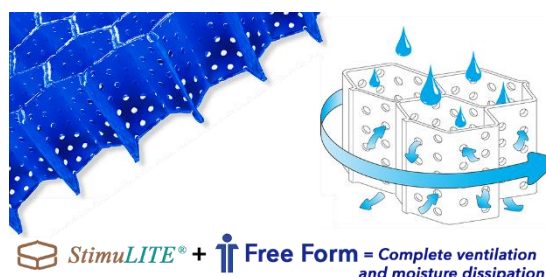

Hardware e accessori

Attacchi indipendenti

Forniscono un'opzione di montaggio semplice, versatile, con sgancio rapido. Questo sistema di montaggio può essere posizionato in qualsiasi punto dello schienale, anche lateralmente e questo ci consente di avere tutti i moduli liberi nella parte centrale dello schienale, nel caso in cui si debba intervenire proprio in quella zona. La piastra di montaggio è in acciaio.



Barra centrale

La barra di montaggio centrale si attacca allo schienale in quattro punti. Di solito al centro del guscio. L'hardware di montaggio centrale consente all'installatore una rapida regolazione della posizione del Freeform all'interno della carrozzina. Quando le due viti sulla staffa centrale sono allentate, il guscio può essere spostato verticalmente, orizzontalmente e può anche essere regolato l'angolo di inclinazione. La barra di montaggio è regolabile in larghezza per adattarsi a diverse larghezze delle carrozzine.

La barra centrale è disponibile in quattro diverse dimensioni:

- 12"-14" 31 cm-36 cm
- 14"-16" 36 cm-41 cm
- 16"-18" 41 cm-46 cm
- 18"-20" 46 cm-51 cm



Attacco piatto

Questi attacchi prevedono un montaggio stabile, che non consente uno sgancio rapido. Sono utili per il montaggio del FreeForm su una base o su un ripiano seduta rigido.

La base di montaggio ruota su un innesto sferico girevol, che consente diversi orientamenti. Il perno è disponibile in due lunghezze diverse. Gli attacchi piatti si agganciano al guscio del FreeForm con una piastra in acciaio a due punti. La piastra in acciaio può essere piegata in base al contorno della scocca.



Supporti piatti

I supporti piatti sono utilizzati quando non ci sono tubolari per collegare gli attacchi. Possono essere imbullonate su una superficie solida o piatta e utilizzate con supporti indipendenti.



Adattatore verticale

L'adattatore verticale fornisce un ricevitore verticale su un tubo orizzontale. Utile per agganciare una seduta con FreeForm e per i sistemi full body. Compatibile con supporti indipendenti e supporti centrali.



Piastra di montaggio universale per poggiatesta

La piastra di montaggio del poggiatesta universale si collega allo schienale FreeForm in tre punti. I fori pre-filettati consentono il montaggio di tutti i principali poggiatesta presenti sul mercato.

Ogni piastra viene fornita con tre viti lunghe per il montaggio sul FreeForm e quattro viti per il montaggio della piastra del poggiatesta.




Barre di rinforzo

Le barre di rinforzo in alluminio possono essere attaccate ad un guscio FreeForm per aumentare la rigidità e la robustezza. Vengono fornite con viti più lunghe per il montaggio sul FreeForm.



Chiavi esagonali

Le chiavi esagonali da 4mm sono incluse in ogni kit e servono per modellare i moduli del FreeForm e l'hardware di montaggio.

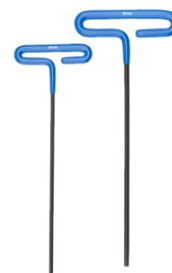

Poggiatesta SAVANT



Il poggiatesta Savant™ è un nuovo e unico supporto per il capo. È cool, leggero e può essere modellato facilmente a mano. I cuscinetti in gel danno un supporto morbido e personalizzato. Un su misura perfetto!

Fornisce un supporto su tre livelli del capo per controllare la flessione e la rotazione laterale. Una fascetta può essere utilizzata per il supporto anteriore della testa.

Caratteristiche:

- La fascetta per il supporto frontale discreta e semplice da fissare;
- Morsetti a sgancio rapido per mantenere la fascetta in posizione;
- I cuscinetti laterali danno un efficace controllo della flessione;
- I cuscinetti medi - laterali sono sagomati per il massimo comfort dietro le orecchie;
- I cuscinetti Sub-occipitali forniscono un supporto supplementare per la mandibola;
- I cuscinetti sono riempiti con un gel morbido di silicone;
- Il Savant è rivestito con un morbido e resistente tessuto in nylon/Lycra.



Vantaggi per l'installatore:

- facile da montare (il poggiatesta può essere sagomato a mano);
- sostegno in tre punti;
- uso facoltativo della fascetta (inclusa) per il supporto frontale supplementare;
- i cuscinetti sono facilmente rimodellabili a mano quando l'utente è seduto.

Vantaggi per chi lo utilizza e/o caregiver:

- un poggiatesta fresco e confortevole consente la circolazione dell'aria;
- bassa ritenzione di calore;
- facile da posizionare e rimuovere;
- aspetto discreto;
- facile da mantenere pulito (spugna pulita con acqua e sapone, poi asciugare all'aria);
- controllo totale per il capo;



È possibile applicare un cuscinetto aggiuntivo sul braccetto superiore, per un ulteriore controllo del capo. Disponibile solo per i braccetti superiori.



Misure poggiatesta Savant

Adulto	Sull'utente		
	Circonferenza frontale	22" – 24"	56-61 cm
	½ circonferenza dietro le orecchie	8" - 9"	20-30cm
	Sul poggiatesta		
	Distanza interna supporto superiore	14"	36cm
	Distanza interna supporto medio	8"	20cm
	Altezza totale	6"	15cm

Small	Sull'utente		
	Circonferenza frontale	18" – 22"	46-56 cm
	½ circonferenza dietro le orecchie	6" - 7"	15-18cm
	Sul poggiatesta		
	Distanza interna supporto superiore	12"	30cm
	Distanza interna supporto medio	7"	18cm
	Altezza totale	5"	13cm

Pediatrico	Sull'utente		
	Circonferenza frontale	14" – 18"	36-46 cm
	½ circonferenza dietro le orecchie	5" – 6"	13-15cm
	Sul poggiatesta		
	Distanza interna supporto superiore	9"	23cm
	Distanza interna supporto medio	5"	13cm
	Altezza totale	4.5"	12cm

Poggiatesta APEX



Progettato utilizzando materiali di altissima qualità per fornire un cuscinetto poggiatesta morbido ma di sicuro supporto. I poggiatesta APEX rappresentano una soluzione elegante dal sapore artigianale, semplice e durevole.



Blue



Purple



Pink



Black

La forma con alette è reversibile. Ruota per avere le ali in alto o in basso. Entrambi gli le alette sono alte 140 mm



280 mm



230 mm

Forma ovale disponibile in 4 diverse larghezze. Tutti i pad ovali sono alti 115 mm



350 mm



300 mm



250 mm



200 mm

Benefici

Contorno regolabile (scocca in alluminio)

Schiuma a doppio strato

Nessuna cerniera

Rivestimento in neoprene removibile

Scocca incorporato nella schiuma per la protezione dei bordi

Forme ovali o con alette

Materiali Premium di alta qualità

Estremamente leggero

Axion Rotary

Rotazione laterale per la tua testa



Un dispositivo unico che permette ai poggiatesta di ruotare

Il sistema di rotazione Axion Rotary può essere fissato alla maggior parte dei poggiatesta e hardware. Permette ai supporti per il capo di ruotare liberamente, migliorando la funzione dell'utilizzatore, riducendo l'attrito e le forze di taglio sul retro della testa, assecondando particolari atteggiamenti del capo.

L'Axion Rotary è disponibile in sei versioni, tre dimensioni di sfere (1" - 25mm, 3/4" - 19mm, 5/8" - 17mm). Compatibile con i poggiatesta Stealth, Whitmeyer, Ottobock e la maggior parte di quelli presenti sul mercato.

Ogni misura è disponibile in due versioni da 60 o 90 gradi di rotazione.

Come funziona

Il binario dell'Axion ruota con il poggiatesta per evitare blocchi tra il binario e il poggiatesta. Il binario dell'Axion 90° è più lungo di quello dell'Axion 60°; pertanto, qualora si utilizzassero poggiatesta particolarmente piccoli, sarà opportuno optare per la versione a 60°, per evitare possibili interferenze tra il braccetto e il capo, durante il movimento rotatorio. L'Axion comprende la base, il binario e la sfera di innesto. Il binario ruota con il poggiatesta, mentre la base rimane ferma. Grazie ad una manopola di fissaggio, è possibile il bloccaggio del sistema in qualsiasi posizione di rotazione. La rotazione è di 30° su ogni lato, per il Axion-60 e 45° su ogni lato, per il Axion-90.



Supporto universale per poggiatesta Twin

Semplice, solido ed efficace

Il supporto Twin è l'unico hardware di montaggio per poggiatesta veramente universale.

La regolazione telescopica effettuata tramite una mollettina a farfalla è unica, e permette il posizionamento millimetrico del capo, nonché una semplice e rapida regolazione durante i cambi di posizione.

Il Twin può essere utilizzato con tutti i poggiatesta aventi innesto sferico 1" (25mm). In ogni caso è possibile l'impiego di adattatori, per installare poggiatesta Whitmeyer, Stealth ed altri presenti sul mercato.

Modello TWIN



Dispone di un sistema telescopico orizzontale, che consente una regolazione manuale e veloce di 2,5 cm

Modello TWIN FLIP +



Muove il poggiatesta al di fuori della guida di scorrimento facilmente e in modo veloce, rimanendo comunque attaccato alla carrozzina ed evitando disallineamenti

Modello TWIN DYNAMIC +



L'hardware Twin Dynamic + offre una deflessione del tono e un movimento orizzontale controllato del poggiatesta. L'assorbimento della forza protegge l'utente, accoglie il tono estensorio e ammortizza gli urti sull'hardware. La tensione della molla è disponibile in modo saldo o morbido e può essere modificata in qualsiasi momento senza attrezzi. La tensione predefinita è salda e se è necessaria una corsa più morbida, è possibile installare la molla più morbida.

Offset Hardware



Questo hardware di montaggio per poggiatesta incorpora una sfera in acciaio da 25 mm che consente un adattamento universale con tutti i poggiatesta Symmetric e con ogni altro che abbia un innesto sferico di 25 mm. L'hardware è rivestito con una finitura resistente che mantiene il suo aspetto più a lungo.

Modello Infinity Link disponibile da gennaio 2019



Infinity Link Hardware è una soluzione incredibilmente versatile per il montaggio di qualsiasi poggiatesta. Il design robusto e rigido consente una regolazione infinita. Possono essere aggiunti più collegamenti, per una maggiore portata. Infinity Link è super leggero, con un profilo discreto e facile da regolare

APEX Dual Offset **disponibile da gennaio 2019**



L'hardware APEX Dual Offset Headrest è una soluzione elegante, versatile e molto leggera per il montaggio dei poggiatesta. Sistema Offset per le aste verticali e orizzontali

Piastra di montaggio universale per poggiatesta

La piastra di montaggio universale, si adatta a qualsiasi supporto per poggiatesta, grazie ai fori pre-filettati.



Adattatori

Adattatore Netti AluRehab

Questo adattatore consente a tutti i poggiatesta Symmetric, incluso il Savant, di essere montati sull'hardware di montaggio Netti. Disponibile nella lunghezza 150 mm. e 250 mm.



Adattatore Whitmyer e Stealth

Questo adattatore consente a tutti i poggiatesta Symmetric, incluso il Savant, di essere montati su hardware da 3/4" (19mm) Whitmyer e hardware Stealth da 5/8" (17mm)



Collare HeadMaster

Leggerezza e traspirabilità

Il Collare HeadMaster™ è un collare cervicale discreto, leggero e stabile, per il supporto del capo.

Questo innovativo collare cervicale fornisce un supporto eccellente e offre una leggerezza senza eguali!

Leggero e traspirante, il collare cervicale è rivestito in un tessuto morbido e lavabile e in diversi colori.



Da oltre 30 anni, HeadMaster è il collare ideale per gli utenti che richiedono il supporto del collo e del capo

Vantaggi per chi lo utilizza e/o caregiver:

- fresco, comodo, supporto per il capo con bassa ritenzione di calore;
- facile da mettere e rimuovere;
- aspetto discreto;
- colori a scelta;
- di semplice detersione;
- migliora la respirazione e la deglutizione estendendo trachea ed esofago;
- supporto costante per il capo




Vantaggi per l'installatore:

- facile da posizionare (il collare cervicale si può modellare a mano);
- buon accesso ad un eventuale tubo tracheale;
- Accessori disponibili per ulteriore sostegno;
- sgancio rapido con velcro;
- 6 dimensioni disponibili.

Il collare HeadMaster nella misura pediatrica può essere applicato anche a neonati a partire dai 6 mesi.

La forma adeguata

- Modellare il collare con le mani, per ottenere le dimensioni desiderate.
- Il collare manterrà la forma ottenuta.
- Modellare il collare in modo da liberare le clavicole, se necessario. La parte sullo sterno può essere imbottita con un cuscinetto per il mento.

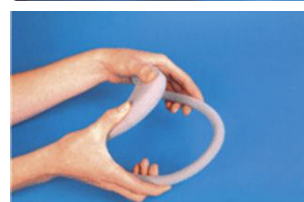

Ultime verifiche

- Verificare che il collare sia ben posizionato sotto il mento.
- La fascia-collo deve passare solo dietro il collo.
- Per una resistenza supplementare all'estensione del collo, adoperare il Cuscinetto-collo o i Cuscinetti-estensione.
- Abbinare al supporto anteriore per irrigidire il collare se necessario.

Uso del collare Headmaster™

- Si raccomanda di far posizionare questo collare da uno specialista qualificato.
- Assicurarsi che la misura sia giusta
- NON abbinare questo collare ad altri sostegni o attrezzature!
- Pulire il collare con una spugna appena bagnata con acqua calda e sapone. Sciacquare bene e asciugare all'aria.

La misura giusta

Scegliere nella tabella la taglia del collare più adeguata (in caso di dubbio, prendere la misura inferiore). La «a» rappresenta la distanza più corta sotto a mascella tra il centro del mento e l'angolo della mandibola.



Taglia del collare	'a'	Taglie e colori			
	cm.	Grigio	Nero	Beige	Blue
Large	13	HMC01-G	HMC01-K	HMC01-B	HMC01-U
Med	11.5	HMC02-G	HMC02-K	HMC02-B	HMC02-U
Small	10	HMC03-G	HMC03-K	HMC03-B	HMC03-U
Junior	9	HMC04-G	HMC04-K	HMC04-B	HMC04-U
Bambino	7.5	HMC05-G	HMC05-K	HMC05-B	HMC05-U
Pupo	6.5	HMC06-G	N/A	N/A	N/A

Avvertenza: questo prodotto contiene della gomma naturale (latex) che può provocare reazioni allergiche.

Versione senza latex	
Large	LFHMC01-G
Medium	LFHMC02-G
Small	LFHMC03-G
Junior	LFHMC04-G
Bambino	LFHMC05-G
Pupo	LFHMC06-G



Accessori HeadMaster

Imbottitura collo

Un pad modellabile per il sostegno posteriore, disponibile in tre colori nero, grigio e beige ed in tre misure large, small e bambino.



Cuscinetti di estensione

Due pad modellabili per il sostegno laterale, disponibili in tre colori nero, grigio e beige ed in tre misure large, small e bambino.



Supporto anteriore


Un supporto anteriore per aumentare la resistenza alla flessione anteriore del capo. Questo supporto deve essere rimosso durante il trasporto in auto. Disponibile in quattro colori nero, grigio, blu e beige ed in tre misure large, small e bambino.



Avvertenze: poiché il collare Headmaster contiene gomma naturale (latex) che potrebbe creare reazioni allergiche, è prevista anche una versione Latex free (solo colore grigio)

Collare TOT

Per il trattamento del torcicollo

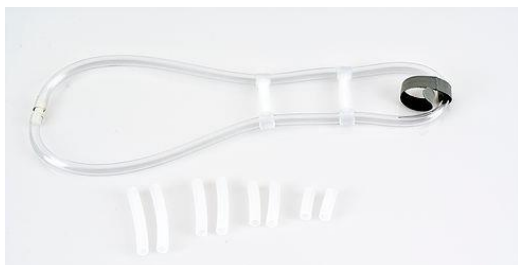

Il torcicollo muscolare congenito è scoperto solitamente nelle prime 6-8 settimane di vita. È caratterizzato da una contrattura del muscolo sternocleidomastoideo, che induce la testa ad essere flessa lateralmente dallo stesso lato della contrattura e ruotata verso la spalla opposta. Se non corretta, questa postura può portare a plagiocefalia e ad una scoliosi toracica superiore.

Per il trattamento del torcicollo muscolare congenito

Il collare TOT è facile da usare ed un efficace aiuto per la terapia per il torcicollo muscolare infantile. L'uso del collare TOT deve avvenire in combinazione al trattamento terapeutico dei bambini con il torcicollo muscolare congenito. Il collare TOT è stato progettato per fornire uno stimolo laterale del cranio. L'utente si allontana da questo stimolo verso una nuova posizione centrale corretta.

L'assunzione di nuova posizione del capo fornisce la capacità al bambino di resettare la percezione orizzontale del capo, in modo da arrivare alla posizione corretta del capo.

Il TOT Collar™ è pre-assemblato e pronto per essere montato.



Attenzione: il bambino non deve essere lasciato da solo mentre indossa questo collare. Rimuovere per dormire

Come funziona e indicazioni per l'uso.

TOT Collar™ è progettato per fornire uno stimolo all'inclinazione laterale del cranio. L'utente si allontana grazie a questo stimolo verso una nuova posizione centrale corretta. L'adozione di una nuova posizione offre la possibilità di ripristinare la percezione dell'orizzontalità e quindi di mantenere la posizione corretta della testa. L'uso del collare TOT viene aggiunto al trattamento conservativo dei neonati con torcicollo muscolare congenito se hanno 4 mesi o più e mostrano un'inclinazione della testa costante di 5 gradi o più. Il bambino deve avere una ROM adeguata (range di movimento) e una reazione di raddrizzamento laterale della testa (controllo della testa e forza) per sollevare la testa dal lato del Collare.

Istruzioni

Il collare TOT è pre-assemblato e pronto all'uso. Ci sono due taglie: Adulto e Bambino. Il tubo in pvc trasparente viene fornito al doppio della circonferenza del collo, più 4"-6" (10 cm-15 cm). Il tubo è unito con un connettore. I tubi bianchi o montanti sono selezionati in base alla quantità di inclinazione laterale della testa. I tubi aggiuntivi sono forniti con il Collare TOT per consentire il cambio dell'inclinazione laterale. Il tubo A si estende dal posteriore alla cresta del trapezio all'occipite. Tubo B* dalla parte anteriore alla cresta del trapezio fino al di sotto della punta del processo mastoideo. Evitare la pressione sulla mandibola. I montanti sono corti per iniziare, per poi essere sostituiti da montanti più lunghi quando si ottiene la correzione. Se vi è una notevole quantità di inclinazione, utilizzare inizialmente montanti molto corti. I tubi possono essere tagliati alla lunghezza esatta richiesta. Per una corretta vestibilità, il bambino dovrebbe tenere la testa in linea mediana, e ci dovrebbe essere spazio di almeno un dito di un adulto tra il tubo in pvc trasparente superiore e il collo. Innanzitutto, montare il collare in modo lasco e assicurarsi che i tubi laterali siano della lunghezza corretta e sul lato corretto. Scorrere con le mani tutto il collare a mano per verificare la vestibilità.



Rimuovere il collare dal bambino. Tagliare il tubo a misura con le forbici e ricollegarlo con il connettore finale. Far indossare di nuovo il collare dopo ogni taglio per verificare la vestibilità.

Nota: fare attenzione a non tagliare troppo il tubo in pvc trasparente, poiché non può essere ricollegato se tagliato troppo corto.

**Nella figura, parte a sinistra più larga, definito Tubo A. Parte a destra più stretta, definito tubo B*



ADALap

Tavolini e accessori per carrozzina

Soluzioni per uno stile di vita attivo

Il vassoio e il sistema di accessori per sedie a rotelle **ADALap** sono progettati per assistere gli utenti in carrozzina, nelle attività quotidiane e consentire loro di essere più attivi nella vita di tutti i giorni.

Il sistema **ADALap** scorre direttamente sotto il cuscino del sedile. La base leggera è molto resistente e facile da usare. Nessun bullone o dado: solo un supporto robusto, regolabile e comodo a tutti gli accessori per sedie a rotelle di cui avrai mai bisogno.

La base è tenuta in posizione dal peso dell'utente, sebbene i fori nella flangia consentano il montaggio permanente sul ripiano del sedile, se lo si desidera.

La regolazione dell'altezza avviene tramite un morsetto a rilascio rapido e il supporto verticale è facilmente rimovibile per il trasferimento. La base può essere inclinata verticalmente per una distanza inferiore per le gambe.

ADALap si adatta alla maggior parte degli utenti. Può essere montato nella parte anteriore o laterale della carrozzina



Benefici:

- Adatto a molte carrozzine, indipendentemente dalla larghezza
- Non usura le imbottiture
- Non impedisce l'accesso alla ruota
- Ottimo per le strutture (condivisione tra gli utenti)
- Leggero e discreto
- Molti accessori disponibili



ADALap

La base del supporto scivola sotto il cuscino della seduta ed è mantenuta in sede grazie al peso dell'utente. La base, in ogni caso, dispone di una struttura pre-forata che consente un montaggio permanente se lo si desidera. La regolazione dell'altezza avviene tramite un morsetto a rilascio rapido e il supporto verticale è facilmente rimovibile per il trasferimento. La base può essere inclinata verticalmente per una distanza inferiore per le gambe



Una piccola valigetta che si apre per contenere documenti, penne e qualsiasi oggetto, ma che funge anche da tavolino. Utilizzare con una superficie antiscivolo per mantenere il controllo di oggetti scivolosi. Niente più oggetti in bilico sulle tue gambe.



Da utilizzare con l'unità base.

Questo versatile adattatore angolare è dotato di una piastra superiore rimovibile con superficie in velcro. Può essere utilizzato per l'inclinazione di vassoi, o qualsiasi cosa che possa applicarsi sull'unità base girevole ADA.



Il tavolino trasparente in policarbonato (25cm x 30cm) fornisce un solido supporto. Ideale per scrivere

Da utilizzare con l'unità base.



Ortesi

Queste ortesi innovative sono indicate per la gestione delle contratture dei muscoli flessori del ginocchio e del gomito. Sono indicate per una vasta gamma di disabilità neuromuscolari e ortopediche. Le ortesi applicano una forza di estensione costante attraverso il pad. È sufficiente stringere le cinghie.



Le ortesi sono sottili, leggere e stabili sull'arto. Sono progettate per uso non ambulatoriale. L'abbinamento agli esercizi di stretching ne migliora ulteriormente i risultati. I polsini sono preformati e facilmente piegabili a mano nella forma desiderata. Il bracciale afferra saldamente l'arto, tuttavia le scanalature interne consentono all'aria di circolare. Tutti i componenti sono intercambiabili per il dimensionamento personalizzato.

Benefici

Si adatta ad un'ampia gamma di giunture articolari

Regolazione giornaliera per una gestione efficace

Veloce e facile da applicare

Sottile, discreto e fresco da indossare

