

Allmo**bility**



PASSEGGINO ESIGENZE SPECIALI

M A M A L U™



MANUALE D'USO





Il produttore si assume la responsabilità solo in caso di corretto utilizzo del dispositivo e solo quando il prodotto è stato acquistato da un rivenditore Akces-Med qualificato o presso un negozio medico specializzato!

AKCES-Med. Ltd. si riserva il diritto di introdurre cambiamenti tecnici e commerciali nel contenuto delle istruzioni senza preavviso.

MEDICAL
DEVICE
CLASS 1




WYRÓB
MEDYCZNY
KLASA 1

Prodotto medico di prima classe secondo il Regolamento 93/42 / EWG del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai prodotti medici. Per questo prodotto il produttore ha rilasciato una dichiarazione di conformità pertinente.



Akces-Med. Sp. z o.o. La società ha introdotto il sistema di gestione della qualità ISO 13485 per quanto riguarda produzione, vendita e assistenza. Il sistema è certificato da Det Norske Veritas.

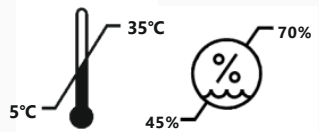



CONTENUTI

1. Scopo del manuale d'uso	5
2. Indicazioni per l'uso	5
3. Caratteristiche generali del passeggino	6
3.1. Equipaggiamento standard	6
3.2. Accessori	7
4. Tabella taglie/dimensioni.....	9
5. Modalità d'utilizzo del passeggino	10
5.1 Chiusura del passeggino	11
5.2 Apertura del passeggino	13
5.3 Regolazione della pedana poggiapiedi	14
5.4 Regolazione della profondità della seduta	15
5.5 Montaggio della cintura di sicurezza a 5 punti	15
6. Accessori	18
6.1 MML_148 Supporti laterali alti	18
6.2 MML_013 Barra anteriore di sicurezza	18
6.3 MML_104 Poggiatesta regolabile	19
6.4 MML_405 Cappottina parasole pieghevole	20
6.5 MML_449 Cover reversibile lavabile in cotone COMFORT	21
6.6 MML_505 Cestello portaoggetti sotto seduta	22
6.7 MML_128 Cuneo abduttore	22
7. Istruzioni d'uso	24
7.1 Preparazione del paziente	24
7.2 Preparazione del passeggino	25
7.3 Come usare la pettorina	26
8. Regole di sicurezza	29
9. Termini della garanzia	31
10. Manutenzione e pulizia	32
11. Etichettatura	34
11.1 Simboli	34



INTRODUZIONE

Caro cliente,

Apprezziamo la tua fiducia nei confronti della nostra azienda e desideriamo ringraziarti per aver scelto il nostro prodotto.

Prima di utilizzare il passeggino, leggere questo manuale utente il quale è essenziale per un uso corretto e sicuro del passeggino.

Moderno e pratico con un design unico - **MAMALU™** è un passeggino creato per gli utenti più giovani, che funzionerà perfettamente in tutte le condizioni. La sua costruzione si basa su un telaio ad ombrello leggero e resistente, ciò significa che si piega facilmente e rapidamente e le sue dimensioni ridotte lo rendono facile da trasportare dopo il piegamento.

In caso di domande o informazioni, non esitare a contattarci:

Responsabile tecnico: tel. +39 0522 941078

E mail: tecnico@allmobility.it

info@allmobility.it

Grazie per aver scelto il nostro prodotto



Prima di utilizzare il prodotto, l'utente è obbligato a leggere attentamente questo manuale. Ricorda che rispettare le linee guida è molto importante per la sicurezza ed estende la durata e l'estetica del dispositivo.



1. SCOPO DEL MANUALE D'USO



Questo manuale di istruzioni contiene le informazioni di base necessarie per:

- Preparare il passeggino prima dell'uso;
- Utilizzare il passeggino;
- Manutenzione e pulizia del passeggino;

Il manuale di istruzioni deve essere tenuto in un luogo facilmente accessibile; è destinato alle persone che si occupano dei bambini disabili, nonché ai medici ed ai fisioterapisti che maneggiano il passeggino. Prima di utilizzare il passeggino **MAMALU™** per la prima volta, l'utente è obbligato a familiarizzare con il manuale.

2. INDICAZIONI PER L'USO

Il passeggino MAMALU™ è destinato agli utenti che necessitano di un comodo mezzo di trasporto. Questo gruppo comprende i bambini che, a causa di malattia o lesioni, hanno limitate capacità (temporaneamente o permanentemente) di camminare autonomamente.

Questo passeggino è consigliato per i bambini nei seguenti casi:

- Alto livello motorio III-V sulla scala GMFCS;
- Vari tipi e forme di paralisi cerebrale;
- Aumento o diminuzione del tono muscolare centrale e/o periferico;
- Ritardo nello sviluppo fisico e/o mentale;



3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PASSEGGINO

3.1 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- ① Telaio pieghevole ad ombrello con regolazione della profondità del sedile,
- ② Maniglie di spinta,
- ③ Ruote anteriori girevoli in PU con blocco della direzione,
- ④ Ruote posteriori in PU con freni indipendenti,
- ⑤ Cintura di sicurezza a 5 punti
- ⑥ Pedana poggiaiedi regolabile,
- ⑦ Tappezzeria/tessuto FLEX.





3.2 ACCESSORI

 <p>MML_001</p>	 <p>MML_013</p>	 <p>MML_101</p>
<p>Luci a LED</p>	<p>Barra di sicurezza</p>	<p>Cintura divaricatrice</p>
 <p>MML_104</p>	 <p>MML_114</p>	 <p>MML_128</p>
<p>Poggiatesta regolabile</p>	<p>Pettorina ad H</p>	<p>Cuneo abduttore</p>
 <p>MML_130</p>	 <p>MML_148</p>	 <p>MML_402</p>
<p>Pettorina di sicurezza a 4 punti</p>	<p>Supporti laterali alti</p>	<p>Ombrello</p>
 <p>MML_403</p>	 <p>MML_405</p>	 <p>MML_408</p>
<p>Tavolino</p>	<p>Cappotina pieghevole</p>	<p>Cover proteggi pioggia</p>
 <p>MML_409</p>	 <p>MML_411</p>	 <p>MML_445</p>
<p>Zanzariera</p>	<p>Porta bottiglia</p>	<p>Coprigambe</p>





4. TABELLA DELLE TAGLIE

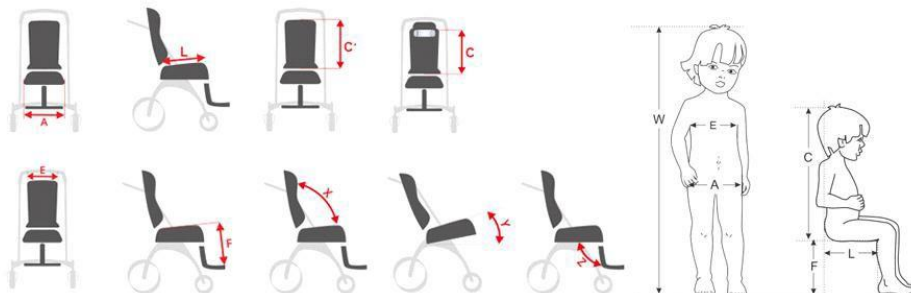


TABELLA DELLE TAGLIE

Simboli	Misure	Unità di misura	Taglia 1
W	Altezza indicativa dell'utente*	[cm]	90-130
A	Larghezza seduta**	[cm]	38 (32)
L	Profondità seduta	[cm]	22, 28
C1	Altezza schienale	[cm]	60
C	Altezza poggiatesta	[cm]	40-55
E	Larghezza dello schienale**	[cm]	38 (32)
F	Lunghezza pedana	[cm]	18, 24, 35
	Altezza maniglie di spinta	[cm]	114
x	Angolo d'inclinazione dello schienale	[°]	95
y	Angolo d'inclinazione della seduta	[°]	25
	Peso massimo dell'utente	[kg]	35

*Questo valore non può essere il fattore principale per la scelta della misura del prodotto.

**I supporti alti e rigidi del tronco restringono il sedile/lo schienale da 6 cm a 32 cm

PESO E DIMENSIONI

Misurazione	Unità di misura	Taglia 1
Larghezza	[cm]	55
Larghezza da chiuso	[cm]	28
Lunghezza	[cm]	102
Lunghezza da chiuso	[cm]	130
Altezza	[cm]	118
Altezza da chiuso	[cm]	33
Peso	[kg]	10,8

Note: L'intervallo di tolleranza per la misura è +/- 1 cm.

Note: Valori approssimativi, a seconda della configurazione del prodotto.



5. MODALITÀ D'UTILIZZO DEL PASSEGGINO

Simboli



ICONA INFORMAZIONI – appare nel manuale quando è necessario leggere le informazioni aggiuntive.



ICONA DI AVVISO – appare nel manuale quando è necessario prendere precauzioni speciali e/o prestare particolare attenzione.




5.1. CHIUSURA DEL PASSEGGINO



Tenere l'utente lontano dalle parti mobili quando si piega e si apre il passeggino.
Vi è un serio rischio di lesioni.



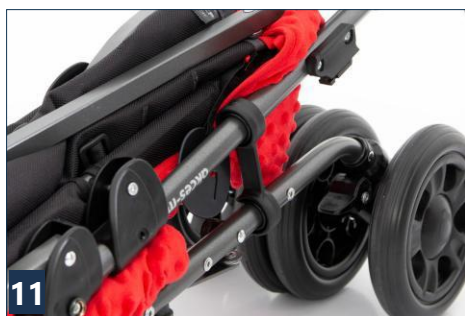



5.2. APERTURA DEL PASSEGGINO



!

Prima di posizionare il bambino nel passeggino, assicurarsi che il montante anteriore (fig. 16, 17) ed il montante posteriore (fig. 18, 19) siano completamente aperti.



5.3. REGOLAZIONE DELLA PEDANA POGGIPIEDI



i

Per modificare l'altezza della pedana poggiapiedi, premere le leve sotto la pedana, tirare con decisione la pedana verso l'alto e quindi fissarla all'altezza desiderata. La pedana poggiapiedi è regolabile in altezza.






5.4. REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI SEDUTA

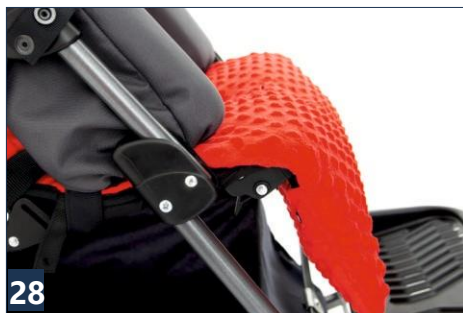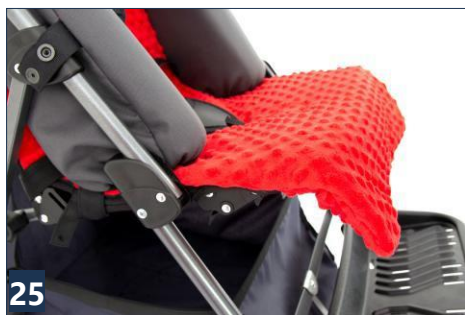

5.5. MONTAGGIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA A 5 PUNTI



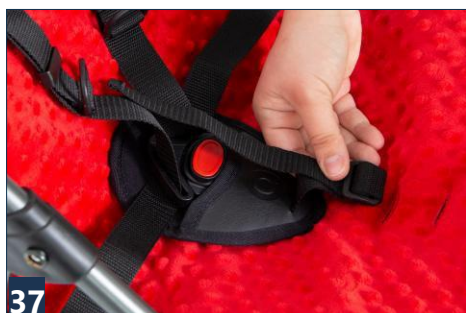





Assicurarsi sempre che l'utente abbia la cintura a 5 punti allacciata correttamente durante l'utilizzo del passeggino. Per verificare ciò, tirare saldamente la cintura in diverse direzioni e controllare che le cinghie non si allentino.

6. ACCESSORI

6.1. MML_148 SUPPORTI ALTI LATERALI

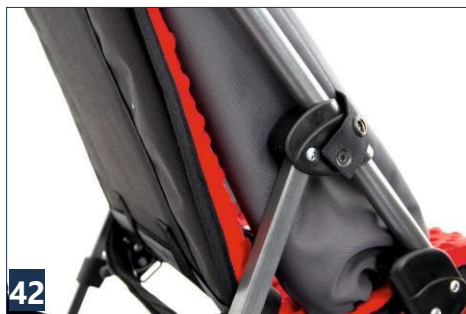

6.2. MML_013 BARRA ANTERIORE DI SICUREZZA


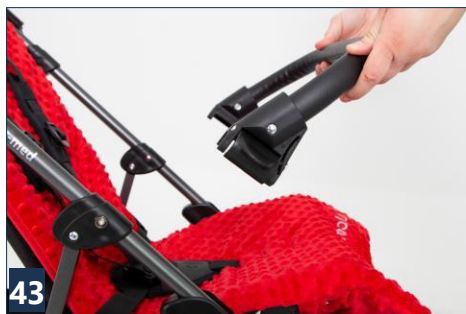





6.3. MML_104 POGGIATESTA REGOLABILE



Per montare il poggiatesta, posizionarlo sullo schienale all'altezza desiderata ed utilizzare i dispositivi di fissaggio in plastica per mantenerlo in posizione.

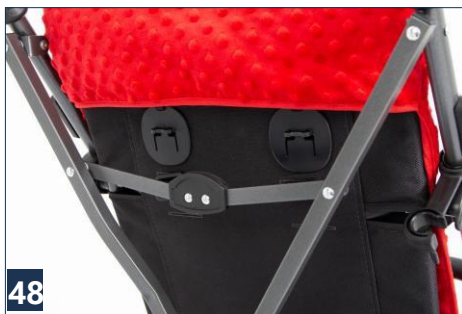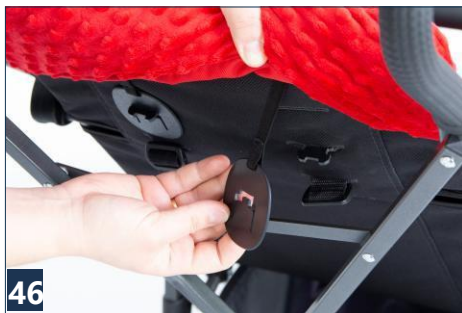

Per rimuovere il poggiatesta, tirare saldamente la parte inferiore del dispositivo di fissaggio.

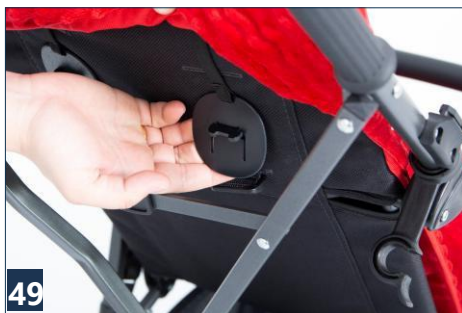



6.4. MML_405 CAPPOTTINA PARASOLE PIEGHEVOLE







6.5. MML_449 COVER COMFORT REVERSIBILE E LAVABILE IN COTONE



Per posizionare la cover reversibile sul passeggino, rimuovere le cinture di sicurezza a 5 punti ed altri elementi fissati sul sedile e sullo schienale. Il rivestimento è attaccato al passeggino con l'uso di bottoni automatici.


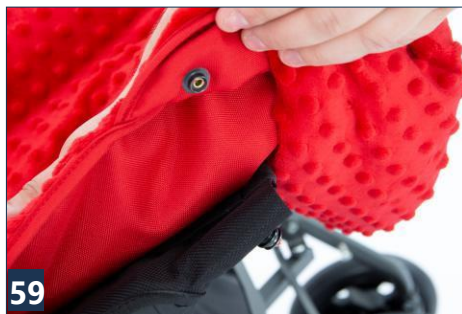
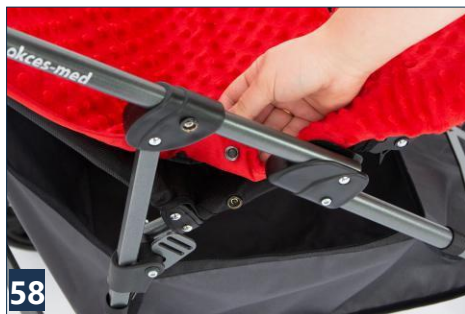


La cover COMFORT è reversibile - è rivestita con un tessuto morbido ed impermeabile MINKY, il quale è delicato sulla pelle.






6.6. MML_505 CESTELLO PORTAOGGETTI SOTTO SEDUTA

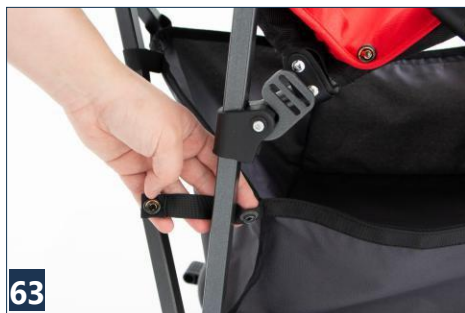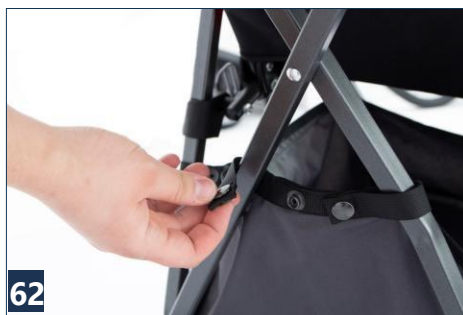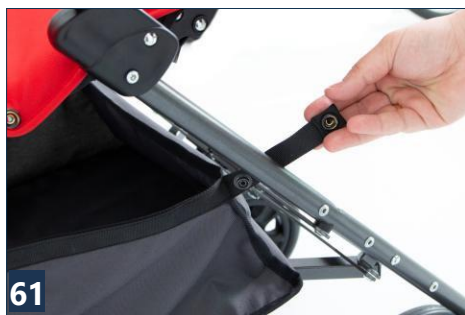

6.7. MML_128 CUNEO ABDUTTORE

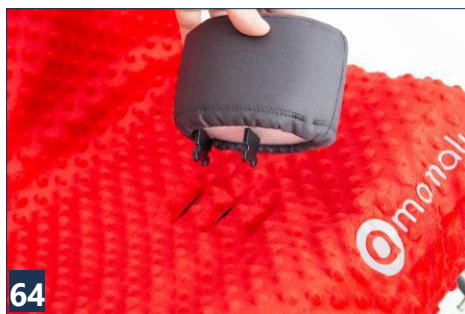





7. USO DEL PASSEGGINO



Il passeggino **MAMALU**™ deve essere utilizzato in conformità con le linee guida incluse in questo manuale. L'utilizzo del prodotto è consigliato ad un personale competente. Non dimenticare di preparare sia il prodotto che il paziente prima di usare il passeggino!

7.1. PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

Prima di utilizzare il prodotto, è essenziale assicurarsi che:

- L'abbigliamento del paziente sia leggero, sono consigliati abiti sportivi;
- Le scarpe dovrebbero essere comode, ed inoltre, dovrebbero stabilizzare la caviglia;
- Per motivi igienici e per evitare abrasioni si consiglia al paziente di indossare sempre abiti durante l'uso del dispositivo, la pelle non deve essere a diretto contatto con la tappezzeria del passeggino;
- Gli scarichi, i sacchetti, i cateteri ecc., se applicati, devono essere fissati al telaio per funzionare correttamente e non disturbare durante l'uso del prodotto;
- Se è necessario per un paziente indossare forniture ortopediche (collare, corsetto, protesi, scarpe) deve essere raccomandato dal medico.



L'abbigliamento del paziente dovrebbe proteggere la pelle del paziente dal contatto diretto con la tappezzeria e altre parti dell'attrezzatura.

Solo il medico può prendere una decisione relativa all'uso di qualsiasi tipo di fornitura ortopedica!



7.2. PREPARAZIONE DEL PASSEGGINO

1. Prima dell'utilizzo è necessario:

- Aprire il passeggino;
- Collocare il dispositivo su una superficie piana;
- Assicurarsi che tutte le parti siano funzionali, correttamente montate e stabili;
- Bloccare i freni;
- Regolare il dispositivo alle misure del paziente;
- Slacciare cinture di sicurezza o pettorina in modo da posizionare facilmente il paziente nel dispositivo
- Posizionare il paziente nel dispositivo;
- Fissare tutti gli elementi che stabilizzano il paziente ad es. pettorina e/o cinture di sicurezza;
- Montare attrezzature aggiuntive ad es. vassoio.

2. Nel caso di pazienti che hanno problemi con la vescica, è necessario mettere un panno speciale sul sedile (ad esempio una traversina). Questo panno può essere acquistato in farmacia o negozi di medicina.



In caso di eventuali ostacoli come gradini o cordoli, è necessario sollevare le ruote anteriori premendo la maniglia verso il basso. Successivamente, posizionare le ruote anteriori sul gradino e poi sollevare la parte posteriore del passeggino con l'aiuto della maniglia. Fare attenzione a non inclinare troppo il passeggino indietro. Ricorda di posizionare il passeggino in avanti.

È fondamentale tenere il passeggino attraverso le maniglie durante l'utilizzo altrimenti il passeggino potrebbe ribaltarsi.

Prima di utilizzare il prodotto, è altamente necessario assicurarsi che tutte le cinture e gli equipaggiamenti di sicurezza siano correttamente fissati e regolati. Controllate inoltre che non si sciolgano a causa della pressione e assicuratevi che i morsetti degli elementi regolabili siano serrati saldamente!

L'apparecchiatura funziona correttamente solo quando il dispositivo è regolato in base all'altezza ed al peso del paziente. Ricordarsi di prendere in considerazione tutte queste misure durante l'acquisto del prodotto. La regolazione corretta è la più importante a causa del fatto che solo allora il prodotto è sicuro. È proibito forzare il bambino a mantenere la posizione specifica, perché lei/lui lo riterrà scomodo e può condurre ad una postura errata.



7.3. COME USARE LA PETTORINA



La pettorina fornisce un supporto posturale per le persone in sedia a rotelle ed i pazienti seduti su sedie di posizionamento o altri sedili riabilitativi. Se correttamente utilizzata, la pettorina consente al paziente di adottare la corretta posizione per un periodo di tempo più lungo. Il design e la forma consentono al paziente di essere libero di muovere gli arti superiori entro i limiti del paziente. Se la pettorina non viene utilizzata correttamente, può rappresentare una grave minaccia per la salute e la vita del paziente!

Possibili minacce/incidenti legate all'uso della pettorina:

- 1) **Se le cinghie inferiori della pettorina sono allacciate in modo troppo lento, potrebbe presentarsi il rischio che la pettorina si sposti verso l'alto fino al collo del paziente, rendendo difficile la respirazione** – controllare sempre la tensione delle cinghie e posizzarle in modo tale che il bordo inferiore della pettorina si trovi vicino all'addome inferiore del paziente.
- 2) **In una situazione in cui il paziente scivoli giù dal sedile, il bordo superiore della pettorina potrebbe coprire il collo del paziente e bloccare la trachea, rendendo difficile la respirazione** – è pertanto necessario utilizzare SEMPRE gli accessori che stabilizzano il bacino del paziente, come una cintura pelvica, cinture per abduzione della coscia o una barra anteriore.
- 3) **Le cinghie superiori della pettorina potrebbero premere sul collo del paziente, bloccando la trachea e rendendo difficile la respirazione.** Ciò può accadere se il corpo del paziente è fissato in modo improprio nel sedile o nel passeggino; è quindi necessario utilizzare gli accessori opzionali di questi dispositivi e stabilizzare il corpo del paziente utilizzando i supporti laterali. Se non è possibile utilizzare tali accessori con il dispositivo e il corpo del paziente potrebbe non essere adeguatamente stabilizzato, il dispositivo deve essere sostituito con uno con tale opzione.
- 4) **La pettorina è troppo stretta allo schienale e di conseguenza il paziente non riesce a respirare facilmente** – in questo caso la pettorina deve essere allentata in modo tale che sia possibile per il caregiver inserire una mano tra la pettorina ed il corpo del paziente. Se, tuttavia, vogliamo stabilizzare correttamente il corpo del paziente, dovremmo usare pettorina ortopedica dinamica, ad es. una pettorina Flex-point, che non causa difficoltà respiratorie al paziente.



Istruzioni per l'uso corretto della pettorina:

- 1) Assicurarsi che il paziente sia seduto nella posizione migliore possibile:
 - Al centro della seduta;
 - Profondamente nel sedile in modo tale che la colonna lombare del paziente poggi contro lo schienale.
- 2) Fissare il bacino del paziente con, ad esempio, una cintura pelvica, cinture di abduzione della coscia o un cuneo divaricatore.
- 3) Assicurarsi che i supporti laterali del dispositivo, se utilizzati, siano impostati nella posizione corretta. È necessario che i pazienti con scarso controllo del tronco utilizzino i supporti laterali, i quali limitano i movimenti laterali del corpo del paziente, il che potrebbe portare alla compressione delle cinghie della pettorina sul collo del paziente.
- 4) Fissare la pettorina:
 - allacciare e regolare le cinghie inferiori della pettorina, in modo che il bordo inferiore del giubbotto si trovi vicino all'addome inferiore del paziente;
 - allacciare la cinghia orizzontale della pettorina;
 - allacciare gli spallacci della pettorina;
 - controllare se le fibbie della pettorina non si aprano sotto pressione.
- 5) Controllare la posizione del paziente
 - assicurarsi che la pettorina non possa muoversi da sola verso il collo del paziente,
 - assicurarsi di poter inserire una mano tra la pettorina e il corpo del paziente.

Per prevenire lesioni e minimizzare i rischi associati all'uso della pettorina, è necessario seguire le seguenti regole:

- 1) La posizione della pettorina DEVE essere controllata ogni volta dopo aver posizionato il paziente sul sedile.
- 2) Prestare particolare attenzione alla protezione del paziente dalla caduta in avanti, dallo scivolamento dal sedile o dal sollevamento del bacino. La pettorina DEVE essere utilizzata con gli accessori che fisseranno il bacino del paziente in ogni momento (ad es. cintura pelvica, cinture per abduzione della coscia o barra anteriore). L'uso della pettorina non può essere considerato separatamente ma come parte di un sistema di supporto della postura generale che include supporti come cinture pelviche, supporto del piede, stabilizzazione del busto, cinture di abduzione della coscia, posizione di inclinazione nello spazio e schienale reclinabile.
- 3) Prestare particolare attenzione a garantire che l'intero piede del paziente abbia un supporto stabile. Se il dispositivo non è dotato di un supporto per i piedi, i piedi del paziente devono poggiare saldamente a terra.



- 4) Tenere in considerazione che qualsiasi modifica dell'angolo di inclinazione dello schienale, del sedile, del poggipiedi o della funzione di inclinazione nello spazio potrebbe influire sull'efficacia delle cinture e dei supporti!
- 5) Prestare particolare attenzione all'uso di elementi di stabilizzazione o supporti laterali. Se il paziente ha uno scarso controllo del tronco, i supporti laterali limiteranno i movimenti laterali, il che potrebbe portare alla compressione delle cinghie della pettorina sul collo del paziente.
- 6) Il montaggio della pettorina e l'adattamento al paziente può essere eseguita solo da una persona adeguatamente addestrata, che abbia familiarità con le istruzioni per l'uso della pettorina e le regole per un uso sicuro.
- 7) Non effettuare riparazioni o modifiche alla pettorina da soli. Per riparare o sostituire qualsiasi parte della pettorina, si prega di contattare il fornitore.
- 8) Non utilizzare una pettorina danneggiata o incompleta, poiché ciò rappresenta una grave minaccia per la salute e la vita del paziente!
- 9) Non lasciare il paziente nel dispositivo incustodito!
- 10) Il corretto utilizzo della pettorina deve essere controllato in particolare secondo le raccomandazioni in caso di bambini, pazienti con memoria compromessa o malati di mente.
- 11) Assicurarsi che tutte le persone che si prendono cura del paziente abbiano familiarità con le regole per l'uso sicuro della pettorina.

Come prendersi cura della pettorina:

La pettorina funziona efficacemente solo se tenuta pulita e mantenuta secondo le istruzioni del produttore. Prima di ogni utilizzo, verificare se:

- 1) Le cinghie della pettorina non siano sfilacciate o usurate. Se è così, farle scambiare con nuovi
- 2) Le cinghie della pettorina non sono fissate alle ruote del dispositivo.
- 3) Le fibbie non siano danneggiate. Se danneggiate dovranno essere cambiate o sostituite con delle nuove.
- 4) La chiusura in velcro tenga saldamente. In caso contrario, rimuovere lo sporco o i capelli dal velcro o sostituirlo con uno nuovo,
- 5) Non ci siano stati cambiamenti in altezza o peso del paziente dal momento in cui la pettorina è stata adattata al paziente,
- 6) Gli spillacci della pettorina sono regolati in modo che non siano troppo larghi o troppo stretti,
- 7) La pettorina deve essere pulita regolarmente con acqua tiepida e sapone, e successivamente asciugata dalla luce solare diretta e da altre fonti di calore. La pettorina deve essere sempre asciutta prima dell'uso.

In caso di dubbi o domande sull'utilizzo della pettorina, si prega di contattare il proprio medico o fisioterapista.



8. REGOLE DI SICUREZZA



Il passeggino MAMALU™ deve essere utilizzato in conformità con le linee guida di questo manuale.

È molto importante consultare il medico o il fisioterapista per prendere la giusta decisione in merito alla scelta del passeggino e alle sue dimensioni. È inoltre essenziale acquisire familiarità con le linee guida descritte nel manuale dell'utente prima di utilizzare il dispositivo.

1. Prima dell'utilizzo è necessario:

- assicurarsi che non vi siano diversi danni che possano mettere in pericolo la vita del paziente; verificare se tutte le parti funzionano e sono montate correttamente e, inoltre, verificare che non siano rotte;
- verificare che tutte le viti, i pomelli e tutte le parti incollate, cucite siano serrate;
- verificare che i freni funzionino correttamente;
- controllare che le fibbie funzionino correttamente;
- utilizzare sempre le cinture di sicurezza, i nastri in velcro devono sovrapporsi min. 8 centimetri;
- regolare il dispositivo in base alle misurazioni e alle esigenze del paziente, ad es. la regolazione di pelotte, poggiapiedi ecc.;
- assicurarsi che tutte le parti mobili e le manopole per le regolazioni siano stabili e bloccate;
- assicurare il paziente con l'ausilio di elementi quali pettorina, cinture stabilizzatrici del piede, pelotte, barra anteriore, poggiatesta. È molto importante proteggere il paziente da possibili cadute.



2. È vietato utilizzare il passeggino per scopi diversi.
3. È vietato utilizzare il passeggino quando è danneggiato o manca qualche parte.
4. È vietato lasciare il paziente incustodito.
5. Il passeggino dovrebbe essere usato solo da personale qualificato o personale che abbia dimestichezza con l'ausilio.
6. È vietato lasciare incustoditi il passeggino e il paziente su un terreno instabile, anche se il freno è inserito.
7. È vietato salire o scendere le scale; non importa se il paziente viene inserito o meno nel dispositivo.
8. È importante inserire il freno durante l'entrata e l'uscita dal passeggino.
9. Accertarsi che l'utente non si appoggi sul poggiatesta quando si sale e scende dal passeggino.
10. Assicurarsi che tutti gli arti non siano vicini ai raggi o ad altri elementi regolabili.
11. Il passeggino deve essere riposto e usato lontano da fonti di calore o alte temperature. Inoltre, il passeggino non deve essere conservato in ambienti con elevata umidità.
12. Assicurare il passeggino durante il trasporto per evitare possibili danni. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni che sono comparsi a causa di una preparazione impropria del dispositivo durante il trasporto.
13. Prima di utilizzare il passeggino, rimuovere tutti gli imballaggi di carta e plastica. La confezione non è un giocattolo! Tenere lontano da bambini e animali



È vietato posizionare il paziente nel dispositivo mentre si trova in auto, autobus o treno.

Il prodotto contiene piccole parti che i bambini possono ingerire.

Non utilizzare un prodotto che presenta danni visibili, strappi o usura. Solo un prodotto integro e un uso corretto ne garantiscono il funzionamento corretto e sicuro. Se il prodotto è danneggiato, interrompere l'uso e contattare il fornitore.

In nessun caso una persona non qualificata dovrebbe riparare o alterare il prodotto e la sua costruzione, poiché la salute e la sicurezza dell'utente dipendono da esso e ciò comporterà la perdita della garanzia.

Ricorda che tutti i carichi appesi alla maniglia di spinta possono far perdere l'equilibrio al passeggino.

Il peso dell'utente non deve essere maggiore del peso massimo descritto a pagina 9 dove sono disponibili informazioni su questo problema.

9. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

- 1) Akces-MED Sp. z. o. o vende prodotti privi di difetti o difetti di fabbricazione.
- 2) Il produttore offre all'acquirente una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Tutti i difetti rilevati durante il periodo di garanzia saranno riparati gratuitamente.
- 3) Tutti i difetti che compaiono dopo il periodo di garanzia possono essere riparati solo quando l'utente li pagherà. Questa regola non si applica ai prodotti rimborsati: l'utente può chiedere il rimborso a National Health Refund.
- 3a) Il passeggino è coperto da una garanzia di 36 mesi sul territorio del Canada - i dettagli dei diritti derivanti dalla garanzia estesa sono regolati dalla scheda di garanzia.
- 4) Il produttore afferma che il prodotto può essere utilizzato per 48 mesi. L'utente può utilizzare questo prodotto dopo questo periodo solo quando invierà il dispositivo al produttore per poterlo riparare. Successivamente, il produttore determina nuovamente per quanto tempo può essere utilizzato il prodotto e, inoltre, verrà determinata la data del prossimo servizio.
- 5) Se il prodotto è danneggiato, contattare il nostro rivenditore o Akces-MED Sp. z. o. o servizio clienti (tel. 17/864 04 70, e-mail: export@akces-med.com)



10. MANUTENZIONE E PULIZIA

Il passeggino MAMALU™, che è un dispositivo medico, deve essere sempre tenuto pulito e deve essere utilizzato secondo le istruzioni del produttore. Il passeggino deve essere tenuto in una stanza pulita, asciutta e ventilata. La manutenzione e la pulizia devono essere eseguite almeno una volta al mese. La pulizia e la manutenzione periodiche della sedia sono essenziali per il corretto funzionamento e la sicurezza.

Consigli per la pulizia del rivestimento e di altri elementi del passeggino:

1. Lavare con acqua tiepida utilizzando un panno morbido e detersivi delicati.
2. Accertarsi che il panno non sia troppo bagnato, in quanto ciò potrebbe allargare la macchia e danneggiare il rivestimento o la schiuma all'interno del rivestimento.
3. Ricordarsi di rimuovere l'umidità in eccesso dal rivestimento prima della pulizia successiva.
4. Dopo aver pulito le macchie, il rivestimento deve essere sciacquato con acqua tiepida e asciugato con un panno pulito.
5. Non immergere il rivestimento.
6. Il rivestimento non deve bagnarsi durante la pulizia.
7. Non utilizzare spazzole dure per la pulizia del rivestimento.
8. Non pulire il rivestimento con prodotti chimici forti, ad es. solventi o sostanze caustiche a base di cloro.
9. Non pulire e/o sostituire alcun elemento del passeggino durante l'utilizzo.
10. Gli elementi in metallo e plastica devono essere puliti a mano con detersivi adeguati, dopo aver letto le raccomandazioni del produttore del detersivo indicato.



Il produttore del passeggino, Akces-MED Sp. z o. o., non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso di detersivi non idonei.



Ricorda che il rivestimento deve essere sempre asciutto prima dell'uso!

Prima dell'utilizzo è necessario:

- Pulire le ruote;
- Verificare che la base e le ruote siano montate correttamente; controllare il funzionamento del freno;
- Verificare che la costruzione del passeggino sia priva di rotture o di qualsiasi tipo deformità;
- Verificare se tutte le parti mobili funzionano e tutte le viti, i dadi, le manopole ecc. siano serrati correttamente;
- Controllare che le cinture, la pettorina, le cinture di sicurezza, le cinture di stabilizzazione dei piedi ecc. non siano sfilacciate; controllare se le fibbie ed i morsetti funzionano correttamente.



Il produttore si assume la responsabilità solo per guasti nascosti o danni che sono comparsi nonostante il fatto che l'utente abbia rispettato le linee guida.

In caso di danni, è essenziale contattare la persona che ti ha venduto il prodotto.
















11. ETICHETTATURA

11.1. SIMBOLI

-  Dichiarazione che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali
-  Numero di catalogo
-  Numero seriale
-  Si prega di leggere le istruzioni del manuale prima dell'uso
-  Non stirare
-  Il prodotto non contiene lattice
-  Conservare in un luogo asciutto
-  **ATTENZIONE!** Contenuto fragile
-  Proteggere dal sole
-  Temperature
-  Umidità
-  Non clorurare
-  Non utilizzare un'asciugatrice

-  Non usare candeggina
-  Asciugare in verticale
-  Vietato utilizzare il prodotto senza l'uso di cinture di sicurezza
-  Divieto di lasciare il paziente incustodito durante l'uso del prodotto
-  Vietato salire e/o scendere le scale con il passeggino
-  Fabbricante
-  Data di produzione
-  Leggere le informazioni aggiuntive
-  Premere il pulsante raffigurato
-  Per il montaggio è necessario utilizzare gli strumenti indicati nella descrizione dell'assieme.
-  Prendere precauzioni speciali



FORNITORE

Allmobility Trading Srl

Via G. Balla, 4 – 42124 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 941078 – Fax 0522 946625

info@allmobility.it – tecnico@allmobility.it

www.allmobility.it

PRODUTTORE



Akces-MED. Sp. z o.o.

Jasionka 955B 36-002 Jasionka
tel. (17) 864 04 70

e-mail: export@akces-med.com BDO: 000031619

Authorized Data



akces-med.com

Date of issue: 06.05.2019

The last update: 30.03.2020

© Sławomir Wroński 2020

