



Yes, you can.®



Invacare® **Flo-tech Xtra**

NOVITÀ

Cushion & Modular System

L'unità posturale per il bacino completa e versatile

Il nuovo *Invacare® Flo-tech Xtra Cushion and Modular System* è stato sviluppato in collaborazione con tecnici specialisti per rispondere alle esigenze posturali di chi utilizza la carrozzina. All'eccellente redistribuzione della pressione, principale caratteristica del cuscino *Invacare® Flo-tech Solution*, si associa un'efficace correzione e gestione della postura, grazie alle molteplici configurazioni garantite dalle parti componenti il nuovo *Xtra Modular System*.





➤ **Studiato per promuovere la gestione e la correzione attiva della postura**

L'impiego dei componenti modulari applicabili nella parte superiore del cuscino, associato ai cunei applicabili nella parte inferiore, garantisce un'ampia varietà di opzioni che permette ai terapisti il perseguimento e la gestione di specifiche posture. I cunei inferiori, poi, sono ulteriormente adattabili alle esigenze specifiche grazie alle dime premarcate ed agli inserti in velcro che ne permettono un facile taglio ed applicazione.

➤ **Cuscino dotato di una doppia sacca di gel nella zona ischio-sacrale**

Lo strato addizionale di gel, incorporato all'altezza della zona ischio-sacrale, aumenta ancor più la riduzione di pressione garantita dal cuscino, rendendolo adatto ad utilizzatori ad Altissimo Rischio di piaghe da decubito.

➤ **Inserti in velcro, sopra e sotto il cuscino, per il fissaggio delle parti modulari**

Il cuscino è stato dotato, sia nella parte superiore sia nella parte inferiore della base, di inserti in velcro così da poter applicare i componenti del **Xtra Modular System**. Tutte le parti componenti sono prodotte in schiuma CMHR ad alta densità ed il fissaggio con il velcro garantisce il mantenimento della postura prescritta anche dopo un uso ripetuto.


➤ **Design della fodera del cuscino**

La fodera, prodotta con materiale idrorepellente, è stata concepita con un innovativo design che ne permette l'espansione e favorisce l'immersione dell'utilizzatore nel cuscino una volta che i componenti **Invacare® Flo-tech Xtra** siano stati aggiunti.

La fodera ha due Zip con cerniere di colore diverso:

- Blu per aprire la fodera;
- Verde per espanderla.

La fodera può essere aperta sia dalla sommità sia dal fondo per aggiustare i componenti del cuscino.

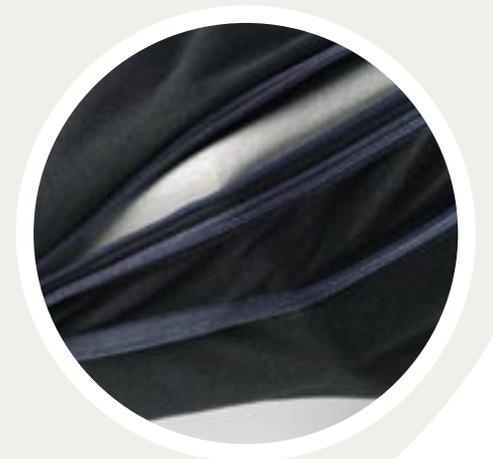

Componenti



Supporto per obliquità pelvica

Il supporto per obliquità pelvica può essere inserito in entrambi i lati dell'ischio sotto l'imbottitura gel.



Allineatori per anca

I supporti per le anche possono essere posizionati, ed assicurati con il velcro, indifferentemente in entrambi i lati all'estremità posteriore del cuscino. Possono essere utilizzati singolarmente o in coppia.



Cunei adduttori

I cunei adduttori possono essere posizionati, ed assicurati dal velcro, ai lati della cosce nella parte anteriore del cuscino. Possono essere utilizzati singolarmente o in coppia.



Cuneo abduttore Standard e Alto

Il cuneo abduttore può essere posizionato nella parte anteriore del cuscino per incrementare l'altezza del cuneo esistente. Due misure disponibili.



Base rigida

La base rigida deve essere posizionata sotto il cuscino (anche sotto i cunei). Mantiene una base rigida nelle carrozzine con seduta in tela e massimizza gli effetti delle parti componenti.



Cuscino di gel fluido

Il cuscino di gel fluido può essere inserito sotto l'ischio e, qualora si rendesse necessario, può essere raddoppiato per specifici posizionamenti.



Cunei angolari

Possono essere posizionati sotto a qualsiasi angolo della base cuscino. Ci sono due differenti cunei che possono essere utilizzati in tutti e quattro gli angoli.



Cunei laterali


Possono essere posizionati sotto la base del cuscino. Sono forniti in un'unica misura e vanno tagliati e adattati secondo la lunghezza del cuscino.



Cuneo frontale

Deve essere posizionato sotto la parte anteriore della base del cuscino e tagliato seconda la larghezza del cuscino stesso.

Dati tecnici

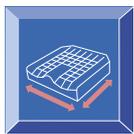

44 misure disponibili*



Altezza: 7,8 cm



Peso: 3,08 kg



Peso massimo utilizzatore: 140kg

* Misure disponibili da 38/41 a 51/46 cm.

** Misure disponibili a magazzino:

38x41 - 41x41 - 41x43 - 41x46 - 43x41 - 43x43 - 43x46 - 46x41 - 46x46 - 48x48 - 46x51 cm
(tutte le altre misure disponibili su ordinazione)

Schiumato:

Prodotto secondo gli standard Europei e resistente al fuoco secondo i British Standard:

BS 7176:1995 (Crib 5)

BS 5852:1990 (Crib 5)

Dati tecnici fodera



Lavabile max 71 °C
Usare detersivi neutri

Bielastica
Impermeabile
Idrorepellente
Traspirante
Resistente al fuoco secondo
British Standard BS7175:1989 crib 5

Colore/Tipo di fodera



Nero/Tessuto

Codice ISO (unità posturale per il bacino - Solution Xtra + Modular System): 18.09.39.015

Codice ISO (elementi di contenimento laterali): 18.09.39.139

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCEBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PR ESCRIVENTE.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI