

I diversi tipi di sistemi con condom vengono concepiti e realizzati nei nostri stabilimenti. Prodotti a Lobbach, questi condom presentano dei vantaggi, che in fatto di sicurezza, affidabilità tecnica e di applicabilità sono irrinunciabili per il Cliente. Grazie alle loro caratteristiche, risultano confortevoli nell'indossarli.

Condom

Materiale: sintetico o lattice

Fissaggio: autocollante oppure con il mastice adesivo per pelle.

Strisce adesive



A seconda dei modelli, le seguenti caratteristiche sono comuni ai nostri sistemi con condom.

11 misure diverse: Grazie all'ampia scala di diametri gradualmente differenziati (diametro 18–40 mm), è possibile un'applicazione ottimale del condom: quanto più precisa è la sua misura, tanto più sicura sarà la sua adesione al pene.

I materiali sintetici: del condom e dello strato adesivo interno (nei modelli autocollanti), sono privi di lattice, in modo da escludere a priori qualsiasi tipo d'irritazione cutanea o allergia provocate occasionalmente dal lattice.

I materiali altamente elastici: l'estrema elasticità – in particolare del lattice – fornisce, nel caso di minzioni spontanee di elevata quantità, una zona cuscinetto sufficiente, assicurando contemporaneamente una completa evacuazione dell'urina senza che vi sia ristagno in punta.

Consulenza, campioni, confezioni speciali

Avete domande riguardanti i condom? Desiderate ricevere campioni gratuiti? Avete esigenze individuali? Nel nostro laboratorio siamo in grado di produrre condom di diverse misure, in diversi materiali e speciali modelli. In particolare nel caso dei condom autocollanti sono possibili diverse varianti: posizione e lunghezza della zona collante, mastice adesivo con maggiore forza adesiva.

Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale specializzato.

Spessore del materiale: Il condom diventa sempre più sottile nella parte anteriore, per garantire così un perfetto adattamento allo stato della pelle, che si traduce in una migliore capacità adesiva.

La punta del condom rinforzata: evita strappi del condom in caso di variazioni della pressione meccanica.

L'attaccatura a raccordo: viene spinta ovvero innestata direttamente al condom. È adatta ad ogni tipo di sacca di raccolta dell'urina – senza adattatore nel caso del tubicino di scarico delle sacche da gamba SAUER, cosicché può essere accorciato a piacere, garantendo un adattamento individuale – con adattatore per ogni altro tipo di sacca di raccolta dell'urina.

Il controllo al 100%

Per garantire a chi ne fa uso la sicurezza più ampia possibile, tutti i condom vengono controllati ad uno ad uno per testare la loro resistenza allo strappo e la loro ermeticità.

Condom – autocollanti

SAUER-Comfort – Standard	► pag. 6
SAUER-Comfort – Confezioni speciali.....	► pag. 7
Condom senza zona cuscinetto	► pag. 9

Condom – fissaggio separato

Condom sintetici anallergici	► pag. 10
Condom in lattice – Originali.....	► pag. 11
Condom in lattice – Extra sottili	► pag. 11
Condom – Confezione combinata	► pag. 12

Modello autocollante: La zona adesiva all'interno del condom rende possibile un'applicazione facile e veloce garantendo un collegamento efficace tra condom e pelle.

La scelta del condom appropriato

Determinare innanzitutto con l'aiuto del misuratore a nastro (► pag.16) la misura del condom necessario. Usare dapprima i condom autocollanti "SAUER Comfort"; qualora i risultati non siano soddisfacenti, consigliamo di contattare un nostro consulente, che Vi aiuterà a scegliere i tipi di condom e/o di mastice adesivo per pelle più idonei.

Mastice adesivo per pelle SAUER

Il mastice adesivo per pelle liquido garantisce un'adesione più sicura tra pelle e condom. Rispetto ai condom autocollanti questo tipo di sostanza adesiva permette di soddisfare meglio le esigenze individuali, potendo determinare, a seconda delle proprie necessità, la quantità di mastice da applicare, la lunghezza della zona di adesione e la misura della "zona cuscinetto". I mastici adesivi per pelle SAUER proposti in diverse composizioni per ogni tipo di pelle, continuano a dare da oltre 30 anni ottimi risultati.

La sua composizione: risponde alle più attuali conoscenze in campo dermatologico. Il mastice adesivo per pelle viene proposto in diverse combinazioni, adattate alle esigenze cutanee individuali. Gli elementi base del mastice adesivo per pelle SAUER "Originali" sono caucciù mastizzato come adesivo, eptano come solvente per regolare la viscosità, ossido di zinco per ammorbidire e lanolina per curare la pelle.

L'azione collante: risulta diversa, a seconda dei tipi di prodotti e della loro composizione:

- I mastici 50.01 e 50.03 hanno una forza adesiva che nella maggior parte dei casi garantisce un'adesione del condom per 24 ore.
- Riducendo le sostanze nutrienti per la pelle contenute nel mastice, aumenta la forza adesiva (50.05 e 50.00).
- Elevando la quantità di resina contenuta nel mastice tipo "Originali", la capacità adesiva aumenta ulteriormente (50.20 e 50.22).

Produzioni speciali del mastice adesivo per pelle

In caso di domande riguardanti l'uso del mastice adesivo per pelle, rivolgetevi al nostro personale specializzato.

Articoli in lattice

Molti dei nostri Clienti confermano l'uso pluriennale dei condom in lattice dal sistema SAUER senza particolari reazioni cutanee. A favore del lattice parla anche il fatto che, rispetto ai materiali sintetici, presenta indiscussi vantaggi: si tratta infatti di un prodotto naturale praticamente inesauribile, ricavato dall'albero di caucciù, non inquinante sia nella produzione che nello smaltimento.

Non bisogna dimenticare che il caucciù sintetico e il silicone contengono un'elevata quantità di sostanze chimiche, i cui effetti non sono sufficientemente conosciuti. La produzione e la lavorazione del caucciù sintetico, un prodotto petrolifero, sono dispendiose a causa dell'alta quantità di sostanze solventi simili a benzina notevolmente problematiche sia per le persone addette alla produzione, sia per l'ambiente.

In caso di fondati dubbi riguardanti l'uso di condom contenenti lattice o del mastice adesivo per pelle oppure qualora sia stata constatata una relativa incompatibilità, potete sostituire con prodotti privi di lattice costituiti da materiali sintetici.

Maggiori informazioni riguardanti questo tema sono contenute nella nostra „Guida all'incontinenza”, che potete richiedere o scaricare dalla nostra Homepage:

www.manfredsauer.it

Resistenza all'acqua: I mastici adesivi per pelle permettono di indossare il sistema facendo il bagno o nuotando, senza che l'adesione ne risenta.

Nutrizione cutanea: Grazie all'aggiunta di sostanze nutrienti è possibile usare il sistema con condom 24 ore su 24.

Togliere il condom: Solitamente il mastice non lascia residui adesivi sulla pelle, perché il condom e il mastice sono creati l'uno per l'altro.

Tube con apertura a pipetta: Garantisce un'applicazione facile e pulita del mastice.

Mastice adesivo – SAUER.....	► pag. 13
Mastice adesivo speciale.....	► pag. 14
Fascette biadesive	► pag. 15
Accessori condom	► pag. 16
Cura e protezione della pelle.....	► pag. 17

Condom autocollanti – SAUER-Comfort

Per soddisfare i desideri degli utenti, sono disponibili i condom autocollanti SAUER Comfort, oltre che nel modello standard (► vedi sotto) in tre diversi tipi (► pag. 7), che si differenziano nella lunghezza della zona cuscinetto e nel potere collante.

Condom e mastice adesivo sono costituiti da materiale sintetico. L'attaccatura a raccordo si adatta a tutte le sacche di raccolta dell'urina, con o senza adattatore.

SAUER-Comfort – Standard

Lunghezza totale ca. 175 mm, zona cuscinetto 75 mm, mastice normale.

Confezione da 30 pezzi

Misura Ø 18 mm

Nr. d'ord. 97.18

Tagliando di controllo bianco

20 mm

97.20

22 mm

97.22

24 mm

97.24

26 mm

97.26

28 mm

97.28

30 mm

97.30

32 mm

97.32

35 mm


97.35

37 mm

97.37


40 mm

97.40

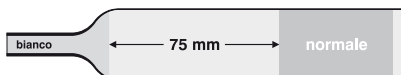


Sauer
Comfort

- ~~18~~
- ~~20~~
- ~~22~~
- ~~24~~
- ~~26~~
- ~~28~~
- ~~30~~
- ~~32~~
- ~~35~~
- ~~37~~
- ~~40~~

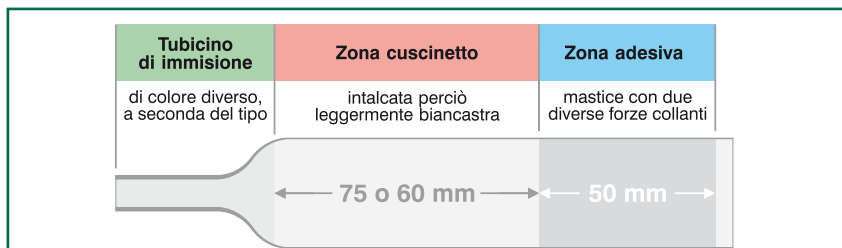

La zona compresa tra l'attaccatura e la zona collante è cosparsa di talco e costituisce con i suoi 75 o 60 mm di larghezza la zona cuscinetto. A questa segue una zona collante lunga 50 mm con due tipi diversamente forti di sostanza adesiva. Per una evidenziazione certa l'attaccatura a raccordo ha un colore diverso a seconda del modello.

Per acquistare manualità, potete richiedere i cosiddetti "pollicini", cioè dei condom autocollanti del diametro di 22 mm, ideali per esercitare sul pollice le varie fasi dell'applicazione di un condom. In questo modo potete imparare a risolvere qualsiasi tipo di impedimento, come ad esempio la formazione di raggrinzimenti, o riconoscere in quale punto del condom comincia la zona adesiva.

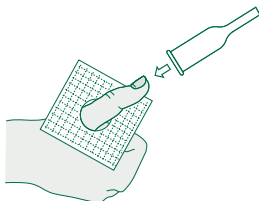

SAUER-Comfort – Blu

Lunghezza totale ca. 175 mm, zona cuscinetto 75 mm, mastice più forte.

Confezione da 30 pezzi

Misura \varnothing 18 mm **Nr. d'ord.** 97.7501.18

Tagliando di controllo blu



20 mm	97.7501.20
22 mm	97.7501.22
24 mm	97.7501.24
26 mm	97.7501.26
28 mm	97.7501.28
30 mm	97.7501.30
32 mm	97.7501.32
35 mm	97.7501.35
37 mm	97.7501.37
40 mm	97.7501.40

SAUER-Comfort – Verde

Lunghezza totale ca. 160 mm, zona cuscinetto 60 mm, mastice normale.

Confezione da 30 pezzi

Misura \varnothing 18 mm **Nr. d'ord.** 97.6000.18

Tagliando di controllo verde



20 mm	97.6000.20
22 mm	97.6000.22
24 mm	97.6000.24
26 mm	97.6000.26
28 mm	97.6000.28
30 mm	97.6000.30
32 mm	97.6000.32
35 mm	97.6000.35
37 mm	97.6000.37
40 mm	97.6000.40


SAUER-Comfort – Rosso

Lunghezza totale ca. 160 mm, zona cuscinetto 60 mm, mastice più forte.

Confezione da 30 pezzi

Misura \varnothing 18 mm **Nr. d'ord.** 97.6001.18

Tagliando di controllo rosso

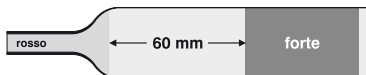

20 mm	97.6001.20
22 mm	97.6001.22
24 mm	97.6001.24
26 mm	97.6001.26
28 mm	97.6001.28
30 mm	97.6001.30
32 mm	97.6001.32
35 mm	97.6001.35
37 mm	97.6001.37
40 mm	97.6001.40



97.7501.xx



97.6000.xx



97.6001.xx

97.6000.30

Misura dei condom
Diametro in mm

Mastice

00 = forza collante normale
01 = forza collante più forte

Larghezza della zona cuscinetto

75 = normale (75 mm)
60 = accorciato (60 mm)

Condom autocollanti SAUER-Comfort

Le caratteristiche che differenziano i vari modelli (zona cuscinetto e forza collante) si possono riconoscere anche dal nr. d'ordine.