

Mobilità ausili per la **deambulazione**

Deambulatore/stabilizzatore Trekker



Trekker è un deambulatore/stabilizzatore per pazienti con difficoltà motorie e scarso controllo del tronco e del bacino. È un comodo ausilio per la rieducazione al cammino.

I benefici di utilizzo del deambulatore Trekker sono molteplici:

- incoraggia lo sviluppo delle **capacità cognitive**
- rafforza le **capacità cardio-polmonari**
- **riduce l'ipertono muscolare**
- aumenta la **consapevolezza degli spazi** e il **controllo del capo** per raggiungere una deambulazione indipendente
- insegna a **camminare**.

Trekker è disponibile in **tre diverse misure S, M, L**.

Gli accessori sono a richiesta in base alle necessità dell'utente.

La parte superiore del telaio è **regolabile in altezza** (intervalli di 25 mm).

Può essere usato sia **anteriormente** che **posteriormente**.

Le **ruote** sono tutte **piroettanti**, con **sistemi di bloccaggio, frizionamento della ruota, blocco direzionale** (avanti e indietro o solo avanti) e blocco della rotazione (la ruota va solo dritta).

Tutti gli accessori si installano **senza alcun utilizzo di attrezzi**.

Per consentire un facile e poco ingombrante posizionamento del Trekker M e L la parte superiore è pieghevole.

Trekker S



Trekker M



Trekker L



Taglia	Colore						
S		84 cm	56 cm	31 cm	46 - 67 cm	3,8 kg	30 kg
M		81 cm	66 cm	43 cm	64 - 86 cm	4,3 kg	50 kg
L		96 cm	71 cm	45 cm	86 - 122 cm	5,4 kg	70 kg

Mobilità ausili per la **deambulazione**

Supporti antibrachiali



Sono regolabili in altezza, profondità e inclinazione. È possibile regolare l'inclinazione delle maniglie e posizionarle avanti o indietro. Si possono installare in qualsiasi posizione della barra superiore, verso l'interno o l'esterno a seconda del bisogno. L'appoggio per l'avambraccio è imbottito e fornito di cintura a strappo per una maggiore stabilità degli arti. Misura S: da 20 cm a 31 cm (montato su Trekker S). Misura L: da 26 cm a 40 cm (montato su Trekker M, L) (riferito alla misura da gomito a maniglia).

Supporto toracico



Il supporto toracico è ideato per rendere stabile il tronco. È regolabile in altezza, profondità, larghezza e angolazione. Tutti i lati sono imbottiti per garantire massimo confort. Si apre velocemente per agevolare i trasferimenti. Viene fornito montato internamente ma può essere montato anche esternamente rispetto alla barra superiore. Le cinghie possono essere regolate facilmente durante l'uso. Nella posizione inferiore funge da supporto pelvico.

Riconducibile per omogeneità funzionale (a discrezione del medico specialista) ai codici: 03.78.09.003 stabilizzatore deambulatore in posizione eretta - 03.48.21.201 dispositivo di freno (al paio) - 03.48.21.204 sostegno per arto superiore (al paio) - 03.48.21.118 sostegno per il tronco - 03.48.21.121 quattro ruote piroettanti.

Codice articolo	Descrizione
DTK 1 S COMPLETO	Deambulatore Trekker S con supporto toracico e supporti antibrachiali S
DTK 2 M COMPLETO	Deambulatore Trekker M con supporto toracico e supporti antibrachiali L
DTK 3 L COMPLETO	Deambulatore Trekker L con supporto toracico e supporti antibrachiali L

Accessori deambulatore Trekker

Imbracatura pelvica



Codice articolo	Descrizione
DTK POSIANCA S	Posizionatore per anca per Trekker S
DTK POSIANCA L	Posizionatore per anca per Trekker M e L

Supporti caviglie



Codice articolo	Descrizione
DTK SUPPCAVI S	Coppia di supporti caviglie per Trekker S
DTK SUPPCAVI M	Coppia di supporti caviglie per Trekker M
DTK SUPPCAVI L	Coppia di supporti caviglie per Trekker L

Supporti gambe



Codice articolo	Descrizione
DTK SUPPGAMBE S	Coppia di supporti gambe misura S
DTK SUPPGAMBE L	Coppia di supporti gambe misura L

L'imbracatura pelvica permette all'utente, tramite l'oscillazione, di spostare in sicurezza il peso da una gamba all'altra facilitando lo schema del passo. A seconda della regolazione su di essa effettuata si può ottenere un sostegno maggiore o una semplice imbracatura di sicurezza. La posizione delle cinghie sulla barra influirà sulla posizione pelvica. Il cuscino (rimovibile) permette un maggior confort.

Riconducibile per omogeneità funzionale (a discrezione del medico specialista) al codice: 03.48.21.207 divaricatore.

Utili per utenti con scarso controllo motorio, atassia, eccessiva adduzione e spasticità, aiutano a mantenere le gambe e i piedi nella posizione corretta. La lunghezza è regolabile, i cinturini sono imbottiti per maggior confort. Grazie a un meccanismo scorrevole i sostegni seguono i passi dell'utente in modo fluido.

I supporti per gambe oscillano seguendo il movimento dell'utente e il bilanciamento del peso tra una gamba e l'altra. Impediscono l'adduzione eccessiva e favoriscono il carico. Sono regolabili in altezza. Disponibile in due misure: la taglia S è utilizzabile su gambe di circonferenza massima di 38 cm, la taglia L per gambe di circonferenza massima 50 cm.