

JAY BALANCE

Ideale per la protezione della cute, la stabilità ed il comfort



Il perfetto equilibrio tra protezione della cute e stabilità

Trova il tuo equilibrio

Grazie ai molti anni di esperienza Jay, il cuscino Jay Balance è stato realizzato per fornire una elevata protezione della cute insieme ad una grande stabilità e ad un ottimo livello di comfort.

Nuove caratteristiche offrono un alto livello di protezione della pelle e di comfort: uno strato spesso e sagomato di schiuma morbida previene che le tuberosità ischiatiche ed i trocanteri vengano a contatto con lo strato di schiuma più duro, la nuova forma dell'avvallamento pelvico (PLA) con un bordo senza aperture previene la migrazione del fluido, il nuovo design dell'imbottitura di fluido e la doppia fodera, interna ed esterna.


La grande stabilità e l'ottima posizione di seduta sono ottenute grazie al design dell'avvallamento pelvico (PLA) basato su misure antropometriche ed agli elementi di posizionamento che possono essere messi nelle fodera interna per rispondere a specifiche necessità degli utenti.





Base di schiuma sagomata e multi-strato

Il cuscino Balance è realizzato con una base di schiuma sagomata a celle chiuse. Il punto di transizione femorale ed il bordo posteriore aiutano a prevenire la migrazione del fluido, al tempo stesso dando un morbido supporto ai trocanteri ed alla parte posteriore del bacino.

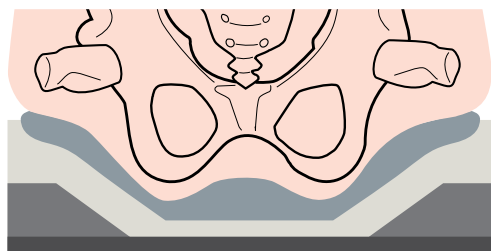

La larghezza dell'avvallamento pelvico (PLA) si basa sulle dimensioni antropometriche della media degli utenti che utilizzano ogni larghezza di cuscino. Questo permette di accogliere la grande maggioranza degli utenti con una adeguata stabilità anteriore e laterale offrendo così un buon posizionamento, una immersione ottimale nel fluido ed una distribuzione del peso che proteggeranno l'utente da danni alla pelle.



Gli inserti – Inserto in fluido JAY Flow o ad aria ROHO Dry Floatation

L'inserto è il cuore del cuscino in quanto avvolge le prominenze ossee del bacino, massimizzando la distribuzione della pressione e mantenendo l'integrità della pelle.

Il Balance può essere scelto con l'inserto in fluido JAY Flow o con l'inserto ad aria ROHO che si conformano alla forma di ogni utente, si adattano alle posizioni di seduta e garantiscono un adeguato posizionamento del fluido o dell'aria sotto le prominenze ossee per favorire la protezione della pelle.



Il design dell'inserto di fluido, che non richiede alcuna manutenzione, favorisce una lunga durata del cuscino.



La quantità d'aria delle celle dell'inserto ROHO può essere regolata durante la valutazione per accogliere posture asimmetriche ed esigenze variate dell'utente.



I componenti di posizionamento

Grazie ai componenti di posizionamento, il bacino e le cosce possono essere ben posizionati per molte applicazioni cliniche. Il Balance favorisce l'allineamento ortopedico, aumenta la tolleranza di seduta ed accoglie le esigenze variate dell'utente.



Innovativo sistema a “doppia fodera”

- Per grande praticità e maggiore protezione il cuscino Balance ha la caratteristica di avere una doppia fodera. L'innovativa tecnologia applicata alle due fodere, interna ed esterna, risolve l'esigenza di avere un buon microclima ed una efficace gestione dell'incontinenza.
- La fodera interna è impermeabile e facile da pulire ed asciugare, mentre la cerniera Aqua-guard ed il filo antri strappo assicurano che la base in schiuma resti asciutta.
- La fodera microclimatica esterna dissipa il calore e l'umidità per una ulteriore protezione della pelle. Sono disponibili come optional anche una fodera esterna stretch ed una per incontinenza. Tutte le fodere sono lavabili in lavatrice a 60° e si asciugano molto velocemente.
- L'elasticità di tutte le nuove fodere esterne permette l'inserimento degli elementi di posizionamento senza creare tensione superficiale riducendo nel contempo il rischio di danni alla pelle. Sono disponibili 3 tipi di fodere: microclimatica, per incontinenza e stretch.





JAY BALANCE

Larghezza	34 cm - 60 cm
Profondità	34 cm - 60 cm
Altezza	8,5 cm
Portata massima	150 kg (larghezza 34 cm - 50 cm); 225 kg (larghezza 56 cm - 60 cm)
Peso	2,4 kg [40 x 46 con inserto in fluido]; 1,9 kg [40 x 46 con inserto ad aria]
Inserti	in fluido, ad aria a valvola singola, ad aria a valvola doppia
Fodera esterna	Incontinenza, Microclimatica e Stretch
Kit di posizionamento	Optional



pb_JAY_BALANCE_it_IT_REV1

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
E-Mail: info@sunrisemedical.it
www.sunrisemedical.it