




Mantis **Q40**




Guida rapida

Introduzione


Vista frontale

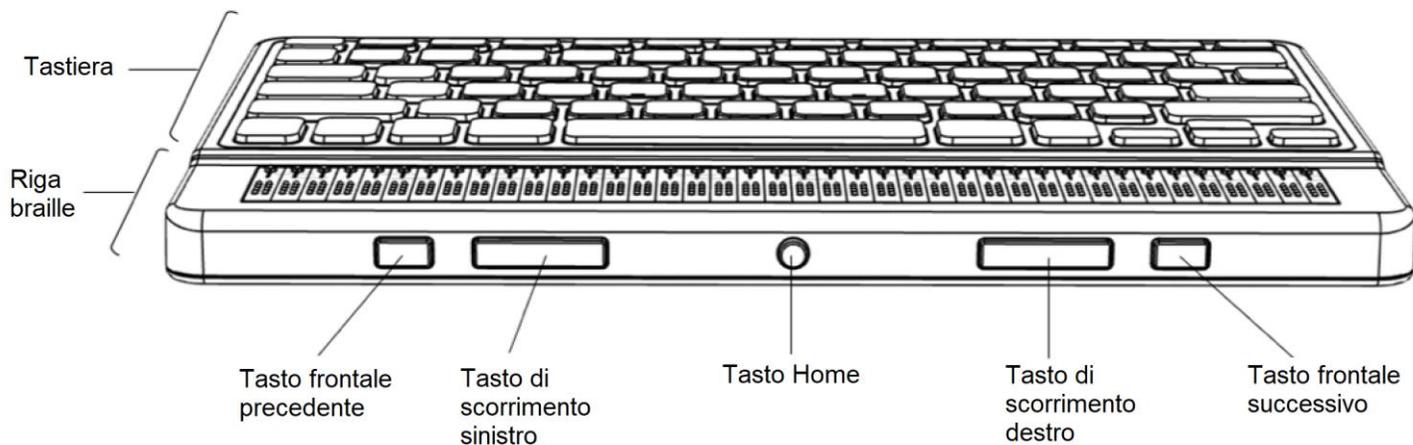

Lato sinistro

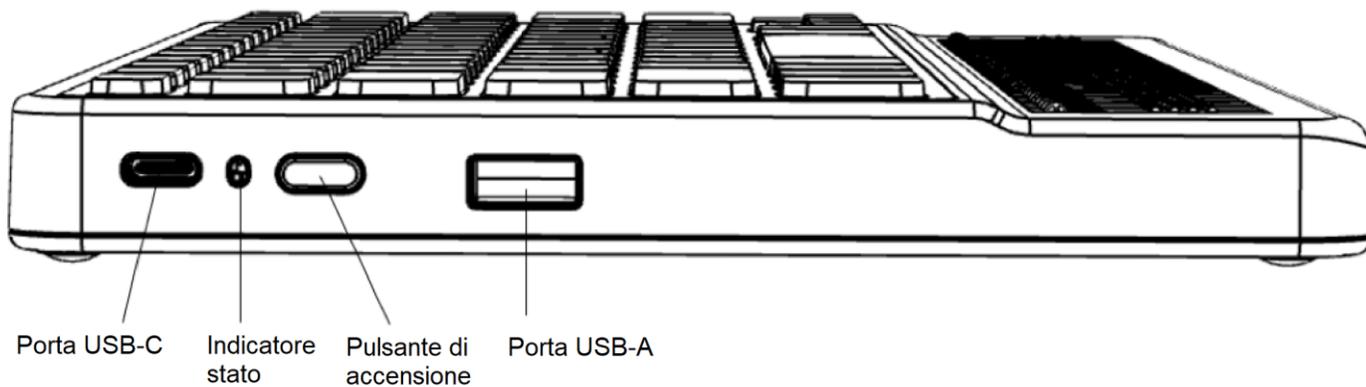

Vista posteriore

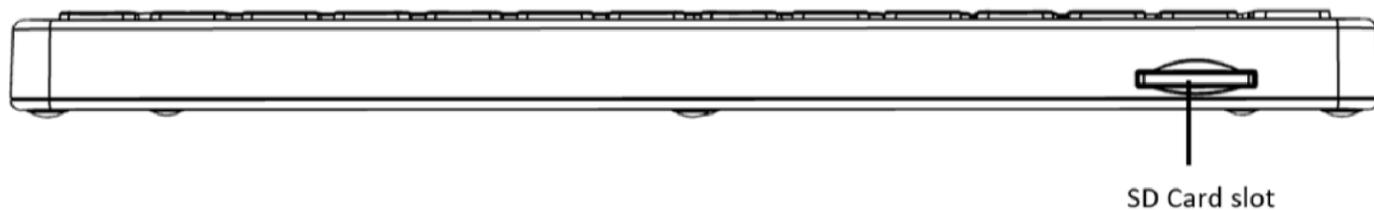

Iniziamo

Grazie per aver acquistato Mantis Q40. Questa guida rapida dà indicazioni su come caricare il dispositivo, sull'orientamento, sull'accensione e sullo spegnimento, su come spostarsi nei menu, sullo scorrimento del testo, su come usare il menu contestuale e su come accedere alla guida utente. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida utente digitale integrata nel dispositivo.

Contenuto della confezione

- Display braille Mantis Q40
- Cavo da USB-C a USB-A
- Alimentatore
- Cover in TPU
- Guida rapida

Orientamento

Con il dispositivo davanti, l'orientamento corretto per l'uso è con le celle braille più vicine a voi.

Superficie superiore

La superficie superiore include la riga braille e la tastiera QWERTY. A partire dalle celle braille (più vicine a voi) troverete dei piccoli tasti circolari, chiamati cursor routing, appena sopra le celle. I cursor routing vengono usati per spostare il cursore braille in lettura ed in scrittura e per attivare gli elementi in un menu.

Se continuate a spostarvi verso la parte posteriore dell'unità, troverete la tastiera QWERTY. Il layout dei tasti è simile a quello della maggior parte dei computer portatili.

Lato frontale

Sul lato frontale della Mantis ci sono cinque pulsanti. I due pulsanti rettangolari più esterni sono i tasti frontali Precedente e Successivo. In fase di editazione, funzionano come le frecce su e giù sulla tastiera. Vengono usati anche per spostarsi tra gli elementi in un menu.

Spostandosi verso il centro, ci sono altri due pulsanti rettangolari chiamati tasti di scorrimento. Questi pulsanti consentono di spostarsi ai 40 caratteri precedenti o successivi del testo che state leggendo.

Al centro troverete un piccolo pulsante circolare, chiamato tasto Home. Usate questo tasto per ritornare al menu principale in qualsiasi momento, o per uscire dalla modalità terminale.

Lato sinistro

Sul lato sinistro, dal punto più vicino a voi a quello più lontano, troverete una porta USB-A, usata per collegare una chiavetta USB o altri dispositivi di memorizzazione esterni. Successivamente troverete il pulsante di accensione, che corrisponde ad un piccolo punto facilmente riconoscibile. Subito dopo c'è un LED, per mostrare lo stato del dispositivo. L'ultima porta è la USB-C, usata per collegare la Mantis ad un altro dispositivo o all'alimentatore.

Lato posteriore

Sul lato posteriore, a sinistra, c'è uno slot per schede SD. Usate la scheda SD per memorizzare dei documenti e per aggiornare il software ed il firmware sul dispositivo.

Ricarica del dispositivo

NOTA: assicuratevi che la Mantis sia completamente carica prima di usarla la prima volta.

Collegate un'estremità del cavo USB-C del cavo di ricarica alla porta USB-C che si trova sul lato sinistro della Mantis. È sufficiente una leggera spinta; se provate a forzare la connessione rischiate di danneggiare il cavo o il dispositivo.

Collegate l'estremità USB-A del cavo di ricarica all'alimentatore, dopodiché collegate quest'ultimo ad una presa di corrente. Usate l'alimentatore in dotazione per una ricarica ottimale.

Accensione e spegnimento

Se il dispositivo è caricato, premete e tenete premuto il pulsante di alimentazione per circa 2 secondi per accendere la Mantis.

Sentirete una lieve vibrazione e sulla riga Braille apparirà il messaggio "starting" insieme ad un'animazione tattile circolare. Dopo qualche secondo, la fase di avvio sarà completata e sulla riga Braille apparirà la scritta "Editor". La Mantis da questo momento sarà pronta per l'uso.

Per spegnere il dispositivo, premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi.

Solo alla prima accensione

Alla prima accensione del dispositivo sarà necessario selezionare la lingua da usare. Il dispositivo mostrerà il menu per la selezione della lingua. L'inglese è la lingua predefinita e sulla barra apparirà "language: english". Se volete continuare con l'inglese, selezionate "Close" (Chiudi).

Selezionando un'altra lingua cambierete la traduzione degli elementi del menu e la tabella braille.

Per selezionare una lingua diversa da inglese:

1. Premete Invio per aprire il menu di selezione della lingua.

2. Selezionate una lingua dall'elenco.
3. Premete Invio per chiudere l'elenco.
4. Premete Chiudi per chiudere il menu di selezione della lingua.

Una volta completata la procedura di selezione della lingua, il dispositivo si riavvierà automaticamente e sulla riga braille apparirà "restarting" (riavvio in corso).

Una volta completato il riavvio, sulla riga apparirà la scritta "editor". La Mantis sarà così pronta all'uso.

Spostarsi nei menu

Per spostarsi di elemento in elemento nei menu, premete i tasti frontali Precedente (all'estremità sinistra) e Successivo (all'estremità destra), sul lato frontale dell'unità. È anche possibile usare le frecce su e giù della tastiera QWERTY. Non appena premete questi tasti, l'elemento del menu cambierà. Ciascun elemento rappresenta un'applicazione o un'opzione che potete attivare.

Per attivare un elemento del menu, premete uno dei Cursor Routing. Potete anche premere il tasto **Invio** sulla tastiera per attivare un elemento del menu.

Scorrimento del testo

A volte, le frasi possono superare i 40 caratteri a disposizione sulla Mantis. Per continuare a leggere fino alla fine della frase o a ritroso, verso l'inizio, usate i tasti frontali Sinistro e Destro immediatamente a sinistra e a destra del tasto Home per spostarvi nel testo.

Uso del menu contestuale

Il menu contestuale è accessibile ovunque siate sul dispositivo. Mostra delle funzioni utili in base a quello che state facendo

sulla Mantis. È simile al menu contestuale su un PC. Se cercate un'azione o un collegamento rapido in particolare, è probabile che lo troviate nel menu contestuale.

Per attivare il menu contestuale, tenete premuto il tasto Ctrl, dopodichè premete M. Il tasto Ctrl si trova in basso a sinistra sulla tastiera QWERTY. Si aprirà un menu con un elenco di azioni che è possibile eseguire in quel momento. Spostatevi nel menu fino a quando avete trovato quello che cercate, dopodichè premete Invio o un Cursor Routing.

Accedere alla guida utente integrata

È possibile aprire la guida utente integrata dal menu principale. Qui troverete la guida utente completa, che comprende tutti i comandi.

In alternativa, potete scaricare la guida Utente da <http://support.humanware.com/en-europe/support/>.

Assistenza clienti

USA

Per l'assistenza clienti negli Stati Uniti, contattate il Servizio clienti di APH al numero 800-223-1839 o per email all'indirizzo CustomerService@aph.org.

Europa ed altre nazioni

Per il servizio clienti al di fuori degli Stati Uniti, contattate il distributore HumanWare più vicino a voi o consultate il nostro sito web all'indirizzo: www.humanware.com.

Europa: (0044) 1933 415800 o inviate un'email a eu.support@humanware.com.

Australia / Asia: (02) 9686 2600 o inviate un'email a au.sales@humanware.com.

Specifiche

Alimentazione richiesta: +5VDC@1.5A

Batteria: Li-Ion 3.7V nominale, 2000 mAh

Intervallo delle temperature ammesse durante l'uso: +5 ~ +45 gradi

Intervallo delle temperature ammesse durante la carica della batteria: +5 ~ +35 gradi

Temperature ammesse per lo stoccaggio: -20 ~ +65 gradi

Percentuale di umidità ammessa durante l'uso: 5% ~ 95% (senza condensa)

Percentuale di umidità ammessa durante lo stoccaggio: 5% ~ 95% (senza condensa)

Avvertenze

Precauzioni sulla batteria:

Attenzione:

- Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto.
- Dismettere le batterie usate in base alle istruzioni riportate più avanti.
- Non disassemblare o modificare la batteria.
- Usare solo l'alimentatore specificato da HumanWare.
- C'è un rischio di surriscaldamento, incendio o esplosione se la batteria è nelle vicinanze di fuochi o fonti di calore, se è soggetta a impatti, se viene messa a contatto con l'acqua o se i suoi terminali vanno in corto circuito.
- Non provate a caricare o ad usare la batteria al di fuori dell'unità.

Istruzioni per la dismissione:

Quando Mantis Q40 è a fine vita, i suoi componenti interni devono essere dismessi in accordo con le autorità locali.

Mantis Q40 non contiene materiali pericolosi. Per la dismissione, seguite le ordinanze governative.

Slot per schede SD

Non inserite altri oggetti oltre alle schede SDHC

Normative FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC. L'uso è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare delle operazioni indesiderate.

Modifiche non autorizzate al sistema possono invalidare la capacità di usare questo dispositivo da parte dell'utente.

Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato soddisfare le limitazioni per i dispositivi digitali di Classe B, che seguono la Parte 15 delle normative FCC. Queste limitazioni sono state pensate per dare una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato come da istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in un'installazione in particolare. Se il prodotto provoca danni alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinata dall'accensione o dallo spegnimento del dispositivo, l'utente

può provare a correggere l'interferenza seguendo una di queste indicazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV per avere aiuto.

Dichiarazioni di Industry Canada

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Copyright © 2020



1839 Frankfort Avenue,
Louisville, KY 40206 502-
895-2405 info@aph.org
www.aph.org