


zippie®
Explore your world!

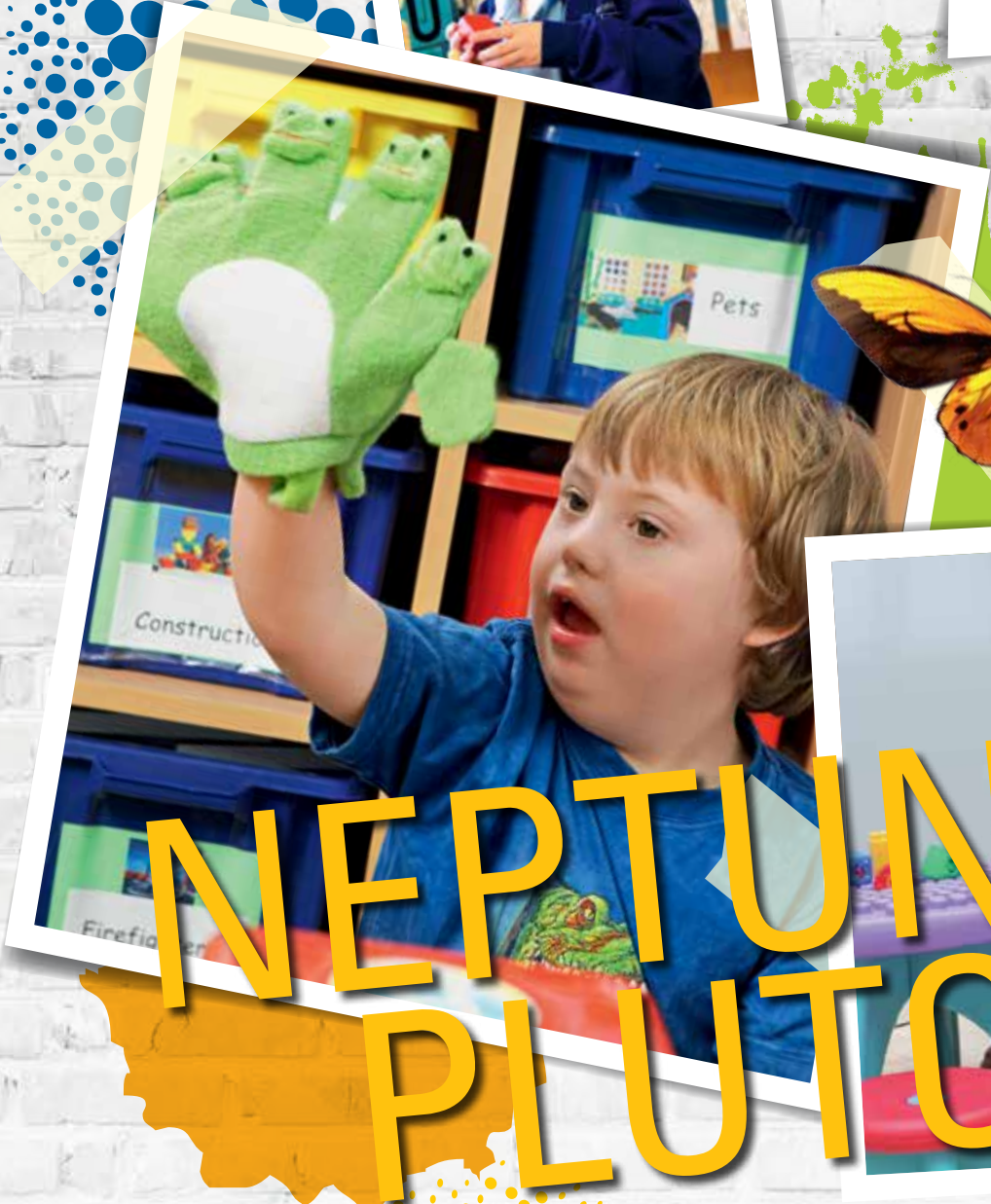

NEPTUNE & PLUTON™


La vita con il sorriso!



NEPTUNE

IL SISTEMA DI SEDUTA
DISEGNATO SECONDO LE
ESIGENZE DI CHI LO UTILIZZA

Ampia gamma di regolazioni per la crescita.
Facile da adattare all'utente.
Robusto e durevole.

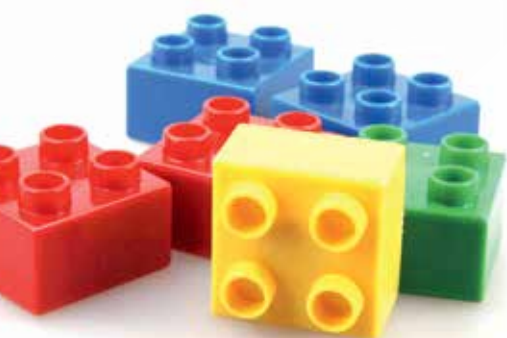

Il design snello e compatto permette di manovrare e trasportare il Neptune con facilità e senza sforzi.



Due misure di seduta coprono un ampio range di età da 18 mesi a 10 anni.

Disegnato secondo le esigenze dell'utente, il Neptune ha una ottima gamma di regolazioni in altezza ed è stato studiato in particolare per l'utilizzo a casa, all'asilo ed a scuola.

Il Neptune ha uno schienale reclinabile meccanicamente che ruota intorno alla articolazione dell'anca, permettendo così ai supporti per il tronco di rimanere nella posizione ottimale. Dispone di un rivestimento asportabile molto facile da lavare o da sostituire.

Il design snello e compatto permette di manovrare e trasportare il Neptune con facilità e senza sforzi.
La struttura modulare permette di adattare il Neptune alle esigenze in evoluzione dell'utente.



Vedere ultima pagina per
informazioni sulle basi
disponibili

NEPTUNE

ACCESSORI

(Vedere ultima pagina per informazioni sulle basi disponibili)



// APPOGGIATESTA REGOLABILE

Regolabile in profondità ed angolazione. Ogni ala dell'appoggiatesta si regola in modo indipendente permettendo così di ottenere la forma necessaria all'utente.



// SUPPORTI LATERALI FLESSIBILI

Gamma di supporti laterali di varia misura disponibili per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti



// CONTENIMENTI LATERALI PER BACINO

Le imbottiture regolabili permettono di ridurre la larghezza di seduta ed aiutano a mantenere la posizione del bacino.



// TAVOLINO

Disponibile in Perspex trasparente o in plastica grigia.



// APPOGGIAPIEDI

La pedana unica robusta e resistente può essere tolta o ribaltata verso l'alto così da favorire i trasferimenti in piedi.



// CUNEO

Disegnato per l'abduzione delle gambe, il cuneo è rimovibile e regolabile in profondità ed altezza.



// CUSCINO

Il cuscino è disponibile nelle versioni sagomata o piana.



// IMBOTTITURA PER LA PEDANA

Una imbottitura estraibile per la pedana è disponibile per gli utenti che hanno la necessità di un supporto morbido per il piede.



// SANDALETTI O SUPPORTI PER LE CAVIGLIE


Disponibili in 4 misure, i sandaletti sagomati si adattano a tutti i tipi di pedana. E' disponibile anche una gamma di supporti per le caviglie.

NEPTUNE


DATI TECNICI

NEPTUNE (MM)	MISURA 1		MISURA 2	
	Min	Max	Min	Max
Dimensioni				
Profondità di seduta	200	325	325	450
Altezza dello schienale	325	450	425	575
Larghezza al bacino	165	325	265	425
Larghezza al tronco	150	270	225	345
Distanza dalla seduta all'appoggiapiedi	130	290	260	420
Peso dell'unità di seduta	10 Kg	10 Kg	13 Kg	13 Kg
Base da interni				
Distanza dalla seduta a terra: Min 240		Max 540		
Angolo di basculamento : 25°		Angolo in posizione prona: 15°		

MISURE (MM)	BASE BASCULANTE REGOLABILE IN ALTEZZA		BASE COMPATTA	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A - Distanza dall'interfaccia a terra (con ruote da 75 mm)	230	695	210	490
Distanza dall'interfaccia a terra (con ruote da 100 mm)	260	725	240	520
Ruote standard	100 mm		75 mm	
B - Angolo di basculamento	25° posteriore 15° anteriore		25° posteriore 15° anteriore	
C - Dimensione della base	740 x 570 mm		630 x 600 mm	
Portata massima (seduta ed utente)	100 kg		70 kg	

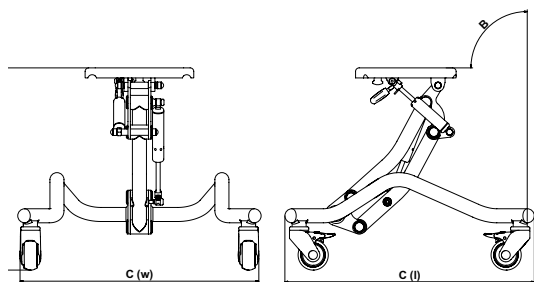

→ BASE COMPATTA

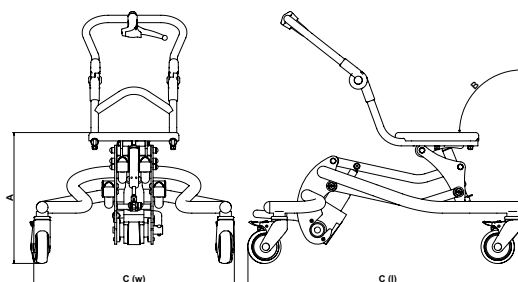

→ BASE BASCULANTE REGOLABILE IN ALTEZZA



PLUTON™


UN SOLO PRODOTTO CHE
SI ADATTA ALLE ESIGENZE
CHE EVOLVONO NEL
TEMPO

“I nostri utenti sono
diversi uno dall’altro
e vogliamo che i
nostri prodotti
rispecchino questa
individualità”



da 6 mesi
all'età
adulta



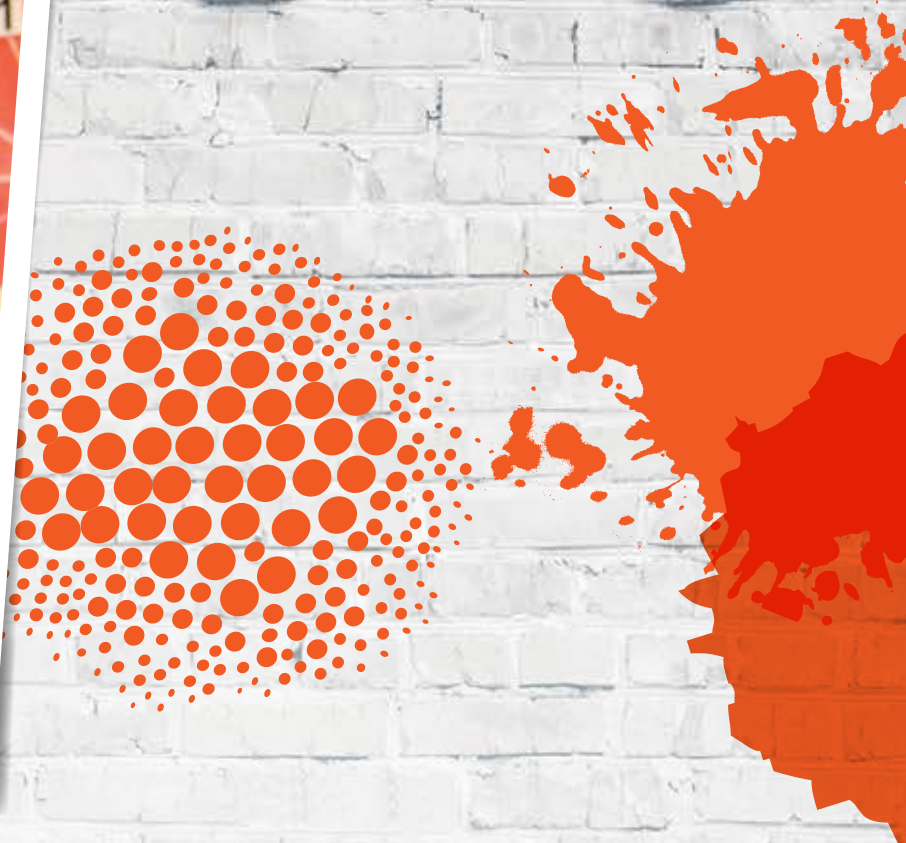

Pluton offre la possibilità di interagire con gli altri e con l'ambiente circostante a pazienti che hanno problemi posturali complessi.

La sua combinazione unica di design, forma e funzionalità nasce da anni di esperienza, da un continuo sviluppo e dalla dedizione ad aiutare bambini, giovani, adulti e chi presta loro assistenza, a raggiungere i livelli sempre maggiori di autonomia. Pluton fa davvero la differenza per la vita degli utenti, permettendo loro di sperimentare una gamma sempre più ampia di attività.

Pluton è dunque un sistema di seduta socialmente inclusivo che rispecchia le esigenze funzionali e cliniche dell'utente ed è stato ideato e sviluppato pensando ad un ampio spettro di utilizzatori e ai diversi tipi di ambiente nei quali si possono trovare ad interagire.




PLUTON™

DESIGN MODULARE



Pluton è un sistema di seduta modulare straordinariamente versatile. Grazie alle sue nuove caratteristiche, tra le quali la possibilità di smontare lo schienale e la pedana, Pluton è molto facile da configurare e permette di realizzare un sistema di seduta in grado di rispondere alle esigenze più specifiche dell'utente. Disponibile con o senza le opzioni dinamiche di seduta, Pluton può accogliere utenti con esigenze semplici come anche utilizzatori dalle necessità molto complesse.

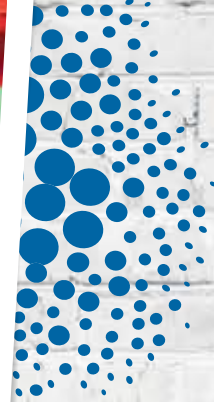

Caratteristiche standard

- schienale estraibile
- imbottitura sacrale
- profondità regolabile della seduta
- altezza dello schienale regolabile
- regolazione in larghezza
- schienale regolabile in angolazione
- pedana regolabile in angolazione
- forma del cuscino a scelta: sagomata, planare



// SCHIENALE ESTRAIBILE

Possibilità di estrarre velocemente la parte superiore dello schienale; questo aiuta l'utente nei trasferimenti e nel trasporto.



// PEDANA INTERCAMBIABILE ED ESTRAIBILE

E' possibile staccare velocemente e senza difficoltà l'appoggipiedi per favorire il trasferimento in piedi ed il trasporto. (Possibilità di scelta tra pedana unica e pedane separate)



Vedere ultima pagina per
informazioni sulle basi
disponibili

PLUTON™

Il design modulare e versatile permette di realizzare il Pluton secondo ogni esigenza specifica.



PLUTON e TX

una soluzione integrata per la gestione della postura e della mobilità.

ACCESSORI



// APPOGGIATESTA REGOLABILE
MULTIPOSIZIONE



// PROTRATTORI PER LE SPALLE



// PELOTTE TORACALI



// BRACCIOLI REGOLABILI



// IMBOTTITURE PER
ABDUZIONE



// IMBOTTITURE PER
ABDUZIONE



// CONTENIMENTI PER BACINO



// CUSCINO IMBOTTITO IN DUE
SEZIONI



// APPOGGIAPIEDI DINAMICO



// APPOGGIAPIEDI RIBALTABILI
SEPARATI



// TAVOLINO (GRIGIO O
TRASPARENTE)



// CUNEO DIVARICATORE

PLUTON DYNAMIX®

BREVETTO INTERNAZIONALE





Dinamica di livello superiore

Lo schienale dinamico brevettato del Pluton è facile da regolare per controllare il livello di resistenza percepito dall'utente quando si allunga nel sistema di seduta. Questo non è gestito da una molla, come di solito avviene nei sistemi dinamici, ma è controllato dalla pressione ad aria ed il ritorno è anche regolabile così da permettere allo schienale di muoversi in armonia con l'utente, evitando di spingere l'utente all'indietro, quando si rilassa.

Queste caratteristiche uniche del Pluton garantiscono al sistema di seduta un movimento controllato e morbido con la flessibilità di poter regolare il sistema nel momento in cui l'utente cresce o modifica le proprie esigenze. Il sistema dinamico lavora in modo indipendente rispetto al sistema di reclinazione dello schienale. Il sistema dinamico può essere bloccato nelle fasi di alimentazione, trasferimento e trasporto.

Posizione del bacino controllata

Insieme ai supporti per le cosce, l'ampia possibilità di regolazione dell'imbottitura sacrale permette un posizionamento preciso del sistema sul bacino. Oltre a permettere la regolazione per un migliore posizionamento anteriore e posteriore, l'imbottitura sacrale può essere regolata per accogliere una rotazione. Questa caratteristica può essere utilizzata per sostenere una posizione fissa o per aiutare il bacino in una situazione di de-rotazione. L'imbottitura sacrale lavora in modo indipendente rispetto alle funzioni dinamiche e di reclinazione dello schienale.



Appoggiapiedi dinamico

Quattro molle indipendenti permettono all'appoggiapiedi di muoversi. Questa caratteristica permette di assorbire le forze attraverso i piedi, proteggendo le articolazioni vulnerabili e riducendo le eventuali rotture degli appoggiapiedi.



il supporto sacrale è indipendente dalle funzioni di reclinazione e schienale dinamico. Questo aiuta a mantenere una buona posizione del bacino quando lo schienale si muove.




PLUTON™

DATI TECNICI




MISURE (MM)	PLUTON 0		PLUTON 1		PLUTON 1 LUNGO		PLUTON 2		PLUTON 2 LUNGO		PLUTON 3	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
A Profondità di seduta	150	275	200	350	300	450	300	450	400	550	400	550
Profondità di seduta – dalla parte posteriore della natica al cavo popliteo												
B Larghezza di seduta	115	190(240)	150 (0 scr)	250 (315)	150	250 (315)	230	330 (395)	230	330 (395)	310	410 (475)
(Le misure tra parentesi rappresentano la larghezza massima una volta tolte le imbottiture per il bacino)												
C Ampiezza del tronco	100	200	150	270	150	270	230	350	230	350	310	430
Misure prese sotto le ascelle												
D Distanza dal sedile alle spalle	280	385	300	440	390	560	390	560	480	680	480	680
E Distanza dal sedile all'appoggiapiedi	100	210	280	370	350	440	350	440	420	510	420	510
Distanza dal sedile all'appoggiapiedi			190	280	260	350	260	350	330	420	330	420
Ruote anteriori da 100 mm : Min - 355 / Max - 815												
F Angolo tra il sedile e lo schienale	25° indietro / 5° avanti											
Peso della seduta	13,5 Kg		14,5 Kg				17,0 Kg				19,5 Kg	
Indicazioni generali, i pesi indicati comprendono braccioli, imbottiture per il bacino, angolo pedana ed appoggiapiedi												
Portata massima	100 Kg											
Età	3 mesi – 3 anni		4 – 9 anni				8 – 13 anni				12 anni - adulto	
Misure con base basculante regolabile in altezza												
Distanza dal sedile a terra	Ruote da 75 mm: Min – 325 / Max - 785					Ruote da 100 mm: Min - 355 / Max - 815						
Le ruote da 100 mm sono standard												
Angolo di basculamento / in posizione prona	25° posteriore / 15° anteriore											
Dimensione della base	740 x 570 mm											


Pluton è un sistema di seduta modulare nel quale è possibile scegliere le larghezze e le altezze della seduta, dello schienale e la lunghezza delle gambe. Il sistema di seduta verrà allora costruito per garantire la migliore aderenza alle misure indicate e la massima possibilità di crescita rispetto alle misure di partenza.

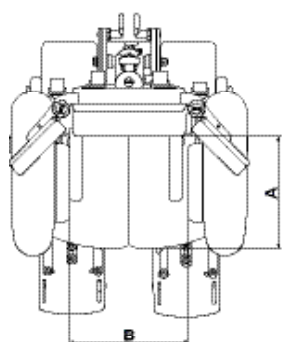

→ vista dall'alto

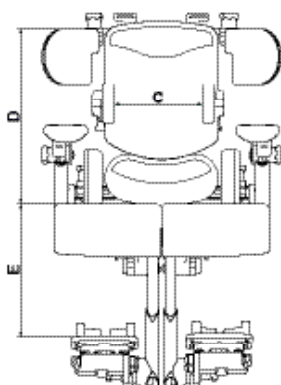

→ vista frontale

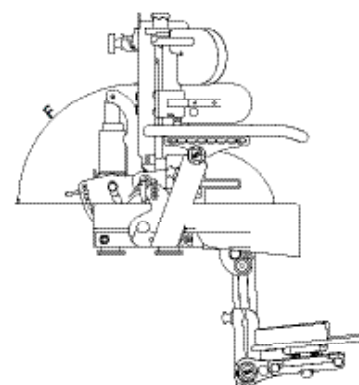

→ vista laterale

BASI DISPONIBILI PER PLUTON™ E NEPTUNE

I nostri ingegneri sono in grado di applicare il sistema di seduta Pluton o Neptune prescelto su molteplici tipi di base.

Una volta individuato il tipo di seduta adatto, il passo successivo è la scelta della base. Sono disponibili vari tipi di base, in modo che i sistemi di seduta Pluton e Neptune possano essere utilizzati in molti ambienti diversi. Il sistema di seduta si applica alla base grazie ad una particolare interfaccia a 3 punti di fermo che garantisce massima stabilità ed una grande facilità di veloce trasferimento.

Basi disponibili



// BASE 5 STAR

Una soluzione semplice per un utilizzo in casa con un basculamento di 30°



// BASE 5 COMPACT

Ideale per la scuola e l'asilo. I pistoni a gas permettono la regolazione in altezza ed il basculamento.



Con un semplice gesto la particolare interfaccia a 3 punti di fermo blocca il sistema di seduta sulla base.



// BASE MULTI HEIGHT & TILT: REGOLABILE IN ALTEZZA CON BASCULAMENTO

Ampia gamma di regolazioni in altezza, idrauliche o elettriche. Basculamento anteriore e posteriore.



// MULTI HEIGHT & TILT TRANSIT: REGOLABILE IN ALTEZZA CON BASCULAMENTO E RUOTE PIÙ GRANDI PER IL TRASPORTO

Ruote più grandi per il trasporto, così da favorire un utilizzo sia all'interno, sia all'esterno.



// TX

Regolabile ed adattabile per accogliere la crescita ed i cambiamenti posturali.



Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.it