

55
YEARS


Thomashilfen

PIONEER
SINCE 1969



**Seggiolino
e accessori**

Testati in conformità
con il nuovo
standard di sicurezza
ECE R129 -
inclusa la protezione
dagli impatti laterali

 76 - 135 cm

AVOVA Sperling Reha

Per ogni fase della crescita del bambino


Thomashilfen

AVOVA Sperling Reha



AVOVA Sperling Reha lo rende possibile: cintura di sicurezza e cintura di posizionamento* in uno, utilizzabile da 76 a 135 cm senza conversione. Per una sicurezza ed un confort costanti. **Facile da usare dalle prime uscite all'età scolare - sempre il giusto supporto e protezione per il bambino**

*A partire da un'altezza di 100 cm è obbligatorio utilizzare anche la cintura di sicurezza a 3 punti.



Da oltre 35 anni Thomashilfen offre seggiolini auto per bambini con esigenze speciali. Anche oggi utilizziamo il nostro know-how per sviluppare seggiolini auto per bambini e adulti. In essi confluisce tutta la nostra pluriennale esperienza attorno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari.

Gunnar Thomas
Gunnar Thomas, owner



Thomashilfen has the world's largest range of rehab car seats and offers the right support for all ages and disabilities.

Speciali caratteristiche di AVOVA Sperling Reha:

- **Facile da usare:** il bloccaggio del limitatore di altezza del poggiatesta indica quando è il momento di passare dalla cintura di sicurezza alla cintura di posizionamento, eliminando errori di utilizzo
- **Regolazione precisa dei cuscinetti:** per supportare una miglior postura della parte superiore del corpo del bambino
- **Flessibilità tramite accessori:** un'ampia gamma di opzioni di regolazione come la base girevole e inclinabile, che consentono un allineamento ottimale e comode posizioni di riposo reclinate



76 cm - 100 cm
Altezza del bambino


Cintura a 5 punti ISOFIX
& Top Tether



76 cm - 135 cm
Altezza del bambino

Cintura a 3 punti & ISOFIX
optional:
Cintura a 5 punti per il
posizionamento

L'EQUIPAGGIAMENTO BASE INCLUDE

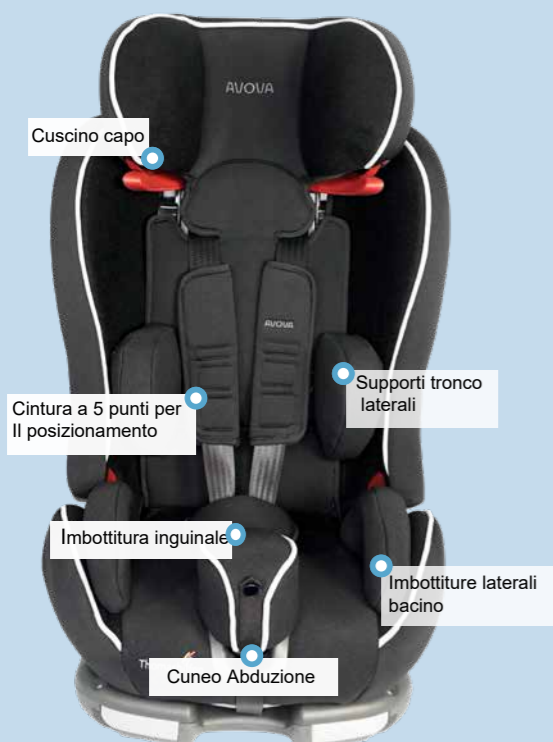

EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE PER LA RIABILITAZIONE



La BASE GIREVOLE e la BASE INCLINABILE possono essere completate con un'ampia gamma di accessori a seconda delle esigenze.

Per una facile maneggevolezza, la leva di sblocco si trova sul lato della base girevole.



GUIDA BLOCCABILE PER LE SPALLE

Mantiene la cintura in posizione, adattandosi alle dimensioni del bambino.

SUPPORTI LATERALI

I rinforzi laterali profondi e morbidamente imbottiti non solo garantiscono comfort, ma sono anche essenziali per la protezione dagli impatti laterali, assorbendo il carico e proteggendo il bambino.

Semplicemente riposizionando le spalline, la cintura a 5 punti può essere convertita da cintura di sicurezza in cintura di posizionamento. La regolazione in altezza del poggiatesta segnala il momento ottimale per il cambio.



SISTEMA DI CINTURA A 5 PUNTI REGOLABILE CON UNA MANO

Il regolatore centrale consente una regolazione rapida e semplice in base alle esigenze del bambino in crescita.

POGGIATESTA AVVOLGENTE

Un poggiatesta ergonomico regolabile in altezza in 9 posizioni offre una protezione ottimale per la zona sensibile della testa e del collo del bambino.



ISIP protezione dagli impatti laterali

La tecnologia di sicurezza intelligente integrata nel sedile riduce efficacemente le forze di impatto laterale.



PERSONALIZZAZIONE PRECISA

Per supportare una postura migliore della parte superiore del corpo, i supporti laterali del tronco (1) e i rivestimenti laterali del sedile (2) possono essere adattati al bambino.



INCLINAZIONE DEL SEDILE IN 3 POSIZIONI

Posizione di riposo e di sonno rilassata. Allevia il bambino quando stare seduto dritto è troppo faticoso.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA A 2 VIE (fino a 100 cm di altezza del corpo, fissaggio aggiuntivo con cinghia superiore)

- Installazione rapida e semplice
- Facile da usare e bloccabile
- Maggiore stabilità e sicurezza



AVOVA Sperling Reha

► Funzioni (opzioni)



SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO sono un importante sostegno per la parte superiore del corpo, **I CUSCINI LATERALI DEL SEDILE** sostengono i fianchi.



La **CINTURA DI POSIZIONAMENTO** mantiene la parte superiore del corpo nella posizione corretta. L'imbottitura inguinale copre la fibbia della cintura per evitare aperture indesiderate.



L'**IMBOTTITURA DEL POGGIATESTA** può essere incrementata anche tramite le tasche interne.



BLOCCO DI ABDUZIONE REMOVIBILE per una buona posizione seduta, impedisce alle gambe di sovrapporsi.



► ACCESSORI


COMBINAZIONE DI BASE HIGH-TECH DA ALTEZZA UTENTE DI 100 CM



PIASTRA ADATTATORE è **SEMPRE** richiesta per i seguenti accessori



ADATTATORE POGGIAPIEDI CON O SENZA ISOFIX

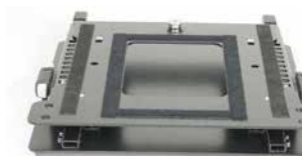

► ACCESSORI – individuali, confortevoli & crescono con te



PIASTRA ADATTATORE è **SEMPRE** richiesta per i seguenti accessori



ADATTATORE PER POGGIAPIEDI senza ISOFIX

► ACCESSORI

PER UTENTI ALTI FINO A 100 CM

NOTA: AVOVA Sperling Reha non può essere utilizzato con base basculante+girevole fino a un'altezza corporea di 100 CM



PIANO ROTANTE facilita il trasferimento, sblocco facile da raggiungere, può essere ordinato con rotazione a destra o a sinistra.



BASE RECLINAZIONE consente la reclinazione della seduta in 4 steps (2.5°/5°/7.5°/10°) per una posizione di riposo reclinata e rilassata.



PIANO ROTANTE E BASE RECLINAZIONE combinati tra loro per la migliore maneggevolezza e confort possibili.



SUPPORTO ANTERIORE garantisce uno stabile posizionamento della seduta nel veicolo



POGGIAPIEDI assicura uno stabile posizionamento della seduta



POGGIAPIEDI assicura uno stabile posizionamento della seduta.



SUPPORTO ANTERIORE, ADATTATORE ISOFIX o BARRA STABILIZZATRICE garantiscono uno stabile posizionamento della seduta nel veicolo.

AVOVA Sperling Reha con nuovi accessori tecnologici.
La combinazione di piano rotante e base per reclinazione consente di abbinare un'ampia gamma di accessori.

Accessories




GIUBBINO ANTIFUGA

impedisce al bambino di "uscire" dalla cintura a 5 punti



CUSCINO PER SEBILE

protegge il sedile dell'auto e fornisce maggiore stabilità sui sedili non sagomati del veicolo

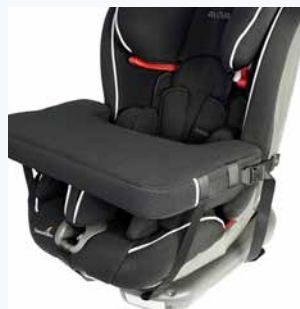

TAVOLINO

favorisce la postura eretta e stabile del bambino, offre un supporto e una sicurezza a tutto tondo



IMBOTTITURA INGUINALE

(grande) protegge la pancia sensibile del bambino, il **CUNEO INFERIORE** (sotto al seggiolino) consente un'inclinazione del sedile di +10°

Dimensioni e pesi

AVOVA Spering Reha

Prof. seduta (a cinghia inguine)	16 cm (21 cm)
Prof. seduta (a bordo anteriore):	35 cm
Larghezza seduta	26 cm - 37 cm
Altezza schienale (mis. interna)	76 cm
Altezza spalle (guida cintura)	30 - 51 cm
Reclinazione seduta (modello base)	10°
Reclinazione seduta (con piastra recl.):	2.5° / 5° / 7.5° / 10°
Dimensioni totali (L x H x P):	43 x 63 x 47 cm
Peso della seduta	13 kg
Altezza utente	76 - 135 cm
Peso max utente	36 kg

*La cintura a 3 punti deve essere utilizzata a partire da un'altezza utente di 100 cm

Dotazione di base:

Seduta e schienale con poggiatesta integrato regolabile in altezza in 9 posizioni, cuscino per la testa con tasca per imbottitura aggiuntiva, connettori Isofix integrati, regolazione dello schienale integrata, protezione dagli impatti laterali grazie agli elementi di assorbimento dell'energia integrati, imbottiture laterali del tronco e della seduta removibili, cintura di sicurezza a 5 punti, imbottiture per bretellaggio, imbottitura inguinale, cuneo di abduzione removibile, fodere removibili.

Una panoramica completa degli accessori è disponibile nel modulo d'ordine



Guarda il video:

Come installare AVOVA Spering Reha con Isofix sul veicolo

I seggiolini auto Reha di Thomashilfen: la giusta soluzione per ogni viaggio!



Reboarder Axxkid ONE 2 Reha

61 - 125 cm
24.0" - 49.2"



AVOVA Spering Reha

76 - 135 cm
29.9" - 53.1"



Axxkid NEXTKID Reha

100 - 150 cm
39.4" - 59.1"



Hercules Small

100 - 150 cm
39.4" - 59.1"



Hercules Prime

130 - 180 cm
51.2" - 70.9"

Scopri l'intera gamma di seggiolini auto su www.thomashilfen.com

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0)4761 886-63 or -68 · Fax: +49 (0)4761 886-19 · www.thomashilfen.com