

POOL LIFT

Elevatore per piscina



...with people in mind



La sedia può essere usata nello spogliatoio, nella doccia e per andare alla toeletta.



L'uso di più sedie rende il trasporto ed il trasferimento di più pazienti nella piscina, rapido ed efficiente.




Sedia con telaio fisso

La sedia-nuoto per Sollevatore per Piscina ha la parte inferiore del telaio permanentemente attaccata, per cui è possibile per il paziente rimanere seduto per gli esercizi.

Abbassare la sedia-nuoto nell'acqua e staccarla dal sollevatore. Esso rimane ora disponibile per altri pazienti.


Sistema di trasferimento e sollevamento per pazienti sdraiati.

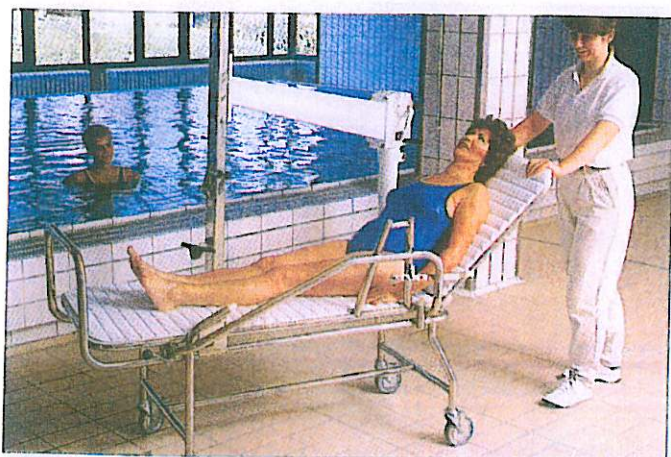

La barella è larga e confortevole, ed il trasportatore ha ruote orientabili che ne agevolano l'uso.



Attaccate la barella al sollevatore. Staccate il trasportatore. Abbassate il paziente nell'acqua. Questa è una operazione facile e sicura.

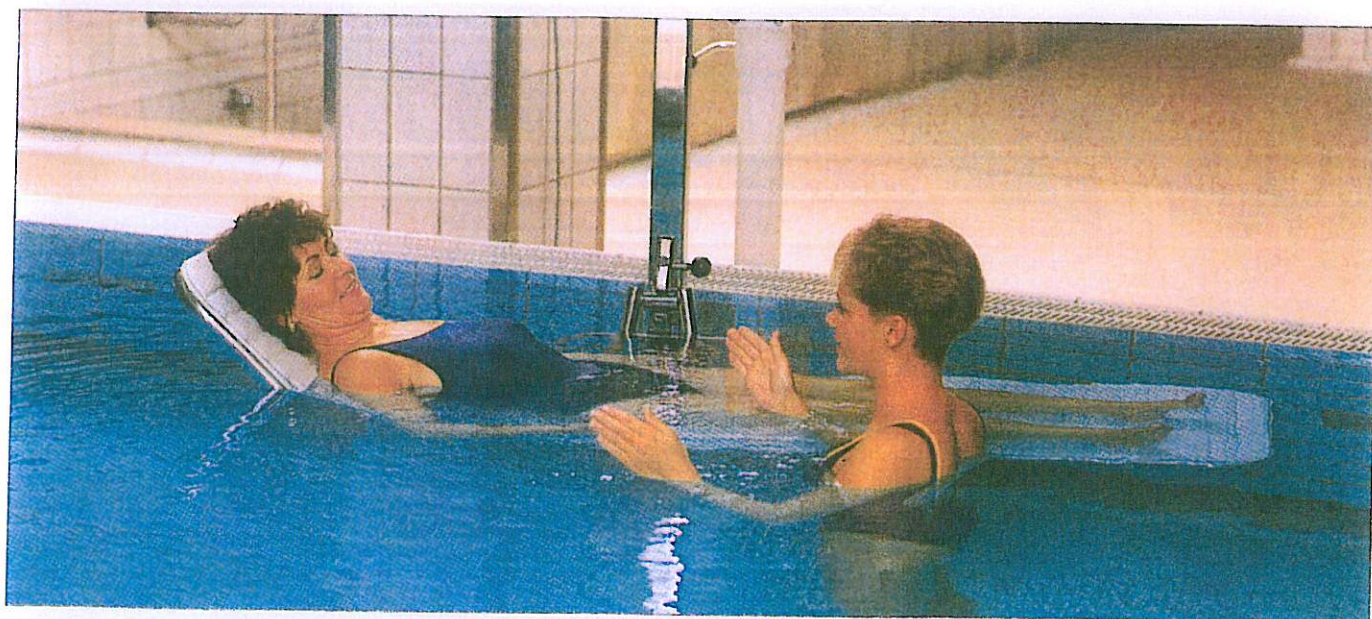

Il paziente può ora stare sulla barella per i suoi esercizi o, con un pó di assistenza, muoversi con cautela nell'acqua.

Sistema di trasferimento e sollevamento per pazienti seduti.

Il Sollevatore per Piscina Arjo dà al vostro paziente una sicurezza confortevole ed un modo dignitoso di trasferimento dal bordo della piscina nell'acqua. È anche di facile uso per il personale.

Il sistema include la sedia ed una confortevole barella che si attacca facilmente al sollevatore. Il Sollevatore per Piscina è adatto per piscine sopra il livello del pavimento e per piscine a livello terra.



La Sedia per Sollevatore per Piscina trasporta il paziente e si attacca al sollevatore. Questo significa che è comodo per voi e sicuro per il paziente. I braccioli piegabili dietro lo schienale danno al paziente una ulteriore sicurezza. Dopo che la sedia è attaccata al sollevatore, togliere la parte inferiore del telaio. Le ruote orientabili vi aiuteranno a farlo facilmente.



Il piantone del Sollevatore per Piscina può essere bloccato in qualsiasi posizione si desideri. Questo è utile, per esempio, quando desiderate che il paziente stia sulla sedia per gli esercizi di idroterapia.

Piegare un bracciolo dietro lo schienale. Il paziente può ora muoversi con cautela dalla sedia con una piccola assistenza da parte vostra.



Il Sollevatore per Piscina può essere fissato al pavimento per mezzo di una base di appoggio.

Il sollevatore è costruito in plastica, acciaio inossidabile e materiali resistenti alla corrosione per assicurarne una lunga durata ed un uso affidabile nell'atmosfera acida di una piscina trattata con cloro.

Accessori per la sedia, la sedia-nuoto e il sollevatore.



Un Appoggio per le Gambe per la Sedia per Sollevatore per Piscina rende più facile il trasferimento in piscine sopra il livello del pavimento.



Le ruote larghe rendono possibile ai pazienti spostare la sedia da soli. Le ruote possono essere usate su entrambe le sedie e includono il sistema di attacco.



La Sedia per Sollevatore per Piscina ha i braccioli dietro lo schienale. Il telaio rimovibile è dotato di freni su tutte e quattro le ruote orientabili per rendere il trasferimento da e verso il sollevatore sicuro e semplice. Tutte le parti sono in plastica o acciaio inossidabile.



La Sedia-nuoto per Sollevatore per Piscina ha anche i braccioli dietro lo schienale. Il telaio fisso è costruito con materiali di alta qualità, specialmente progettati per l'impiego in acqua. Le grandi ruote frontali permettono un facile movimento nella piscina ed i freni nelle ruote posteriori rendono sicuri tutti i trasferimenti.



La Barella per Sollevatore per Piscina ha un materasso confortevole. Le cinture Velcro rendono facile l'operazione di rimozione per lavaggio, ecc. Il Trasportatore di Barella per Sollevatore per Piscina è costruito in acciaio inossidabile ed è dotato di freni su tutte e quattro le ruote orientabili.



Il Trasportatore del Sollevatore per Piscina lo solleva e sposta ad un magazzino, o da un punto di installazione ad un altro nella zona della piscina, praticamente senza sforzo.

Ulteriori informazioni particolareggiate sul sollevatore per piscina, sedie e barella possono essere reperite nella brochure tecnica. I prodotti di questa brochure sono protetti da brevetti e progetti registrati.

Ci riserviamo il diritto di fare modifiche tecniche.

Questi prodotti sono parte della serie globale di apparecchiature Arjo per l'igiene del paziente, sollevamento e trasporto, e idroterapia. Ulteriori informazioni possono essere trovate nelle nostre brochure generali.

ARJO HUNTLEIGH

Arjo Huntleigh S.p.A.
Via di Tor Vergata, 432
00133 Roma, Italia
Tel: +39 06 87426211
Fax: +39 06 87426222
E-mail: promo@arjo.it
www.arjohuntleigh.it



FM 21964
ISO 9001 • BS 5750 Part 1 • EN 29001
Arjo Ltd. St. Catherine Street, Gloucester, UK.

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

ArjoHuntleigh S.p.A.

Via di Tor Vergata, 432

00133 ROMA

Tel: +39 (0)6 87426211

Fax: +39 (0)6 87426222

E-mail (Sales): Italy.promo@arjohuntleigh.com

E-mail (Service): Italy.a_service@arjohuntleigh.com

www.arjohuntleigh.it

Il GRUPPO GETINGE è leader globale nella fornitura di attrezzature, ausili e sistemi che contribuiscono a migliorare la qualità e il rapporto costi/efficienza nel campo sanitario e delle scienze biologiche. Attrezzature, servizi e tecnologie sono assicurati da ArjoHuntleigh, per la movimentazione e l'igiene del paziente, la disinfezione, prevenzione DVT, letti terapeutici, superfici terapeutiche e diagnostica, da GETINGE, per il controllo e la prevenzione delle infezioni nel campo sanitario e delle scienze biologiche e da MAQUET, per le stazioni di lavoro chirurgiche e le unità per le cure cardiopolmonari e intensive.

© Arjo AB 2008