

# SystemRoMedic

---

## TurnTable



### ISTRUZIONI D'USO

Si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni per essere certi di utilizzare il prodotto in modo appropriato. Per ogni eventuale chiarimento o approfondimento o per esprimere i vostri commenti sul prodotto, potete contattarci al numero tel. 049-9720220, fax 049-5800920, o all'indirizzo e-mail [info@laboindustria.com](mailto:info@laboindustria.com).

#### Utilizzo

Il TurnTable deve essere utilizzato con quei pazienti che riescono a reggersi in piedi da soli, ma non sono in grado di muovere i piedi. Il TurnTable può essere usato nelle seguenti situazioni:

- per trasferire il paziente dal letto alla carrozzina.
- per trasferire il paziente dalla carrozzina alla sedia o al wc.

#### Tecniche

Per il massimo sostegno e sicurezza sia per il paziente che per l'operatore si raccomanda sempre di usare contemporaneamente una EasyBelt o una FlexiBelt. Le tecniche qui illustrate sono solo degli esempi dei vari usi che possono essere fatti. Per capire qual è la tecnica più adatta alla situazione del vostro paziente, è fondamentale consultare un fisioterapista o un istruttore di movimentazione del paziente.



Il TurnTable può essere posizionato sul pavimento con il logo RoMedic verso l'alto e sotto la sedia.

#### Vantaggi

Il TurnTable è molto semplice da utilizzare, grazie al suo peso ridotto e alla presenza della **maniglia**. Le dimensioni assicurano all'operatore il pieno controllo dell'ausilio; inoltre l'operatore può facilmente bloccare il movimento quando necessario. La superficie antiscivolo presente su entrambi i lati lo rende stabile e sicuro per il paziente.

#### Pulizia e manutenzione

Il TurnTable può essere lavato usando un qualsiasi detergente d'uso ospedaliero non abrasivo. Evitare di esporre il TurnTable a temperature troppo elevate.

#### Indicazioni

Posizionare il TurnTable sul pavimento vicino al paziente (vedi illustrazione). Posizionare il TurnTable in modo che il paziente sia in grado di muoversi naturalmente mentre è in piedi. La maniglia deve essere sistemata dietro i piedi del paziente.

**Il TurnTable deve essere rimosso dal pavimento subito dopo l'uso.**



Il TurnTable può essere bloccato dall'operatore mettendo il tallone sul pavimento e la punta dello stesso piede sul disco girevole.

### Trasferimento da sedia a carrozzina

Bloccare il TurnTable con la punta del piede tenendo il tallone sul pavimento. Utilizzare una EasyBelt o una FlexiBelt per aiutare il paziente ad alzarsi in piedi. L'operatore deve controllare la rotazione con il proprio piede senza far girare direttamente il corpo del paziente. Bloccare il TurnTable con il tallone quando il paziente si deve risedere.



### Trasferimento da letto a carrozzina

Spostare il paziente fino al bordo del letto e sistemare la carrozzina il più vicino possibile al paziente. **Assicurarsi che le rotelle siano bloccate.**

Utilizzare una EasyBelt o una FlexiBelt per aiutare il paziente ad alzarsi in piedi. Controllare la rotazione mettendo il piede sul disco girevole senza ruotare direttamente il corpo del paziente. Bloccare il TurnTable con il tallone quando il paziente si deve risedere.



### Trasferimento da carrozzina a wc

Seguendo la procedura sopra descritta, 2 operatori possono assistere il paziente durante il trasferimento. Utilizzando una cintura, gli operatori possono così tenere una mano sulla cintura e con l'altra mano svestire il paziente.



## GARANZIA 36 MESI

### Specifiche tecniche

Codice	Prodotto	Dimensioni	Materiale
R5085	TurnTable	Ø 38 cm	Polietilene
Classificazione internazionale 12 30 06			

**PRODOTTO  
LATEX FREE**



**RoMedic AB**

Distribuito da:  
LABOINDUSTRIA S.p.A.  
Via Matteotti, 37 - 35020 Arzergrande (PD)

Tel. 049/9720220 Fax 049/5800920  
www.laboindustria.com  
info@laboindustria.com