

AUSILI



Carseat Pro

Anche viaggiando in auto è importante prevenire e contrastare le deformità muscolo-scheletriche, così il seggiolino auto deve garantire all'utente la stabilità posturale per viaggiare al contempo comodamente ed in sicurezza. Il risultato è il Zizi CARSEAT PRO che, superati i crash test, ha tutte le caratteristiche degli altri sistemi di seduta della serie Zizi. Progettato per bambini e ragazzi con ipotono o ipertono estensorio, può anche accogliere una varietà di deformità muscolo-scheletriche (cifoscoliosi, retroversione di bacino, sub-lussazione d'anca...). L'utente può così tollerare la posizione seduta per periodi più lunghi facilitando la propria capacità attiva di compiere movimenti.



Accessori

Il sistema CARSEAT PRO è corredato di diversi accessori opzionali.



Poggiatesta




Cintura Pelvica




Regolazione gambe



Fascetta frontale dinamica

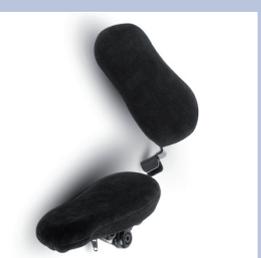

Supporto pelvico

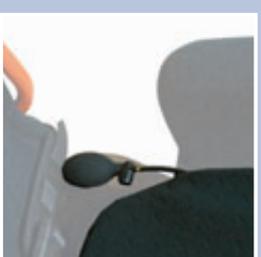

Supporto lombare (cuscinetto gonfiabile)



Pedana



Pettorina sternale incrociata



Pettorina sternale



Piatto girevole



Tavolino




Il CARSEAT PRO può essere fissato ad una base girevole che facilita l'ingresso ed il posizionamento all'interno del veicolo.

Carseat Pro

Regolazione gambe

È possibile regolare con precisione la profondità della seduta, l'adduzione e l'abduzione. Il sistema Carseat Pro consente di regolare la profondità della seduta fino a un massimo di 10 cm per adattarla perfettamente alle esigenze dell'utente e consentire alla seduta di "crescere" insieme a lui. La regolazione permette anche di aprire l'angolo del bacino.

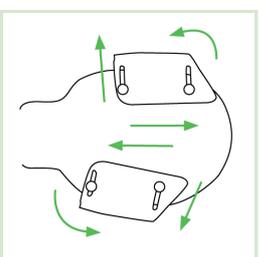

Schienale regolabile

Il supporto laterale regolabile su tre livelli aiuta a migliorare il controllo posturale, riducendo la deformità e rendendo possibile il raggiungimento di un livello motorio migliore. È possibile correggere o compensare le malformazioni, riuscendo a mantenere una posizione ottimale.

Schienale allineato

Lo schienale poggia contro la parte posteriore del sedile dell'auto e ne segue l'inclinazione agevolando il passaggio tra la posizione di veglia e quella di riposo.

1 Abduzione


2 Differenza di lunghezza degli arti

Cuscinetto della seduta integrato

Un cuscinetto integrato agevola i movimenti e il controllo posturale e riduce l'inclinazione. Altri sistemi che utilizzano una superficie piana causano inevitabilmente l'inclinazione posteriore del bacino dell'utente.

Fase 1 : regolare la profondità della seduta in funzione della lunghezza della parte superiore della gamba.

Fase 2 : regolare il cuscinetto in modo da garantire un perfetto supporto pelvico.

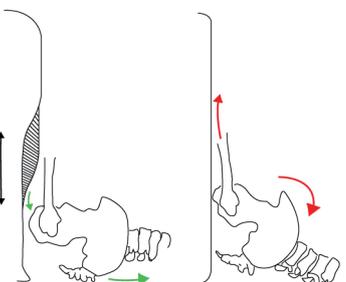

Flex-back

La parte posteriore poggia contro lo schienale dell'auto, e può essere reclinato a piacere grazie alla plastica flessibile di cui è composto.




dati utente CARSEAT PRO

Peso	Misura 2	Misura 3
Alterza	15-25 Kg	15-36 kg
Larghezza seduta (A)	90-160 cm	90-160 cm
Profondità seduta (B)	34 cm	34 cm
Larghezza tronco (C)	27-36 cm	32-41 cm
Profondità laterale (D)	14-24 cm	16-26 cm
Altezza schienale alle ascelle (E)	12 cm	13 cm
Differenza lunghezza arti (F)	22-29 cm	26-33 cm
Abduzione	10 cm	10 cm
	9° (in) 18° (out)	9° (in) 18° (out)

dati prodotto CARSEAT PRO

Altezza (H)	Misura 2	Misura 3
Lunghezza (I)	57-77 cm	65-80 cm
Profondità (J)	37-47 cm	44-54 cm
Profondità poggiatesta (K)	38 cm	38 cm
Altezza poggiatesta (L)	17 cm	17 cm
Peso	18 cm	18 cm
Poggiatesta mis.1 lungo	7 Kg	9 Kg
Poggiatesta mis.2 lungo	- (K) - (L)	- (K) - (L)
	- (K) - (L)	- (K) - (L)

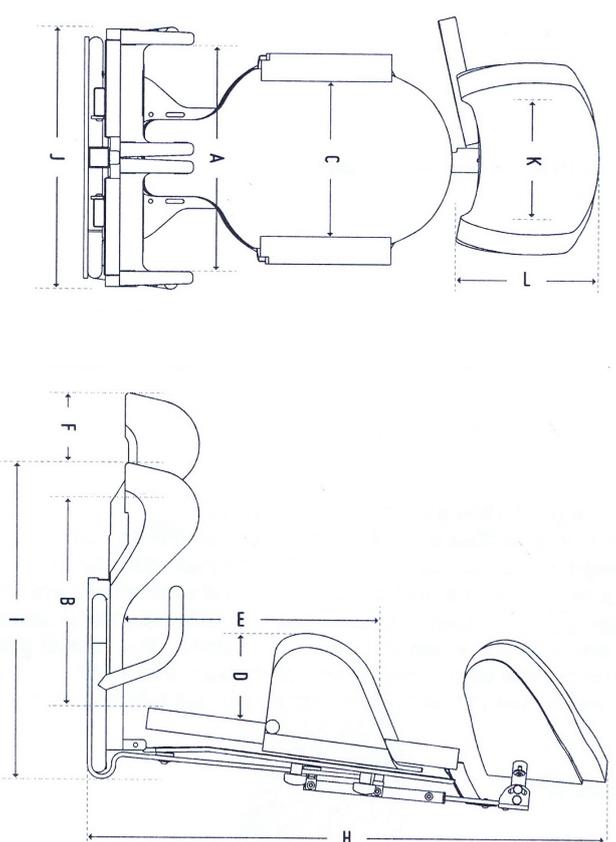

Timbro del Rivenditore Autorizzato