



EDIZIONE ITALIANA

Made in Italy

# Struzzo

## PER MUOVERSI IN AUTONOMIA

**Gli ausili della serie consentono di raggiungere la posizione verticale, e di svolgere attività di vita quotidiana senza la presenza dell'accompagnatore.**

rif. codice AV 23 2420

**Semplicità delle regolazioni senza l'utilizzo di alcun attrezzo**

**L'ausilio è idoneo per un utilizzo da parte di persone di altezza compresa tra 140 e 200 cm e fino a 140 kg di peso.**




### PER UN' ACCESSIBILITA' AGEVOLATA:

<1>Durante la fase di trasferimento dalla carrozzina allo stabilizzatore il sellino contrariamente alla vecchia versione, può rimanere sempre orizzontale, ed allinearsi al piano di seduta dell'utente per effetto della regolazione in altezza dell'ausilio. Tale allineamento del sellino alla seduta di partenza agevola e rende maggiormente sicura l'accessibilità all'ausilio.

<2> Le pedane scorrevoli indipendenti e regolabili in profondità riducono la distanza della persona in carrozzina, o comunque in posizione seduta, dalla base della struttura. Ciò favorisce il trasferimento dei piedi dell'utente sullo stabilizzatore. E' possibile la regolazione delle pedane anche quando l'utente è in carico.

### 1 - LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA DELLA STRUTTURA:

la struttura di sostegno si adatta agevolmente e senza alcuno sforzo all'altezza della persona in quanto regolabile con azionamento elettrico. Tale regolazione può essere effettuata anche dall'utente in modo semplice, immediato, ed in piena autonomia anche quando egli si trova già in postura eretta. Ne consegue che per effetto di questa regolazione l'intero sistema dei supporti alle ginocchia, laterali e al tronco subisce un cambiamento di posizione per una maggiore sicurezza e comfort dell'utente.

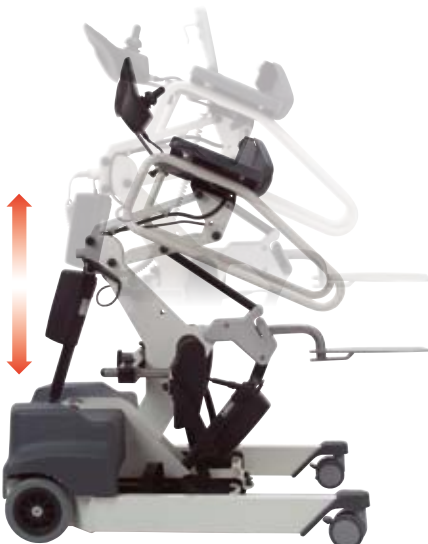

**Per maggiori informazioni:**



EDIZIONE ITALIANA

Made in Italy

# Struzzo




## Tale sellino è concepito per agevolare il trasferimento dell'utente dalla carrozzina all'ausilio annullando la distanza tra gli stessi.

È possibile utilizzare la tasca sagomata accessorio codice AC0048.

ref. code AV 23 3420


**APPLICAZIONE DELL'ACCESSORIO "TASCA SAGOMATA"**  
**Per agevolare ulteriormente l'accessibilità.**

**<3>** Il sellino allungato viene infilato nella tasca sagomata posta sotto il cuscino antidecubito. Può essere opportuna la sorveglianza o l'assistenza di un operatore se l'utente non ha sufficiente forza per infilare il sellino nella tasca sagomata.

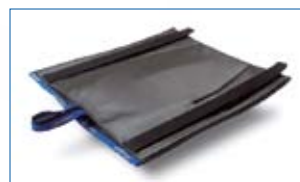

**TASCA SELLA LUNGA**  
agevola trasferimento da carrozzina,  
utilizzabile con mod. AV 23 3420

### DATI TECNICI

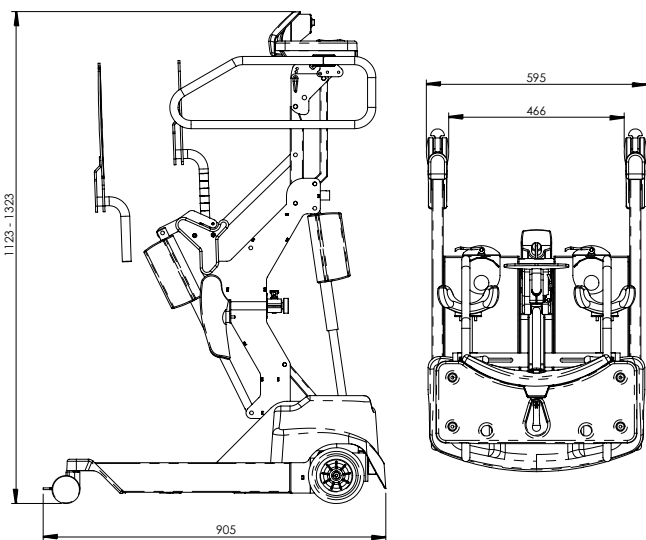

DESCRIZIONE	SERIE STRUZZO
Gruppo maniglioni-supporto toracico	mobile-verticalizzabile
Verticalizzazione servo-assistita	elettrica
Regolazione altezza struttura	elettrica
Protezione sovraccarico	elettronica
Segnalatore di sovraccarico	acustico
Freno di stazionamento	su ruote posteriori
Velocità di avanzamento	Max 2.5 Km/h (regolabile)
Altezza del telaio da terra	31 mm
Massimo scalino superabile	20 mm
Pendenza massima percorribile	2 gradi
Autonomia di utilizzo (verticalizzazione/trasferimento)	Normale utilizzo 3-4 giorni (2h 30min utilizzo ininterrotto in spostamento)
Tempo medio di ricarica batterie	8 ore
Livello di carica batterie	display multicolore su joystick
Regolazione velocità	digitale su joystick
Autospegnimento	di serie
Diagnosi guasti e manutenzione	a display
Pulsante arresto verticalizzazione	di serie
Inibizione pulsante arresto verticalizzazione	di serie

*I modelli Struzzo sono predisposti per l'applicazione di determinati accessori*



**CHINESPORT**  
REHABILITATION and MEDICAL EQUIPMENT