



[www.ggmascensori.it](http://www.ggmascensori.it)



[www.ggmmontascale.it](http://www.ggmmontascale.it)

The logo consists of three stylized letters: 'G' in white on a blue square, 'C' in white on a red square, and 'M' in white on a blue square.

# Montascale Minivator

Facciamo salire le tue aspettative



**H**ai difficoltà a salire e scendere le scale? Non sei l'unico. Ogni anno migliaia di persone cercano una soluzione alla difficoltà di usare le scale di casa.

A volte può essere difficile prendere la decisione di installare un montascale, tuttavia, valutate le alternative, cambiare casa oppure vivere solo su un piano, molte persone scelgono questa soluzione.

In principio l'idea di fare installare un montascale potrebbe suscitare delle incertezze. Generalmente il montaggio richiede solo poche ore e non necessita di opere murarie. In questa guida troverai tutte le informazioni necessarie per scegliere il tuo montascale Minivator.

Ti aiuterà a capire molto più facilmente quale sia il montascale giusto per le tue esigenze attuali e future.

## Come si usa un montascale

Se non conosci i vantaggi offerti da un montascale, potresti avere qualche dubbio su cosa comporti possederne e utilizzarne uno.

È errore comune pensare che i montascale vengano fissati al muro. Ciò accade solo raramente, i montascale a poltroncina Minivator sono installati direttamente sulla scala.

Un montascale è costituito da tre componenti base. Alla rotaia, montata sulla scala, viene applicato il carrello motore e su di esso la seduta più adatta alle proprie esigenze.

Tutti i montascale Minivator sono dotati di una leva di comando che, azionata, attiva la direzione di marcia desiderata, mentre, non appena rilasciata, ne arresta il movimento.

Sebbene siano molto semplici da usare, i montascale sono dispositivi meccanici e, pertanto, richiedono interventi annuali di assistenza e manutenzione.



# Come scegliere il montascale adatto alla propria scala

Le rotaie dei montascale si dividono in due categorie principali: rettilinee e curvilinee. È semplice capire quale sia il tipo adatto alla propria scala.

## Montascale rettilinei

I montascale rettilinei sono utilizzabili solo su scale dritte per percorsi in linea retta come mostrato nella figura A (dai piedi della scala al livello superiore); non sono in grado di superare variazioni di pendenza o curve.

Minivator offre vari montascale rettilinei per soddisfare le tue esigenze: le serie Simplicity e Minivator 1000 sono descritte dettagliatamente alle pagine 11-15.

## Montascale curvilinei

I montascale curvilinei sono dotati di rotaie progettate e costruite appositamente per l'uso su scale con variazioni di pendenza, con curve, anche a chiocciola. Le scale rappresentate nelle figure B, C e D sono solo alcuni esempi delle varie tipologie sulle quali possono essere utilizzati.

Tutte le rotaie curvilinee Minivator vengono prodotte su misura a seguito di uno specifico rilievo della scala.

Il montascale curvilineo Minivator 2000 è un sistema versatile e offre il minor raggio di curvatura interna disponibile sul mercato; può essere montato su una vasta gamma di scale anche di dimensioni ridotte seguendone il profilo, grazie a un ingombro minimo. La rotaia a doppio tubolare e doppia cremagliera garantisce un utilizzo sicuro e molto confortevole. È disponibile di serie in due colori, grigio chiaro o canna di fucile, ma di fatto può essere fornita in qualsiasi colorazione, integrandosi perfettamente in qualsiasi contesto.

L'avanzata ed esclusiva tecnologia eSurvey Minivator, per il rilievo e la misurazione fotogrammetrica delle scale, unitamente a processi di progettazione e produzione all'avanguardia, consentono a Minivator di produrre rotaie su misura nei tempi più brevi offerti dal mercato.


## Montascale rettilinei e configurazione della scala

I montascale rettilinei non sono in grado di superare variazioni di pendenza o curve.



## Montascale curvilinei ed esempi delle tipologie di scale

I montascale curvilinei Minivator sono in grado di superare curve e variazioni di pendenza, di raggiungere più piani e possono essere montati anche su scale a chiocciola! Sono progettati esclusivamente per la tua scala, in modo che la rotaia si adatti perfettamente e ti garantisca il massimo comfort.

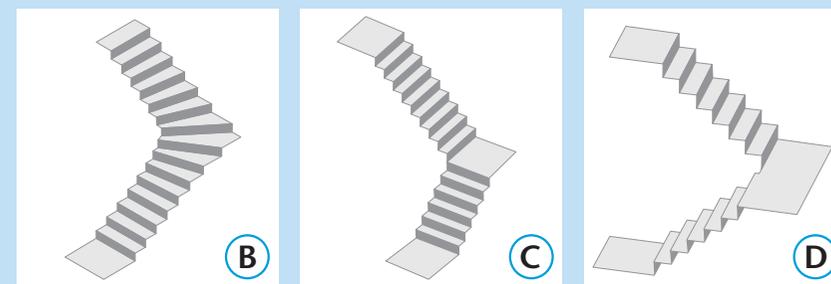

# Il montascale perfetto per te

## Progettazione della scala

Non devi preoccuparti della progettazione della scala: il rivenditore Minivator lo farà per te. Ti suggerirà gli eventuali cambiamenti necessari (ad esempio, spostare un mobile) e ti consiglierà il lato migliore della scala per installare il montascale Minivator.

Nella maggior parte dei casi, il rilievo della scala viene eseguito facilmente e rapidamente. Se la tua scala è più complessa, ad esempio se comprende pianerottoli, o se è a ventaglio o a chiocciola, il rilievo verrà eseguito velocemente con l'avanzata tecnologia eSurvey di Minivator. Le rotaie per montascale curvilinei Minivator sono progettate per adattarsi perfettamente alla tua scala. Quindi è importante che la scala venga misurata con la massima precisione.

## Valutazione dell'utente

Contemporaneamente al rilievo della scala, il rivenditore Minivator eseguirà anche una valutazione dell'utente. Verranno prese alcune misure per garantire che il montascale scelto sia adatto per te. Inoltre, ti porrà alcune semplici domande per individuare il lato migliore su cui posizionare i comandi e il tipo di seduta più adatto, e per valutare quale configurazione sia necessaria nell'immediato e nel futuro.

Non è indispensabile che la valutazione venga eseguita all'atto del rilievo. Per quanto ciò sia preferibile, la mancata disponibilità dell'utente non pregiudicherà la fornitura del montascale, a patto che una terza persona fornisca le informazioni necessarie per conto dell'utente.

I montascale Minivator sono progettati per soddisfare un'ampia gamma di necessità e consentono varie regolazioni (ad esempio, l'altezza del sedile) che possono essere eseguite durante l'installazione per adattare il montascale all'utente.

**eSurvey**  
from minivator



La maggior parte dei rivenditori Minivator utilizza l'avanzata tecnologia eSurvey per eseguire il rilievo delle scale curve. Questo speciale sistema elettronico massimizza la precisione del rilievo di una scala curva, riducendo contemporaneamente i tempi necessari.

Sulla scala e intorno a essa vengono posizionati alcuni obiettivi sensibili; successivamente vengono scattate delle fotografie. Il nostro software appositamente sviluppato elabora le immagini e crea un preciso modello 3D, in modo da permetterci di progettare la rotaia perfetta per la Tua scala.



# Hai bisogno di una rotaia incernierata?

Al fine di consentire all'utente di sedersi con facilità, è necessario che la rotaia si estenda oltre la scala, sul pianerottolo d'ingresso riducendo al minimo l'altezza tra il seggiolino e il pavimento. In alcune case, dove la porta d'ingresso (o di una stanza adiacente) è vicina ai piedi delle scale, la rotaia potrebbe essere d'ingombro. In tali circostanze si deve installare una rotaia incernierata, che può essere ripiegata per lasciare libero il passaggio.


## Incernierata manuale



Le incernierate di tipo manuale devono essere sollevate quando il montascale non è in uso.

Minivator Simplicity, Simplicity+ e 1000 sono disponibili con rotaia incernierata di tipo manuale. In questa versione la rotaia deve essere sollevata e abbassata manualmente. L'incernierata è dotata di ammortizzatore a gas ed è stata progettata per facilitare al massimo la movimentazione manuale.

## Incernierata automatica

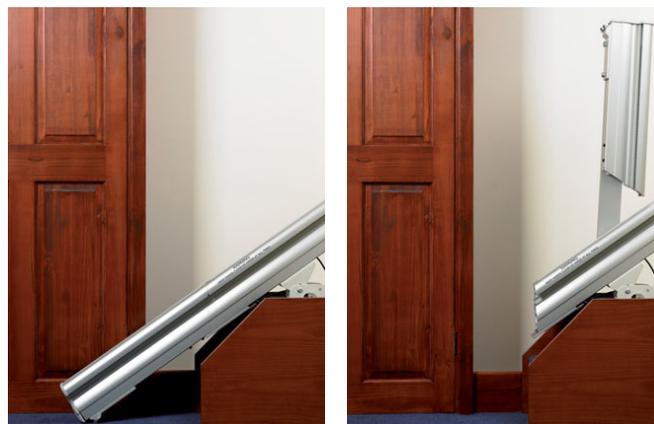

Le incernierate motorizzate vengono azionate toccando un tasto, dal piano superiore o inferiore, per allontanare la rotaia dall'ingresso.

Minivator 1000 e Minivator 2000 sono entrambi disponibili con rotaia incernierata automatica. Quando si aziona il montascale dal comando a leva, l'incernierata si solleva o si abbassa automaticamente.

Quando il montascale non è in uso, l'incernierata viene azionata schiacciando un apposito tasto sul telecomando. Il montascale sale lungo la rotaia e si arresta in posizione di parcheggio; quindi la sezione dell'incernierata



si solleva automaticamente, lasciando libero il passaggio.

### Importante

Le rotaie incernierate devono sempre essere sollevate nei periodi di inattività (ad esempio durante le ore notturne), particolarmente se bloccano l'accesso dalla porta principale o se creano un ostacolo per gli altri abitanti dell'edificio.

# La straordinaria rotaia scorrevole Minivator!

La rotaia scorrevole è una soluzione rivoluzionaria offerta in esclusiva da Minivator, che può essere utilizzata per i montascale rettilinei Simplicity o Simplicity+. Questa soluzione, unica nel suo genere, elimina la necessità di usare l'incernierata: la rotaia si muove insieme al montascale, lasciando libera l'area alla base della scala.

## La rotaia scorrevole



La rotaia scorrevole si allontana dal pianerottolo ai piedi della scala o si dirige verso di esso.

Simile a una incernierata automatica, la rotaia scorrevole si aziona simultaneamente all'attivazione del comando a leva o del telecomando.

La rotaia scorrevole è leggermente più corta rispetto alla lunghezza della scala. Quando si aziona la salita, la rotaia si muove insieme al montascale, raggiunge la sommità della scala e quindi si arresta; il montascale continua a salire fino ad arrivare in cima, dove è possibile scendere in tutta sicurezza. Viceversa per tornare al piano inferiore, la rotaia si aziona in discesa insieme al montascale, fino a consentire di scendere in tutta sicurezza sul pianerottolo ai piedi della scala.



La rotaia scorrevole si dirige verso il pianerottolo in cima alla scala o si allontana da esso.

La rotaia scorrevole è dotata di sensori di sicurezza su entrambe le estremità, che fanno in modo che si arresti nel caso incontri un ostacolo lungo il percorso. Se si desidera, il montascale continua a dirigersi in direzione dell'ostacolo per rimuoverlo, nel caso sia possibile farlo in condizioni di sicurezza, e continuare la corsa. In alternativa, la rotaia e il montascale possono essere allontanati dall'ostacolo. La rotaia scorrevole offre una maggiore sicurezza rispetto alla tradizionale incernierata, poiché elimina il rischio che un oggetto si incastri nel meccanismo.

# Caratteristiche dei montascale Minivator

## Seduta girevole

Una volta giunti in cima alla scala è possibile ruotare il sedile e scendere in tutta sicurezza.



### Girevole manuale

In caso di dispositivo girevole manuale, sono previste due levette manuali su ambo i lati del sedile. Abbassando una delle levette, oppure tirandola verso l'alto\*, è possibile ruotare il sedile verso il piano, dove si blocca in posizione, consentendo di scendere in condizioni di sicurezza.

7

\*Sul modello Simplicity il dispositivo girevole si adopera soltanto abbassando la levetta.

### Girevole automatico

Il dispositivo girevole automatico viene azionato semplicemente prolungando la pressione del comando direzionale a leva, che fa ruotare automaticamente la seduta verso il piano. I dispositivi girevoli automatici sono dotati anche di sblocco di emergenza manuale per consentire l'accesso al piano in caso di necessità.



## Poggiapiedi pieghevole

Il poggiapiedi e la seduta possono essere ripiegati per diminuire l'ingombro ed aumentare lo spazio disponibile rendendo la scala più libera.

### Poggiapiedi manuale

Il poggiapiedi manuale è dotato di un semplice meccanismo che riduce al minimo la forza necessaria per l'apertura e la chiusura.

### Poggiapiedi automatico

Scegliendo il poggiapiedi automatico, non sarà necessario chinarsi per sollevarlo o abbassarlo. Si ripiegherà automaticamente quando viene sollevato o abbassato il seggiolino; in alternativa potrà essere azionato mediante un apposito interruttore posto nel bracciolo, consentendo di sollevare e abbassare il poggiapiedi da seduti.



## Parcheggio e chiamata del montascale

Tutti i montascale Minivator sono forniti di serie di due telecomandi, in modo da poterne tenere uno in cima e uno in fondo alla scala. È così possibile azionare il montascale in salita e in discesa senza dover necessariamente utilizzare i comandi a bordo. In questo modo non soltanto si può parcheggiare il montascale in cima o in fondo alla scala, ma si dispone di una soluzione ideale in presenza di più utenti: il montascale può essere chiamato da un piano all'altro, proprio come un ascensore!





# I vantaggi di un montascale Minivator

Il Gruppo Minivator è una delle aziende più grandi al mondo per la produzione e l'installazione di montascale. Abbiamo aiutato migliaia di persone a riconquistare l'indipendenza fornendo soluzioni sicure e affidabili all'ostacolo rappresentato dalle scale di casa. Noi di Minivator sappiamo che essere liberi nella propria casa è vitale. Siamo orgogliosi di aver aiutato così tante persone a superare la difficoltà di salire e scendere le scale.

Scegliendo un montascale Minivator, non soltanto ti assicurerai un modello conforme agli standard britannici ed europei, ma darai la tua fiducia a un fornitore certificato ISO che

rispetta le norme etiche imposte sia dalla British Healthcare Trades Association (BHTA), il cui codice operativo è approvato dall'Office of Fair Trading, che dalla Lift and Escalator Industry Association (LEIA). Avrai la tranquillità di sapere che il tuo montascale è stato prodotto da un'azienda rispettata e rispettabile, con una consolidata reputazione di sicurezza, affidabilità e innovazione.

Tutti i montascale Minivator sono progettati per soddisfare sempre l'utente finale. Abbiamo attinto dalle informazioni degli utenti e degli operatori sanitari, nonché dalla nostra esperienza concreta, per sviluppare una gamma di montascale

adatti alle diverse necessità e ai diversi budget (disponibilità di spesa) degli utenti.

Per gli utenti che hanno una mobilità ridotta o soffrono di dolori, ad esempio a causa dell'artrite, il comando a leva Minivator rende i nostri montascale facili da usare. Il comando a leva può essere montato su entrambi i lati del montascale, a seconda della comodità dell'utente.

Per utilizzare il montascale Minivator è sufficiente schiacciare il comando a leva nella direzione desiderata: il montascale trasporterà l'utente con dolcezza e in tutta sicurezza.

Minivator offre come opzione la seduta girevole e il poggiatesta in versione automatica, anziché manuale, per rendere ancora più semplice l'utilizzo del montascale. L'alimentazione a batterie ricaricabili ad elevata capacità garantisce che, anche nel caso di assenza di energia elettrica, il tuo montascale sia sempre disponibile all'uso.

9



## La sicurezza, una caratteristica di serie

Tutti i montascale Minivator sono dotati di sensori di sicurezza sul carrello motore e sul poggiatesta, progettati per arrestare il montascale nel caso incontri un ostacolo. In caso di arresto, il montascale può muoversi soltanto nella direzione opposta rispetto all'ostacolo. Tutti i montascale Minivator sono dotati di display diagnostico che consente di monitorarne lo stato, ad esempio nel caso sia stato rilevato un ostacolo.



Per una maggiore tranquillità, il montascale è provvisto di serie anche di una cintura di sicurezza. La cintura retraibile a distacco facilitato può essere allacciata di lato o centralmente, a seconda della comodità degli utenti.



## Facile da usare

Tutti i montascale Minivator vengono azionati schiacciando nella direzione di marcia desiderata un comando a leva robusto e di grandi dimensioni.



Posizionato all'estremità del bracciolo del sedile, si attiva facilmente con la mano o con il braccio; il bracciolo rimane quindi libero, offrendo così un saldo sostegno al momento di alzarsi o sedersi.

10





---

# Simplicity

## Montascale rettilineo

---

Per gli utenti che non necessitano di opzioni automatiche e che hanno una scala dritta, Simplicity offre un modo sicuro ed economico per superare il problema di salire le scale.

Il rivestimento del sedile è disponibile in tessuto ignifugo color sabbia, facile da pulire.

Il poggiatesta e il dispositivo girevole della seduta del modello Simplicity sono a comando manuale. I modelli Simplicity sono forniti di serie con cintura di sicurezza a clip.

I montascale della serie Simplicity ricevono un'alimentazione continua. In altre parole, possono sostare in qualunque punto della rotaia quando non sono utilizzati. Quindi non sarà necessario preoccuparsi di individuare il punto giusto della rotaia su cui fare stazionare il montascale, poichè le batterie si ricaricano automaticamente in qualsiasi posizione.

Su richiesta, i modelli Simplicity possono essere equipaggiati con incernierata manuale o con rotaia scorrevole.

---

Distanza totale min-max dal poggiatesta al sedile: 390-560 mm  
Larghezza del sedile nel punto più ampio: 480 mm  
Ingombro minimo in posizione ripiegata: 285 mm  
Peso massimo dell'utente: 140 kg  
Peso massimo dell'utente con rotaia incernierata o scorrevole: 120 kg

---

# Simplicity+

## Montascale rettilineo

---

Per gli utenti che necessitano di opzioni automatiche, Simplicity+ è la soluzione elegante ed economica per risolvere il problema di salire una scala dritta. Combina la rotaia a ricarica continua della serie Simplicity con la seduta del modello Minivator 1000 che è disponibile in sei colori diversi.

Simplicity+ consente di scegliere tra le versioni manuali o automatiche del poggiapiedi e del dispositivo girevole della seduta.

Simplicity+ è disponibile sia con la rotaia scorrevole automatica che con l'incernierata manuale. Quindi, in presenza di una porta ai piedi della scala, Simplicity+ offre varie soluzioni per evitare che la rotaia rappresenti un ostacolo.

---

Distanza totale min-max dal poggiapiedi al sedile: 420-530 mm

Larghezza del sedile nel punto più ampio: 460 mm

Ingombro minimo in posizione ripiegata: 350 mm

Peso massimo dell'utente: 140 kg

Peso massimo dell'utente con rotaia incernierata o scorrevole: 120 kg





---

# Minivator 1000

## Montascale rettilineo

---

Per coloro che sono alla ricerca di una soluzione che riduca al minimo l'ingombro della rotaia sulla scala, il modello Minivator 1000 offre una delle rotaie per montascale rettilinei più sottili sul mercato. Disponibile con rivestimento in sei colori diversi, può essere equipaggiato con opzioni automatiche per il ripiegamento del poggiatesta e la rotazione della seduta in cima alla scala, aumentando la facilità di scendere al piano.

La sottile rotaia in alluminio cela una cremagliera che offre due punti di parcheggio (di serie) per la ricarica delle batterie in cima e ai piedi della scala. Il modello Minivator 1000 vanta la maggior portata della nostra gamma: 160 kg.

Il montascale rettilineo Minivator 1000 può essere fornito di una incernierata automatica per impedire che la rotaia ingombri lo spazio ai piedi della scala o ostruisca eventuali porte di ingresso.

---

Distanza totale min-max dal poggiatesta al sedile: 430-530 mm

Larghezza del sedile nel punto più ampio: 460 mm

Ingombro minimo in posizione ripiegata: 410 mm

Peso massimo dell'utente: 160 kg

Peso massimo dell'utente con rotaia incernierata: 137 kg

---

# Montascale per esterni

---

Per alcune persone, non sono soltanto le scale dentro casa a causare problemi. Anche i gradini per accedere a un porticato o alla porta d'ingresso possono rappresentare una barriera insormontabile.

Il montascale Minivator 1000 Outdoor è interamente impermeabile ed è progettato per risolvere il problema causato da scale esterne rettilinee.

Come tutti i montascale Minivator, anche il modello per esterni è dotato di interruttore a chiave per impedire l'utilizzo non autorizzato. Pertanto, quando non è in uso può essere bloccato.

Fornito con rivestimento di colore grigio ardesia, trattato per la protezione contro i raggi UV, il montascale Minivator outdoor comprende anche una copertura impermeabile che lo protegge dagli agenti atmosferici. Così, è sempre pronto per l'uso.

---

Distanza totale min-max dal poggiatesta al sedile: 450-570 mm

Larghezza del sedile nel punto più ampio:

440 mm (+50 mm con distanziatori per le braccia)

Ingombro minimo in posizione ripiegata: 387 mm

Peso massimo dell'utente: 160 kg





---

## Sedute speciali

### Montascale rettilinei e curvilinei

---

Per gli utenti con limitazioni di movimento dovute a patologie a carico delle anche o delle ginocchia, anche sedersi potrebbe risultare difficile o comunque doloroso. In questi casi, una seduta speciale potrebbe essere la soluzione.

Con questa seduta speciale l'utente rimane in posizione semiverticale quando utilizza il montascale. La seduta corta e la cintura di sicurezza retraibile offrono un sostegno stabile su cui l'utente può viaggiare comodamente e in sicurezza.

Le sedute speciali sono disponibili per i montascale Minivator Simplicity+, 1000 e 2000.

Per il rivestimento è possibile scegliere tra sei colori diversi.

Il rivenditore Minivator sarà in grado di consigliare il sedile più adatto per ogni esigenza.

---

La distanza totale min-max dal poggiatesta al sedile dipende dal modello scelto; in ogni caso, la distanza massima è di 850 mm (Minivator 1000 rettilineo) o 875 mm (Minivator 2000 curvilineo)  
Larghezza del sedile nel punto più ampio: 460 mm  
L'ingombro minimo in posizione ripiegata dipende dal modello scelto; in ogni caso, l'ingombro massimo è di 410 mm  
Peso massimo dell'utente, Simplicity+: 140 kg  
Peso massimo dell'utente, Minivator 1000: 160 kg  
Peso massimo dell'utente, Minivator 2000: 137 kg

---

# Minivator 2000

## Montascale curvilineo

---

Il montascale curvilineo Minivator 2000 è costruito su misura ed esclusivamente per la scala dove verrà installato, garantendo la massima precisione possibile. Per questo modello sono disponibili opzioni automatiche per ripiegare il poggiatesta e per ruotare la seduta una volta giunti in cima alla scala, facilitando la discesa.

La rotaia a doppio tubolare e doppia cremagliera, progettata per garantire una corsa stabile e uniforme, è fornita di serie nei colori grigio chiaro o canna di fucile, ma può essere realizzata di qualsiasi colore, in modo da abbinarsi a qualsiasi ambiente.

La rotaia è progettata per trasportare l'utente direttamente dal pianterreno al piano di arrivo, adattandosi con precisione alle esigenze specifiche con differenti opzioni di parcheggio.

Il montascale curvilineo Minivator 2000 può essere fornito di una incernierata automatica per impedire che la rotaia ingombri lo spazio ai piedi della scala o ostruisca eventuali porte di ingresso.

---

Distanza totale min-max dal poggiatesta al sedile: 480-625 mm

Larghezza del sedile nel punto più ampio: 460 mm

Ingombro minimo in posizione ripiegata: 400 mm

Peso massimo dell'utente: 137 kg

Peso massimo dell'utente con rotaia incernierata: 137 kg



# I montascale Minivator in breve

Optional per le sedute	Simplicity	Simplicity+	1000	2000	
Cintura di sicurezza a clip	✓	X	X	X	La cintura di colore nero è dotata di clip centrale, sganciabile premendo su entrambi i lati.
Cintura di sicurezza con velcro	X	○	○	○	Questa cintura di colore nero comprende una chiusura a velcro su entrambi i lati per garantire un solido sostegno.
Cintura di sicurezza retraibile	X	✓	✓	✓	La cintura retraibile color crema può essere agganciata su un lato oppure al centro.
Rivestimenti a scelta	X	✓	✓	✓	Grazie a sei differenti colori, è possibile scegliere il rivestimento che si abbina agli interni della casa.
Funzione di sicurezza intelligente	X	○	○	○	Fa ritornare automaticamente il montascale nella posizione di parcheggio più sicura per facilitare l'accesso in caso di emergenza.
Girevole automatico	X	○	○	○	Fa ruotare il sedile per consentire di scendere e salire sul montascale nel modo più semplice possibile.
Bracciolo corto	○	X	X	X	Consente al sedile di ruotare sulle scale particolarmente strette.
Seduta speciale	X	○	○	○	Ideale per gli utenti che hanno difficoltà a piegare le ginocchia o le anche.
Versione per esterni	X	X	○	X	Progettata per l'uso all'esterno, ad esempio per salire la scala che dà accesso alla porta d'ingresso.

Optional per i poggiatesta	Simplicity	Simplicity+	1000	2000	
Manuale	✓	✓	✓	✓	Il poggiatesta viene aperto e chiuso manualmente.
Comando automatico dal sedile	X	○	○	○	Ripiega il poggiatesta quando viene chiuso il sedile.
Comando automatico dal bracciolo	X	○	○	○	Il poggiatesta può essere sollevato e abbassato mediante un interruttore posto sotto il bracciolo quando l'utente è seduto.

Caratteristiche delle rotaie	Simplicity	Simplicity+	1000	2000	
Per variazioni di pendenza e curve	X	X	X	✓	Per moltissimi tipi di scale, da quelle con curve che raggiungono più piani, fino a quelle a chiocciola.
Ricarica in qualsiasi punto della rotaia	✓	✓	X	X	Il montascale si ricarica ovunque venga parcheggiato sulla rotaia.
Punti di carica multipli	X	X	✓	✓	Si utilizza il telecomando per parcheggiare il montascale sui punti di carica.
Rotaia sottile in alluminio	X	X	✓	X	La rotaia sottile massimizza lo spazio libero sulla scala.
Rotaia disponibile in qualsiasi colore	X	X	X	○	La rotaia per montascale curvilinei può essere personalizzata per abbinarsi agli interni della casa.
Nessuna ostruzione al piano superiore	○	X	X	○	Per l'uso in caso la rotaia ostruisca l'accesso ad una porta in cima alla scala.
Incernierata manuale	○	○	○	X	Per l'uso in caso la rotaia ostruisca l'accesso ad una porta ai piedi della scala.
Incernierata automatica	X	X	○	○	La rotaia si aziona automaticamente lasciando libero l'accesso ad una porta ai piedi della scala.
Rotaia scorrevole	○	○	X	X	La rotaia si sposta insieme al montascale lasciando libero l'accesso ad una porta ai piedi della scala.

Portata	Simplicity	Simplicity+	1000	2000
Portata massima standard	140kg	140kg	137kg	115kg
Portata massima con kit "Heavy Duty" per carichi pesanti	X	X	160kg	137kg

Norme di conformità	Simplicity	Simplicity+	1000	2000
BS5776: montascale	✓	✓	✓	✓
ISO9386: montascale	✓	✓	✓	✓

✓ Di serie ○ Optional X Non disponibile

## Colori dei rivestimenti Simplicity+/1000/2000



# Risposte alle domande più frequenti

Per molte persone, la possibilità di installare un montascale può suscitare degli interrogativi. Di seguito trovi le risposte alle domande che ci vengono poste più di frequente. Il tuo rivenditore Minivator sarà lieto di rispondere a qualsiasi altra domanda, anche a quelle che possono sembrare più banali. Non preoccuparti: di certo non sarai la prima persona a fare domande!

## **Saranno necessari lavori di ristrutturazione dopo l'installazione del montascale?**

Il tuo nuovo montascale verrà installato sulla scala, e non fissato alla parete. Quindi, nella maggior parte dei casi la risposta è no in quanto non sono necessarie opere murarie.

In alcune circostanze potrebbe essere necessario rimuovere un corrimano o ridurre il davanzale di una finestra per facilitare il percorso del montascale.

## **Quanto tempo ci vuole per installare un montascale?**

Dipende dalla complessità della scala. Tuttavia, l'installazione della maggior parte dei montascale richiede dalle due alle quattro ore.

## **Cosa succede in caso di interruzione della corrente?**

Non c'è nulla di cui preoccuparsi. I montascale Minivator funzionano a batterie, che si ricaricano quando il montascale viene parcheggiato in un punto di carica. Questo significa che anche in caso di interruzione della corrente il tuo montascale continuerà a funzionare perfettamente per un determinato numero di corse. I montascale della serie Simplicity si ricaricano in qualunque punto della rotaia.

## **Cosa succede se non lascio in carica il montascale?**

Il sistema di allarme visivo e acustico si attiva e segnala che il montascale non si trova in un punto di carica. Il montascale deve rimanere sempre sotto tensione. Se le batterie si scaricano completamente, potrebbe essere necessario sostituirle.

## **Sulle scale ho la moquette. E se decidessi di cambiarla?**

Il montascale può essere smontato e rimontato per consentire di posare la nuova moquette. I rivenditori autorizzati forniscono il servizio di smontaggio e rimontaggio.

## **Quanto tempo dovrò aspettare prima di avere il mio montascale?**

Dipende dal montascale Minivator che ordinerai. Comprendiamo la differenza che il montascale può fare per la qualità della tua vita: per questo offriamo i tempi di fornitura più brevi disponibili sul mercato.



[www.ggmascensori.it](http://www.ggmascensori.it)



[www.ggmmontascale.it](http://www.ggmmontascale.it)

NEL MONDO EVOLUTO DEGLI ELEVATORI...

GGM s.r.l.

Via Matteo Galdi, 18/B - 84081 Baronissi (SA) ITALY

Tel.: +39 089 956187 - Fax: +39 089 9565509

[info@ggmascensori.it](mailto:info@ggmascensori.it) - [info@ggmmontascale.it](mailto:info@ggmmontascale.it)

