

I diversi tipi di sistemi con condom vengono concepiti e realizzati nei nostri stabilimenti. Prodotti a Lobbach, questi condom presentano dei vantaggi, che in fatto di sicurezza, affidabilità tecnica e di applicabilità sono irrinunciabili per il Cliente. Grazie alle loro caratteristiche, risultano confortevoli nell'indossarli.

Condom

Materiale: sintetico o lattice

Fissaggio: autocollante oppure con il mastice adesivo per pelle.

Strisce adesive



A seconda dei modelli, le seguenti caratteristiche sono comuni ai nostri sistemi con condom.

11 misure diverse: Grazie all'ampia scala di diametri gradualmente differenziati (diametro 18–40 mm), è possibile un'applicazione ottimale del condom: quanto più precisa è la sua misura, tanto più sicura sarà la sua adesione al pene.

I materiali sintetici: del condom e dello strato adesivo interno (nei modelli autocollanti), sono privi di lattice, in modo da escludere a priori qualsiasi tipo d'irritazione cutanea o allergia provocate occasionalmente dal lattice.

I materiali altamente elastici: l'estrema elasticità – in particolare del lattice – fornisce, nel caso di minzioni spontanee di elevata quantità, una zona cuscinetto sufficiente, assicurando contemporaneamente una completa evacuazione dell'urina senza che vi sia ristagno in punta.

Spessore del materiale: Il condom diventa sempre più sottile nella parte anteriore, per garantire così un perfetto adattamento allo stato della pelle, che si traduce in una migliore capacità adesiva.

La punta del condom rinforzata: evita strappi del condom in caso di variazioni della pressione meccanica.

L'attaccatura a raccordo: viene spinta ovvero innestata direttamente al condom. È adatta ad ogni tipo di sacca di raccolta dell'urina – senza adattatore nel caso del tubicino di scarico delle sacche da gamba SAUER, cosicché può essere accorciato a piacere, garantendo un adattamento individuale – con adattatore per ogni altro tipo di sacca di raccolta dell'urina.

Il controllo al 100%

Per garantire a chi ne fa uso la sicurezza più ampia possibile, tutti i condom vengono controllati ad uno ad uno per testare la loro resistenza allo strappo e la loro ermeticità.

Consulenza, campioni, confezioni speciali

Avete domande riguardanti i condom? Desiderate ricevere campioni gratuiti? Avete esigenze individuali? Nel nostro laboratorio siamo in grado di produrre condom di diverse misure, in diversi materiali e speciali modelli. In particolare nel caso dei condom autocollanti sono possibili diverse varianti: posizione e lunghezza della zona collante, mastice adesivo con maggiore forza adesiva.

Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale specializzato.

Condom – autocollanti

SAUER-Comfort – Standard ► pag. 6

SAUER-Comfort – Confezioni speciali..... ► pag. 7

Condom senza zona cuscinetto ► pag. 9

Condom – fissaggio separato

Condom sintetici anallergici ► pag. 10

Condom in lattice – Originali..... ► pag. 11

Condom in lattice – Extra sottili ► pag. 11

Condom – Confezione combinata ► pag. 12

Modello autocollante: La zona adesiva all'interno del condom rende possibile un'applicazione facile e veloce garantendo un collegamento efficace tra condom e pelle.

La scelta del condom appropriato

Determinare innanzitutto con l'aiuto del misuratore a nastro (► pag.16) la misura del condom necessario. Usare dapprima i condom autocollanti "SAUER Comfort"; qualora i risultati non siano soddisfacenti, consigliamo di contattare un nostro consulente, che Vi aiuterà a scegliere i tipi di condom e/o di mastice adesivo per pelle più idonei.

Mastice adesivo per pelle SAUER

Il mastice adesivo per pelle liquido garantisce un'adesione più sicura tra pelle e condom. Rispetto ai condom autocollanti questo tipo di sostanza adesiva permette di soddisfare meglio le esigenze individuali, potendo determinare, a seconda delle proprie necessità, la quantità di mastice da applicare, la lunghezza della zona di adesione e la misura della "zona cuscinetto". I mastici adesivi per pelle SAUER proposti in diverse composizioni per ogni tipo di pelle, continuano a dare da oltre 30 anni ottimi risultati.

La sua composizione: risponde alle più attuali conoscenze in campo dermatologico. Il mastice adesivo per pelle viene proposto in diverse combinazioni, adattate alle esigenze cutanee individuali. Gli elementi base del mastice adesivo per pelle SAUER "Originali" sono caucciù mastizzato come adesivo, eptano come solvente per regolare la viscosità, ossido di zinco per ammorbidire e lanolina per curare la pelle.

L'azione collante: risulta diversa, a seconda dei tipi di prodotti e della loro composizione:

- I mastici 50.01 e 50.03 hanno una forza adesiva che nella maggior parte dei casi garantisce un'adesione del condom per 24 ore.
- Riducendo le sostanze nutrienti per la pelle contenute nel mastice, aumenta la forza adesiva (50.05 e 50.00).
- Elevando la quantità di resina contenuta nel mastice tipo "Originali", la capacità adesiva aumenta ulteriormente (50.20 e 50.22).

Produzioni speciali del mastice adesivo per pelle

In caso di domande riguardanti l'uso del mastice adesivo per pelle, rivolgetevi al nostro personale specializzato.

Articoli in lattice

Molti dei nostri Clienti confermano l'uso pluriennale dei condom in lattice dal sistema SAUER senza particolari reazioni cutanee. A favore del lattice parla anche il fatto che, rispetto ai materiali sintetici, presenta indiscussi vantaggi: si tratta infatti di un prodotto naturale praticamente inesauribile, ricavato dall'albero di caucciù, non inquinante sia nella produzione che nello smaltimento.

Non bisogna dimenticare che il caucciù sintetico e il silicone contengono un' elevata quantità di sostanze chimiche, i cui effetti non sono sufficientemente conosciuti. La produzione e la lavorazione del caucciù sintetico, un prodotto petrolifero, sono dispendiose a causa dell'alta quantità di sostanze solventi simili a benzina notevolmente problematiche sia per le persone addette alla produzione, sia per l'ambiente.

In caso di fondati dubbi riguardanti l'uso di condom contenenti lattice o del mastice adesivo per pelle oppure qualora sia stata constatata una relativa incompatibilità, potete sostituire con prodotti privi di lattice costituiti da materiali sintetici.

Maggiori informazioni riguardanti questo tema sono contenute nella nostra „Guida all'incontinenza”, che potete richiedere o scaricare dalla nostra Homepage:

www.manfredsauer.it

Resistenza all'acqua: I mastici adesivi per pelle permettono di indossare il sistema facendo il bagno o nuotando, senza che l'adesione ne risenta.

Nutrizione cutanea: Grazie all'aggiunta di sostanze nutrienti è possibile usare il sistema con condom 24 ore su 24.

Togliere il condom: Solitamente il mastice non lascia residui adesivi sulla pelle, perché il condom e il mastice sono creati l'uno per l'altro.

Tube con apertura a pipetta: Garantisce un'applicazione facile e pulita del mastice.

Mastice adesivo – SAUER.....	► pag. 13
Mastice adesivo speciale.....	► pag. 14
Fascette biadesive	► pag. 15
Accessori condom	► pag. 16
Cura e protezione della pelle.....	► pag. 17

Condom in lattice – Originali

Sono in caucciù naturale, centrifugato, privo di residui chimici. Pertanto sono adatti a qualsiasi tipo e condizione di pelle e vengono proposti come soluzione standard. Con attaccatura a raccordo inserita a spina. Disponibili in 11 misure.

Confezione da 30 pezzi

Tagliando di controllo giallo

Originali
Sperimentati da decenni!

Misura Ø	Nr. d'ord.
18 mm	53.18
20 mm	53.20
22 mm	53.22
24 mm	53.24
26 mm	53.26
28 mm	53.28
30 mm	53.30
32 mm	53.32
35 mm	53.35
37 mm	53.37
40 mm	53.40

Condom in lattice – Extra sottili

Con una pellicola di lattice extra sottile, possono essere usati come alternativa per soddisfare esigenze particolari. La loro resistenza allo strappo in prossimità dell' attaccatura a raccordo è minore rispetto ai tipi di condom standard. Con attaccatura a raccordo inserita a spina. Disponibili solo nelle seguenti misure:

Confezione da 30 pezzi

Tagliando di controllo verde

Misura Ø	Nr. d'ord.
26 mm	53.26.D
30 mm	53.30.D
35 mm	53.35.D
40 mm	53.40.D



~~18~~

~~20~~

~~22~~

~~24~~

~~26~~

~~28~~

~~30~~

~~32~~

~~35~~

~~37~~

~~40~~



Confezione combinata

i I condom per un fissaggio separato sono in vendita in una versione pronta per l'uso insieme ai più comuni mastici adesivi per pelle o alle fascette biadesive nella cosiddetta confezione combinata. Qualora abbiate domande, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro personale specializzato.

Condom sintetici con mastice adesivo per pelle

Confezione: 30 condom sintetici – Anallergici 56.xx

1 bottiglia (45 ml) mastice adesivo per pelle SAUER – Syn 50.36

Nr. d'ord. 56.36.xx

Confezione: 30 condom sintetici – anallergici 56.xx

1 tubo (28 g) mastice adesivo per pelle SAUER – Syn 50.36-2

Nr. d'ord. 56.36-2.xx

Condom in lattice con mastice adesivo per pelle

Confezione: 30 condom in lattice – Originali 53.xx

1 tubo (28 g) mastice adesivo per pelle SAUER – Originali 50.01

Nr. d'ord. 53C.xx

Condom in lattice con fascette biadesive

Confezione: 30 condom in lattice – Originali 53.xx

30 fascette biadesive – Extra sottili 50.14

Nr. d'ord. 53.14.xx

Confezione: 30 condom in lattice – Originali 53.xx

30 fascette biadesive – Espanso 50.04

Nr. d'ord. 53F.xx

- Completare il Nr. d'ordine con la misura del condom desiderata (diametro in mm) (p. es. 53C.30 oppure 56.36.30).



56.36.xx



56.36-2.xx



53C.xx



53.14.xx



53F.xx

Informazioni riguardanti i singoli componenti delle confezioni combinate

Condom sintetici anallergici	► pag. 10
Condom in lattice – Originali	► pag. 11
Mastice adesivo – SAUER.....	► pag. 13
Mastice adesivo speciale.....	► pag. 14
Fascette biadesive	► pag. 15

Mastice adesivo per pelle SAUER

Mastice adesivo per pelle SAUER – Originali

Questo tipo di mastice adesivo per pelle viene usato nella maggiorparte dei casi senza problemi, garantendo un eccellente fissaggio.

Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno

Nr. d'ord. 50.01

Mastice adesivo per pelle SAUER – Senza lanolina

In rari casi la lanolina può provocare reazioni cutanee. Questo tipo di mastice adesivo pur avendo tutte le caratteristiche del mastice adesivo "Originali", non contiene lanolina e rallenta perciò la rigenerazione di sostanze grasse della pelle!

Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno

Nr. d'ord. 50.03

Mastice adesivo per pelle SAUER – 50 %

La stessa formula del tipo "Originali" ma con 50 % in meno di ossido di zinco e lanolina, sostanze che esercitano un'azione protettiva sulla pelle, aumenta la capacità adesiva del mastice.

Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno

Nr. d'ord. 50.05

Mastice adesivo per pelle SAUER – Pura

Questo tipo di mastice adesivo non contiene sostanze protettive per la pelle. Essendo particolarmente forte, deve essere usato controllando accuratamente le condizioni della pelle.

Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno

Nr. d'ord. 50.00

Mastice adesivo per pelle SAUER – 2 % di resina

La stessa formula del tipo "Originali" con l'aggiunta del 2 % di resina, fa aumentare la capacità adesiva del mastice che deve pertanto essere usato controllando accuratamente le condizioni della pelle.

Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno

Nr. d'ord. 50.20

Mastice adesivo per pelle SAUER – 12 % di resina

La stessa formula del tipo "Originali" con l'aggiunta del 12 % di resina, fa aumentare ulteriormente la capacità adesiva del mastice. Usarlo con cautela, controllando accuratamente le condizioni della pelle.

Confezione: 2 tubi da 28 gr. ciascuno

Nr. d'ord. 50.22

La scelta del mastice appropriato

Un' indicazione su quale sia il mastice più idoneo, non può venir data in modo generalizzato, poiché ogni tipo di pelle reagisce diversamente. All'inizio è opportuno usare lo sperimentato mastice adesivo per pelle "Originali". Qualora non si raggiungano risultati soddisfacenti nonostante la sua corretta applicazione, si consiglia di provare altri tipi di mastice adesivo. Usando mastici con maggiore capacità adesiva è indispensabile tenere costantemente sotto controllo la reazione cutanea. Si raccomanda pertanto di rivolgersi al nostro personale specializzato.

