

CINTURE



CINTURE

Ausili per il contenimento ed il controllo posturale

Linea Flex	6
Linea Tecnica	12
Linea Comfort	18
Linea Mitico	22
Linea Standard	26
Elenco codici	29





CINTURE

Le cinture per il contenimento ed il controllo posturale

Primo passo per posizionare una persona con difficoltà di controllo del tronco in modo corretto su una carrozzina o un'unità posturale è la gestione della basculazione, che consente di variare l'assetto complessivo spostando il baricentro dell'utente e mantenendo inalterato l'angolo tra seduta e schienale: in questo modo può essere evitato lo scivolamento in avanti del bacino, una complicazione che può causare lesioni da frizioni e forze di taglio.

Tuttavia, se anche il basculamento non è sufficiente si può ricorrere all'utilizzo di cinture che consentono il contenimento puntuale del bacino e del tronco, senza comprimere, e che lasciano il giusto grado di libertà all'utilizzatore a seconda delle sue esigenze e capacità.

Seguendo gli specifici bisogni degli utilizzatori sono state progettate quattro linee di cinture, ognuna caratterizzata dall'utilizzo di materiali differenti per la composizione dell'imbottitura e da pad con varie forme e modelli, a seconda delle caratteristiche delle diverse linee:


LINEA FLEX: una serie di cinture morbide, molto confortevoli ma al contempo contenitive, realizzate in una speciale imbottitura elastica ottenuta unendo al neoprene altri materiali traspiranti.

LINEA TECNICA: serie sportiva e grintosa, che consente un controllo più sicuro grazie ai pad con imbottitura in espanso a cellula chiusa e agli inserti elastici che mantengono le cinture sempre a posto.

LINEA COMFORT: linea di cinture caratterizzate da pad con imbottitura molto confortevole, morbida e traspirante, destinate principalmente alle persone adulte.

LINEA MITICO: le cinture per i più piccoli, dai colori vivaci, che contengono il corpo del bambino senza costringerlo e gli lasciano libertà di compiere dei movimenti in libertà.

Ogni cintura delle diverse linee è caratterizzata da alcuni accorgimenti che permettono di indossare ogni articolo con molta semplicità, come ad esempio il

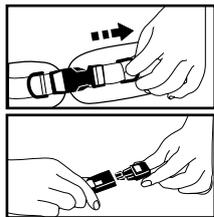

REGOLATORE FACILITATO, che consente una regolazione delle cinghie anche dopo che la cintura è stata indossata;


e lo **SGANCIO RAPIDO**, che permette di sganciare la cintura lasciando le cinghie fissate alla seduta e non modificandone la lunghezza.

Tutte le cinture vengono fornite con un sistema di aggancio universale non fisso, adatto a tutti i tipi di sedute, e con un sistema di fissaggio al telaio della carrozzina, che può essere montato in alternativa nel caso si necessiti di un aggancio più fermo.

FLEX


Appartengono a questa linea diversi modelli e taglie di cinture che hanno come caratteristica essenziale la **flessibilità unita alla tenuta ed al comfort**. Sapienti accostamenti di tessuti diversi hanno infatti permesso di ottenere un risultato veramente speciale: una elasticità misurata che consente piccoli movimenti ed aggiustamenti posturali, ma controllati.

Confortevolmente, queste cinture permettono alla persona di muoversi, ma la aiutano anche a "ritornare in posizione". Al neoprene, un "classico" della flessibilità, sono stati associati tessuti che ne controllano l'elasticità permettendo il movimento soltanto nelle direzioni volute e un materiale con anima in espanso a cellule aperte, permeabile all'aria, per disperdere la naturale umidità corporea e favorire un'eccellente traspirazione. L'ultimo strato, a contatto con l'utilizzatore, è in Sanygenical trattato in Hygienical, per mantenere nel tempo le caratteristiche di igiene.

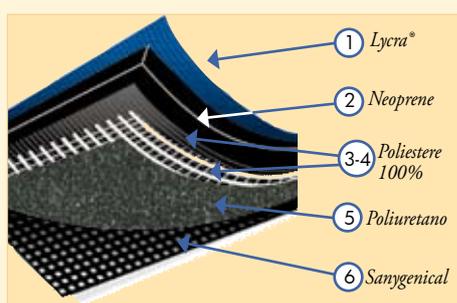

La superficie in Lycra® bielastica disponibile nei colori BLU e NERO (1) è facilmente lavabile e protegge lo strato più interno in Neoprene (2), un espanso a cellula chiusa di 3 mm di spessore ed estremamente elastico.

Seguono due strati in tessuto poliestere 100% (3-4), per garantire la tenuta in verticale e in orizzontale. Infine, lo strato di 2 mm di poliuretano a cellula aperta (5) permette il passaggio dell'aria e favorisce la traspirazione, mentre l'ultimo a contatto con l'utilizzatore, è in Sanygenical trattato in Hygienical (6), uno speciale tessuto antibatterico.

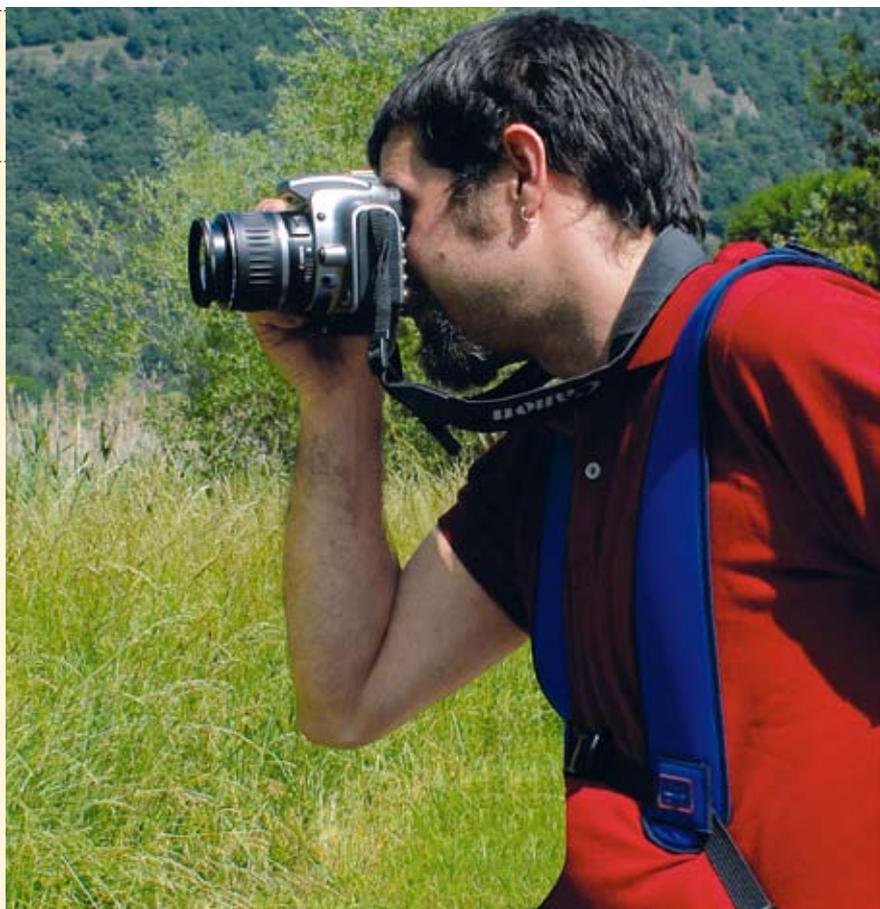

AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL TRONCO


BRETELLE CON CINTURA

codice 414001/2/3/4 blu

codice 414001N/2N/3N/4N nero

Nuovo modello che fascia le spalle e si adatta perfettamente alle forme dell'utilizzatore senza comprimere nessuna parte del torace. La particolare composizione elastica dell'imbottitura, inoltre, permette di effettuare delle minime inclinazioni in avanti mantenendo l'adeguato controllo del tronco.

Disponibile in diverse misure per soddisfare le necessità di bambini e adulti.

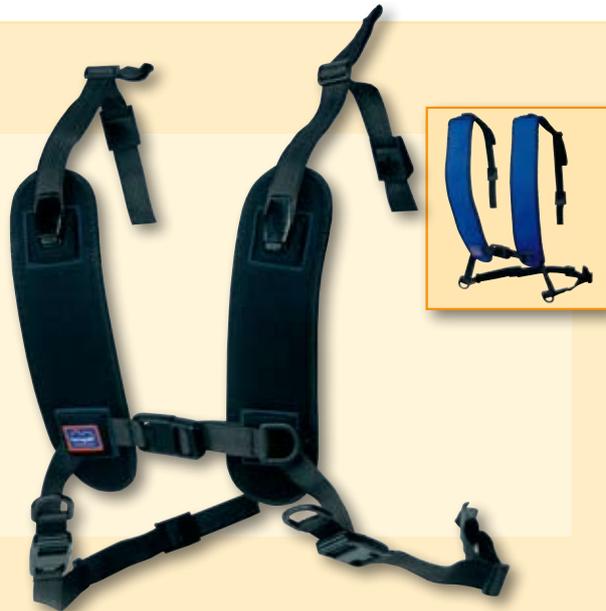

PETTORINA CON BRETELLE

codice 414101/2/3 blu

codice 414101N/2N/3N nero

Pettorina pensata per soddisfare le esigenze di tutti gli utilizzatori, dalle dimensioni più piccole alle più grandi. Il sostegno offerto dall'imbottitura segue perfettamente il corpo, senza comprimere il torace e senza rischiare di causare irritazioni o infiammazioni ed assicura una buona traspirazione delle parti coperte. Questo modello realizzato nella nuova imbottitura elastica, inoltre, consente di effettuare dei movimenti limitati, come ad esempio l'inclinazione in avanti del tronco, riportando poi il corpo nella giusta posizione.

Attenzione! Il modello è disponibile solo nella versione chiusa per mantenere le caratteristiche di elasticità dei pad. Per una pettorina con zip anteriore che ne permette l'apertura vedere nella sezione "Linea Tecnica".

PETTORINA A FARFALLA



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
BRETELLE CON CINTURA	414001 - 414001N	piccola	cm 26x6
	414002 - 414002N	media	cm 35x6
	414003 - 414003N	grande	cm 45x6
	414004 - 414004N	extra grande	cm 52x6
PETTORINA CON BRETELLE	414101 - 414101N	piccola	cm 42x28
	414102 - 414102N	media	cm 52x34
	414103 - 414103N	grande	cm 62x42

codice 414201/2/3 blu
codice 414201N/2N/3N nero

Una pettorina dal design speciale, che si adatta perfettamente alle forme femminili senza comprimerle e che non crea irritazioni lungo i bordi, grazie anche all'imbottitura Flex molto morbida. Questa pettorina risulta idonea anche per gli utilizzatori più sportivi, che necessitano di un controllo elastico e di maggiore libertà durante i movimenti.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
PETTORINA A FARFALLA	414201 - 414201N	piccola	cm 28x22
	414202 - 414202N	media	cm 40x29
	414203 - 414203N	grande	cm 50x32



**AUSILI PER IL CONTROLLO
POSTURALE DEL BACINO**

**DIVARICATORE ANATOMICO
A PRESA PELVICA**

codice 414301/2/3 blu
codice 414301N/2N/3N nero

Permette di stabilizzare meglio il bacino fasciando le cosce in modo morbido, senza comprimerle, e facilita l'intervento su eventuali asimmetrie. L'imbottitura morbida e flessibile, infatti, contiene in modo confortevole la persona evitando gli scivolamenti ma consente un minimo spostamento degli arti.



**CINTURA PELVICA A 45° A DUE
PUNTI CON PAD E FIBBIA IN
PLASTICA**

codice 414401/2/3/4 blu
codice 414401N/2N/3N/4N nero

Speciale cintura dotata di un sistema di aggancio universale a due punti. I pad nell'imbottitura Flex garantiscono una tenuta sicura ed elastica, lasciando una limitata possibilità di movimento all'utilizzatore senza costringerlo.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	PESO DELLA PERSONA
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA	414301 - 414301N	piccola	kg 15-35
	414302 - 414302N	media	kg 35-60
	414303 - 414303N	grande	kg 60-90

DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON FIBBIA IN PLASTICA	414401 - 414401N	piccola	cm 12x6
	414402 - 414402N	media	cm 16x6
	414403 - 414403N	grande	cm 21x6
	414404 - 414404N	extra grande	cm 27x6

**CINTURA PELVICA A 45°
 A QUATTRO PUNTI CON PAD
 E FIBBIA IN PLASTICA**

codice 414501/2/3/4 blu

codice 414501N/2N/3N/4N nero

Simile alla precedente, questa cintura grazie ai quattro punti di aggancio garantisce una maggiore sicurezza per quelle persone che più facilmente tendono a scivolare in avanti con il bacino. L'imbottitura elastica garantisce sempre un contenimento confortevole e non opprimente.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45° A QUATTRO PUNTI CON FIBBIA IN PLASTICA	414501 - 414501N	piccola	cm 12x6
	414502 - 414502N	media	cm 16x6
	414503 - 414503N	grande	cm 21x6
	414504 - 414504N	extra grande	cm 27x6





INDICAZIONI

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza dell'utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori, scegliete in base alla vostra esperienza, tenendo sempre

presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65	54/75	63/85	70/95
PICCOLA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MEDIA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GRANDE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EXTRA GRANDE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

COME EFFETTUARE UNA CORRETTA MANUTENZIONE

- Tutte le parti possono essere lavate ad acqua, a bassa temperatura (max 40°) a mano o in lavatrice con programma per tessuti delicati.
- Evitare l'uso di solventi o detersivi aggressivi, che possono danneggiare le cinghie e le parti in plastica, compromettendone la funzionalità.
- Il tessuto dei pad e delle pettorine è trattato Hygienical®; il trattamento è permanente e non si perde con i lavaggi, purché vengano rispettate le indicazioni.

ATTENZIONE:

nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile.

Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.

TECNICA

È una serie che possiamo definire **sportiva** sia per l'immagine **grintosa** dei modelli che per i materiali impiegati e per le speciali caratteristiche costruttive che permettono un controllo più accentuato dell'atteggiamento posturale.

I pad con imbottitura in cellula chiusa (morbidi ma sostenuti) e sapienti inserti elastici accrescono il comfort, danno una controllata libertà di movimento e mantengono "sempre a posto" le cinture.

All'interno, dal lato verso la persona, ogni pad è rivestito in Sanygenical trattato in Hygienical, per garantire le caratteristiche di igiene anche con un uso prolungato.

In questa linea troverete alcuni modelli anche nella versione con fibbia di sicurezza, specificatamente progettati per l'impiego su carrozzine elettroniche.



Gli inserti elastici posizionati all'altezza delle spalle assicurano una libertà di movimento più controllata e mantengono la cintura sempre nella corretta posizione.



AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL TRONCO

**BRETELLE CON CINTURA A 45°
codice 413001/2/3/4/5**

Bretelle adatte a soddisfare le esigenze di diversi utilizzatori, dalle taglie molto piccole alle grandi.

L'inserto elastico a livello delle spalle permette di eseguire dei movimenti controllati ed offre un sostegno sicuro. Sono quindi adatte a persone "attive", che necessitano di una maggiore libertà nei movimenti associata sempre ad un adeguato controllo.



**BRETELLE SAGOMATE
codice 413101/2/3**

Modello speciale di bretelle che lascia ampio spazio a livello della zona del collo, pur essendo adeguatamente contenitive: sono, infatti, caratterizzate da pad sagomati che seguono il torace con precisione, offrendo un comfort maggiore.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
BRETELLE CON CINTURA A 45°	413001	extra piccola	cm 25x4,5
	413002	piccola	cm 35x4,5
	413003	media	cm 38x5,5
	413004	grande	cm 45x5,5
	413005	extra grande	cm 53x5,5
BRETELLE SAGOMATE	413101	media	cm 35x6,5
	413102	grande	cm 42x6,5
	413203	extra grande	cm 48x6,5

PETTORINA A FARFALLA
codice 413201/2/3

Una pettorina dal disegno particolare, pensata per non comprimere le forme femminili e realizzata con tutti gli accorgimenti tipici di questa Linea, come l'insero elastico ad altezza dello sgancio, per ottenere un sostegno efficace e confortevole. Risulta molto apprezzata anche dagli utilizzatori più attivi o sportivi, che amano comfort e praticità associato ad un controllo sicuro.



PETTORINA CON BRETELLE E ZIP
codice 413901A/2A/3A

Un nuovo modello di pettorina con zip anteriore, che permette all'utilizzatore di aprirla e di spostarsi dalla carrozzina senza doverla sganciare dalle cinghie fissate all'ausilio. I pad imbottiti mantengono il tronco in posizione senza comprimerlo, grazie anche agli inserti elastici a livello delle spalle, mentre la particolare sagomatura lascia libera la zona diaframmatica.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
PETTORINA A FARFALLA	413201	piccola	cm 25x20
	413202	media	cm 34x30
	413203	grande	cm 37x40
PETTORINA CON BRETELLE E ZIP	413901A	media	cm 44x34
	413902A	grande	cm 52x42
	413903A	extra grande	cm 54x52

**AUSILI PER IL CONTROLLO
POSTURALE DEL BACINO**

**CINTURA PELVICA A 45° A 2 PUNTI
CON PAD CON FIBBIA IN PLASTICA
codice 413301/2/3/4
CON FIBBIA DI SICUREZZA
codice 413502/3/4**

Cintura con due punti di aggancio al telaio della carrozzina e pad imbottiti in cellula chiusa scorrevoli sulla cinghia, che possono essere posizionati in modo preciso dove si ha più necessità.

Disponibile nella versione con fibbia di plastica o di sicurezza, quest'ultima utile quando si necessita di un contenimento più sicuro, ad esempio se utilizzata su carrozzine elettriche o a motore a scoppio.



**CINTURA PELVICA A 45° A 4 PUNTI
CON PAD CON FIBBIA IN PLASTICA
codice 413601/2/3/4
CON FIBBIA DI SICUREZZA
codice 413702/3**

Cintura dotata di due pad imbottiti scorrevoli sulla cinghia principale e quattro punti di aggancio alla carrozzina, che permettono di distribuire meglio la tensione e di mantenere il più corretto posizionamento della cintura. In caso di utilizzo con carrozzine elettriche o a motore a scoppio consigliamo l'utilizzo della versione con fibbia di sicurezza.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON PAD FIBBIA IN PLASTICA	413301	piccola	cm 12x4,2
	413302	media	cm 16x4,2
	413303	grande	cm 21x6,5
	413304	extra grande	cm 27x6,5
CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON PAD FIBBIA DI SICUREZZA	413502	media	cm 16x6,5
	413503	grande	cm 21x6,5
	413504	extra grande	cm 27x6,5
CINTURA PELVICA A 45° A QUATTRO PUNTI CON PAD FIBBIA IN PLASTICA	413601	piccola	cm 12x4,2
	413602	media	cm 16x4,2
	413603	grande	cm 21x6,5
	413604	extra grande	cm 27x6,5
CINTURA PELVICA A 45° A QUATTRO PUNTI CON PAD FIBBIA DI SICUREZZA	413702	media	cm 16x6,5
	413703	grande	cm 21x6,5
	413704	extra grande	cm 27x6,5

CINTURA PELVICA A 45° A 2 PUNTI CON FIBBIA DI SICUREZZA, SENZA PAD
codice 413404

Cintura con due punti di aggancio al telaio della carrozzina e fibbia di sicurezza che la rende particolarmente idonea a carrozzine elettriche o a motore a scoppio. Disponibile in unica misura, extra grande, che può essere ridotta dall'utente semplicemente tagliandola.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	LUNGH. CINGHIA
CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON FIBBIA DI SICUREZZA, SENZA PAD	413404	extra grande	cm 170





INDICAZIONI

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza dell'utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori, scegliete in base

alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65	54/75	63/85	70/95
PICCOLA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MEDIA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GRANDE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EXTRA GRANDE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

COME EFFETTUARE UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Tutte le parti, con la sola eccezione delle fibbie di sicurezza, possono essere lavate ad acqua, a bassa temperatura (max 40°) a mano o in lavatrice con programma per tessuti delicati. Evitare l'uso di solventi o detersivi aggressivi, che possono danneggiare le cinghie e le parti in plastica, compromettendone la funzionalità. Il tessuto dei pad e delle pettorine è trattato Hygienical®; il trattamento è permanente e non si perde con i lavaggi, purché vengano rispettate le indicazioni.

ATTENZIONE:

nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile.

Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.

COMFORT

Espressamente progettata per offrire grande **comfort** assieme ad una altrettanto **grande praticità** di utilizzo e di manutenzione, è la linea di cinture specifica per persone adulte che privilegiano la comodità, pur mantenendo l'attenzione ad un aspetto decoroso e gradevole.

Realizzate in microfibra, un materiale traspirante e morbido dalla piacevole texture e facile da lavare, ha una soffice imbottitura in espanso a cellula aperta per lasciar respirare liberamente le parti del corpo a contatto e la fodera rivolta alla persona in Sanygenical trattato in Hygienical, uno speciale tessuto con un trattamento anallergico ed antibatterico che assicura il mantenimento nel tempo delle importanti caratteristiche di igiene.

Una linea di cinture, quindi, essenziali e pratiche ma che esprimono grande attenzione e competenza, realizzate con materiali di avanguardia, frutto di avanzate tecnologie!



AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL TRONCO

PETTORINA CON BRETELLE codice 403902/3 senza zip

Pettorina che consente il mantenimento di un buon assetto posturale, mantenendo il tronco eretto ma lasciando libera la zona diaframmatica anteriore grazie alla sua particolare conformazione, con aggancio a 45° bilaterale sulle creste iliache. La morbida imbottitura assicura un comfort ottimale ed una traspirazione adeguata anche con le taglie più grandi.



PETTORINA CON BRETELLE codice 403902A/3A con zip

Pettorina simile alla precedente, caratterizzata da una conformazione che permette il contenimento del tronco in modo confortevole, senza comprimere la zona diaframmatica anteriore, e realizzata con un'imbottitura che assicura una buona traspirazione. Questa versione è dotata di zip anteriore che permette di aprire il pad per effettuare con maggiore comodità i trasferimenti della persona.



AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL BACINO

DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA VERSIONE INTERO codice 406001/2/3

Cintura a presa pelvica con regolazione indipendente facilitata dei lembi di divaricazione per intervenire su eventuali asimmetrie. Realizzato in versione intera per assicurare un controllo maggiore e con imbottitura confortevole e molto traspirante, risulta apprezzato anche dagli utilizzatori di taglia molto robusta.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
PETTORINA CON BRETELLE	403902 - 403902A	media	cm 52x42
	403903 - 403903A	grande	cm 54x52

DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	PESO DELLA PERSONA
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA INTERO	406001	piccola	da kg 15 a kg 35
	406002	media	da kg 35 a kg 60
	406003	grande	da kg 60 a kg 90

**DIVARICATORE ANATOMICO
A PRESA PELVICA
VERSIONE CON DUE FASCE
codice 406011**

Simile al precedente, è realizzato in due fasce separate per ottimizzare l'intervento sulla divaricazione anche con particolari asimmetrie.

Molto confortevole e facile da regolare, è adatto anche a persone di taglia molto robusta.



**CINTURA POLIVALENTE
PER TRONCO
codice 404602/3**


Una cintura speciale, adatta alle persone che necessitano un sicuro e deciso controllo solo a livello del torace.

Dona grande sensazione di contenimento ed insieme libertà nei movimenti, senza risultare opprimente.




A seconda delle specifiche necessità, la cintura polivalente è utilizzabile in due modi:

con incrocio posteriore
per il controllo della caduta in avanti
e maggiore libertà laterale

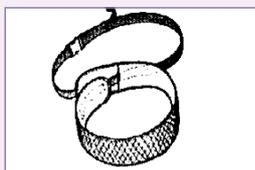

oppure

con incrocio anteriore
per il sostegno del tronco
ed un maggior contenimento laterale

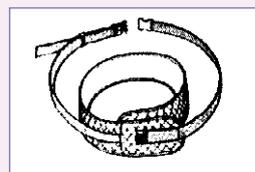

DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	PESO DELLA PERSONA
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA A DUE FASCE	406011	unica	da kg 35 a kg 90
CINTURA POLIVALENTE PER TRONCO	404602	media	da kg 35 a kg 60
	404603	grande	da kg 60 a kg 90

INDICAZIONI

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza dell'utilizzatore. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori, scegliete in base

alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme della persona e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65	54/75	63/85	70/95
ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
403902 MEDIA												
403903 GRANDE												
406001 PICCOLA												
406002 MEDIA												
406003 GRANDE												
406011 REGOLABILE												

COME EFFETTUARE UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Tutte le parti possono essere lavate ad acqua, a bassa temperatura (max 40°) a mano o in lavatrice con programma per tessuti delicati. Evitare l'uso di solventi o detersivi aggressivi, che possono danneggiare le cinghie e le parti in plastica, compromettendone la funzionalità. Il tessuto dei pad e delle pettorine è trattato Hygienical®; il trattamento è permanente e non si perde con i lavaggi, purché vengano rispettate le indicazioni.

ATTENZIONE:

nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile.

Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.

MITICO

Le cinture per i più piccoli!

Cinture nate dalla linea di Sistemi di Postura Mitico e progettate quindi appositamente per i bambini, che necessitano in modo particolare di contenimento soprattutto a livello del bacino senza limitazione dei movimenti. Sono, tuttavia, adatte anche ai ragazzi di taglia minuta.

Morbide, colorate e molto funzionali, sono realizzate accorpendo un'imbottitura traspirante in Dacron® a uno strato di Sanygenical trattato in Hygienical, un tessuto che consente di mantenere nel tempo le caratteristiche di igiene, molto importanti particolarmente per questa linea di cinture.



Pratiche, veloci da posizionare, molto resistenti, queste cinture hanno la particolarità di non limitare i movimenti ed allo stesso tempo di offrire il massimo del contenimento: per questo sono destinate ai più piccoli!



Il rivestimento esterno, molto colorato ed allegro, attira l'attenzione del bambino anche attraverso le sensazioni tattili che i diversi tessuti combinati rimandano.

AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL TRONCO

**BRETELLE CON CINTURA A 45°
codice 870301/2**

Speciale modello di bretelle dotato di cintura a 45°: la morbida imbottitura a livello del torace ne consente il contenimento senza ostacolare i movimenti del bambino, mentre la cintura a 45° evita lo scivolamento del bacino e mantiene le bretelle nella corretta posizione.



**PETTORINA CON BRETELLE
codice 870311/2**

Questa è una pettorina molto confortevole e funzionale, dotata di zip anteriore per consentire il trasferimento del bambino senza sganciarla dalla poltroncina. La sua particolare forma lascia libera la zona diaframmatica ma assicura un contenimento sicuro anche in caso di scarso controllo del tronco.



**PETTORINA CON BRETELLE
codice 881111/2/3 blu**

Speciale pettorina realizzata con un tessuto imbottito in Dacron® e rivestito nella parte a contatto con l'utilizzatore in Gore, un tessuto lavabile ed impermeabile ma molto traspirante.

La struttura contenitiva confortevole per l'utilizzatore, ha una particolare conformazione che lascia libera la regione diaframmatica controllando la parte alta del bacino. Dotata di apertura anteriore con zip, che consente di trasferire più facilmente il pad della pettorina dalle cinghie fisse sull'ausilio.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
BRETELLE CON CINTURA A 45°	870301	piccola	cm 25x6,5
	870302	media	cm 30x6,5
PETTORINA CON BRETELLE	870311	piccola	cm 27x28
	870312	media	cm 34x38
	881111	piccola	cm 25x28
	881112	media	cm 32x34
	881113	grande	cm 36x39

AUSILI PER IL CONTROLLO POSTURALE DEL BACINO

DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA
codice 870321/2

Molto confortevole e non "costrittivo", consente di agire sulla divaricazione facilitando l'intervento su eventuali asimmetrie e stabilizzando meglio il bacino del bambino.



DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA blu
codice 881391/2/3

Realizzato in tessuto imbottito e rivestito internamente in Gore, impermeabile e traspirante, questo divaricatore risulta molto confortevole per il bambino.

La regolazione indipendente delle due fasce di contenimento permette di intervenire facilmente sulle eventuali asimmetrie, controllando la divaricazione e stabilizzando il bacino del bambino.



CINTURA PELVICA A 45° A DUE PUNTI CON PAD E FIBBIA IN PLASTICA
codice 870303/4

Una cintura che permette il controllo puntuale del bacino senza costrizioni per il bambino.

Infatti, con due punti di aggancio al sistema di postura o della carrozzina, impedisce lo scivolamento in avanti in modo puntuale senza opprimere il bambino, che mantiene quindi la libertà di muoversi.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	PESO DELLA PERSONA
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA	870321	piccola	da kg 15 a kg 30
	870322	media	da kg 25 a kg 50
DIVARICATORE ANATOMICO A PRESA PELVICA BLU	881391	piccola	da kg 15 a kg 35
	881392	media	da kg 25 a kg 55
	881393	grande	da kg 40 a kg 80

DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	DIMENSIONE PAD
CINTURA PELVICA A 45°	870303	piccola	cm 12x6,5
	870304	media	cm 16x6,5



INDICAZIONI

COME INDIVIDUARE LA TAGLIA

Indichiamo una tabella di riferimento che vi permetterà di individuare la taglia più corretta sulla base del peso e dell'altezza del bambino. Nel caso in cui i parametri rilevati si discostassero molto da questi valori, scegliete in base

alla vostra esperienza, tenendo sempre presente il fatto che le parti imbottite devono essere adeguate alle forme del bambino e coprire le sue asperità ossee, mentre la lunghezza delle cinghie è ampiamente e facilmente modificabile.

PESO KG	9/14	11/17	14/20	17/23	21/28	25/35	30/45	37/55	45/65
ALTEZZA CM	80	90	100	110	120	130	140	150	160
PICCOLA									
MEDIA									

COME EFFETTUARE UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Tutte le parti possono essere lavate ad acqua, a bassa temperatura (max 40°) a mano o in lavatrice con programma per tessuti delicati. Evitare l'uso di solventi o detersivi aggressivi, che possono danneggiare le cinghie e le parti in plastica, compromettendone la funzionalità.

Il tessuto dei pad e delle pettorine è trattato Hygienical®; il trattamento è permanente e non si perde con i lavaggi, purché vengano rispettate le indicazioni.

ATTENZIONE:

nessuna delle cinture Fumagalli può sostituire la cintura di sicurezza per l'automobile.

Le cinture possono essere usate per controllare ed aiutare la posizione seduta anche sul sedile dell'automobile, ma devono essere integrate da quelle di sicurezza.

STANDARD

Una serie di sistemi di contenimento semplici da posizionare e da gestire, utilizzabili quando si ha la necessità di evitare le cadute involontarie della persona e non si ha il bisogno specifico di un controllo posturale. Realizzate in materiali resistenti e dotate di sistema di chiusura a sgancio rapido.



SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVIGLIA

codice 413801/2/3

Un sistema confortevole ed efficace per mantenere il piede in posizione.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	CIRCONFERENZA CAVIGLIA
SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVIGLIA	413801	piccola	da cm 15 a cm 23
	413802	media	da cm 21 a cm 28
	413803	grande	da cm 24 a cm 32

**CINTURA A Y CON BRETELLE
codice 404300**

Regolabile, viene fornita completa di quattro pad protettivi scorrevoli, che possono essere posizionati sulle spalle o in vita.



**CINTURA CON BRETELLE
E CHIUSURA DI SICUREZZA
codice 404501 - 404502**

Nuovo sistema di contenimento, con sistema di chiusura dotato di fibbia di sicurezza. Dotato di pad protettivo anteriore che permette un contenimento più sicuro.



DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA	MISURA PAD
CINTURA A Y CON BRETELLE	404300	adattabile a tutte	-
CINTURA CON BRETELLE E CHIUSURA DI SICUREZZA	404501	misura piccola	cm 20x21
CINTURA CON BRETELLE E CHIUSURA DI SICUREZZA	404502	misura media	cm 27x25

PAD AGGIUNTIVO Codice 413510/1/2/3/4

PAD AGGIUNTIVO	CODICE	TAGLIA	MISURA PAD
	413510	mini	cm 12x4,2
	413511	piccola	cm 16x4,2
	413512	media	cm 16x6,5
	413513	grande	cm 21x6,5
	413514	extra grande	cm 27x6,5

**CINTURA PETTORALE
CON FIBBIA IN PLASTICA
codice 404800
CON FIBBIA DI SICUREZZA
codice 404900**

Quando non si hanno particolari necessità, queste cinture offrono un valido ausilio contro cadute accidentali.



**CINTURA PETTORALE CON PAD
codice 405101/2/3/4**

Regolabile, viene fornita completa di pad protettivo scorrevole. La misura più grande è adatta per l'utilizzo su tavoli da statica.




DESCRIZIONE	CODICE	TAGLIA
CINTURA PETTORALE CON FIBBIA IN PLASTICA	404800	adattabile a tutte le taglie
CINTURA PETTORALE CON FIBBIA DI SICUREZZA	404900	adattabile a tutte le taglie

DESCRIZIONE	CODICE	LUNGH. MAX CINGHIA	MISURA PAD
CINTURA PETTORALE CON PAD	405101	cm 140	cm 25x9
	405102	cm 160	cm 30x9
	405103	cm 180	cm 40x11
	405104	cm 200	cm 58x13

Le linee e i modelli



Ogni linea di cinture è stata progettata seguendo le specifiche necessità rilevate ed associando a queste materiali e caratteristiche strutturali differenti. Per questo motivo ogni linea presenta modelli di forme e dimensioni diverse, che meglio rispondono ai materiali impiegati ed ai particolari distintivi di ogni linea.

CONTENIMENTO DEL TRONCO

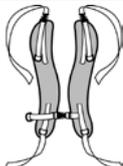	MODELLO	LINEA FLEX	LINEA TECNICA	LINEA COMFORT	LINEA MITICO
BRETELLE CON CINTURA		414001 blu 414002 blu 414003 blu 414004 blu 414001N nero 414002N nero 414003N nero 414004N nero	413001 413002 413003 413004 413005		870301 870302
BRETELLE SAGOMATE			413101 413102 413103		
PETTORINE A FARFALLA		414201 blu 414202 blu 414203 blu 414201N nero 414202N nero 414203N nero	413201 413202 413203		
PETTORINE CON BRETELLE		414101 blu 414102 blu 414103 blu 414101N nero 414102N nero 414103N nero	con zip 413901A 413902A 413903A	senza zip 403902 403903 con zip 403902A 403903A	870311 870312 881111 881112 881113
CINTURA POLIVALENTE				404602 404603	

LINEA STANDARD	CINTURA A Y CON BRETELLE	404300
	CINTURA CON BRETELLE E CHIUSURA DI SICUREZZA	404400
	CINTURA PETTORALE CON FIBBIA IN PLASTICA	404800
	CINTURA PETTORALE CON FIBBIA DI SICUREZZA	404900
	CINTURA PETTORALE CON PAD	405101/2/3/4
	SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVIGLIA	413801/2/3

CONTENIMENTO DEL BACINO

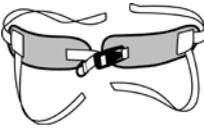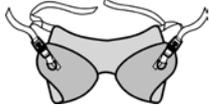MODELLO		LINEA FLEX	LINEA TECNICA	LINEA COMFORT	LINEA MITICO
CINTURA 2 PUNTI FIBBIA IN PLASTICA E PAD		414401 blu 414402 blu 414403 blu 414404 blu 414401N nero 414402N nero 414403N nero 414404N nero	413301 413302 413303 413304		870303 870304
CINTURA 2 PUNTI FIBBIA DI SICUREZZA E PAD			413502 413503 413504		
CINTURA 4 PUNTI FIBBIA IN PLASTICA E PAD		414501 blu 414502 blu 414503 blu 414504 blu 414501N nero 414502N nero 414503N nero 414504N nero	413601 413602 413603 413604		
CINTURA 4 PUNTI FIBBIA DI SICUREZZA E PAD			413702 413703 413704		
CINTURA 2 PUNTI FIBBIA DI SICUREZZA SENZA PAD			413404		
DIVARICATORE INTERO		414301 blu 414302 blu 414303 blu 414301N nero 414302N nero 414303N nero		406001 406002 406003	870321 870322 881391 881392 881393
DIVARICATORE A DUE FASCE				406011	



Fumagalli srl
Piazza Puecher 2
22037 Ponte Lambro (CO)
Tel. (+39) 031 33 56 811
Fax (+39) 031 622 111
www.fumagalli.org