

Scoiattolo 2000


PRODOTTO
IN ITALIA



Scoiattolo 2000

Scoiattolo 2000, poltrona **montascale mobile a ruote**, è stato realizzato per consentire alle persone con difficoltà motorie di superare le barriere architettoniche in modo semplice.

Caratterizzato da un sistema di **movimentazione elettrica** unico nel suo genere, non richiede alcuna applicazione fissa a parete e necessita semplicemente della presenza di un accompagnatore, che guidi il mezzo e impartisca i comandi di salita e discesa tramite gli appositi pulsanti.

Le due ruotine anteriori piroettanti, ne permettono inoltre l'utilizzo in piano come una normale carrozzina a spinta.

Il montascale **Scoiattolo 2000** è dotato di seduta confortevole, ergonomica, con materiale a densità differenziata e con rivestimento ignifugo antimacchia. La seduta è corredata con doppi braccioli alzabili, poggiatesta e poggipiedi regolabili per una corretta postura del trasportato.

Scoiattolo 2000 è stato realizzato in **due versioni** che si differenziano per le dimensioni della seduta: 2000/L (Largo) e 2000/S (Stretto).

TGR, sempre attenta alle **esigenze del cliente**, mette a disposizione tutta la propria esperienza offrendo i seguenti **servizi**:

- **Sopralluogo dimostrativo senza impegno di acquisto** e relativa consulenza finalizzata ad una scelta consapevole dell'ausilio più adatto alle specifiche esigenze.
- **Educazione all'uso** presso il luogo di utilizzo.
- **Servizio di assistenza tecnica post-vendita** presso centri autorizzati T.G.R. presenti sul territorio nazionale.



Scoiattolo 2000

SCOIATTOLO 2000/ L (Largo - Cod. GE1000) - 2000/ S (Stretto - Cod. GE2000)

Montascale mobile a ruote ideato per poter offrire una seduta confortevole e consentire il superamento delle barriere architettoniche con l'aiuto di un accompagnatore. Le due ruote di piccolo diametro piroettanti poste anteriormente, ne permettono anche l'utilizzo in piano come una normale carrozzina a spinta.

Per renderlo maggiormente versatile, Scoiattolo 2000 è stato realizzato in due versioni che si differenziano per le dimensioni della seduta: 2000/L (Largo), 2000/S (Stretto).

Risparmio energetico: spegnimento automatico dopo alcuni minuti di inutilizzo.



Ruote Ø 200 - Ø 225



Disponibile versione con pedane separate





Problemi mentre sali le scale? **Niente paura!**

Cavalletto d'appoggio che consente di posizionare il mezzo in assoluta **stabilità** sulla scala in caso di emergenza.



Salvaguardia per la tua **sicurezza.**

Interruttore a chiave per assicurare l'utilizzo da parte delle sole **persone autorizzate.**

Ricerca del massimo **comfort.**

Disponibile la versione con **pedane separate***.




Oltre la sicurezza anche **rispetto** per la tua abitazione.

Ruote in gomma **antisdrucchiolo** ed **antitraccia.**


* Su richiesta

DIMENSIONI SCOIATTOLO 2000

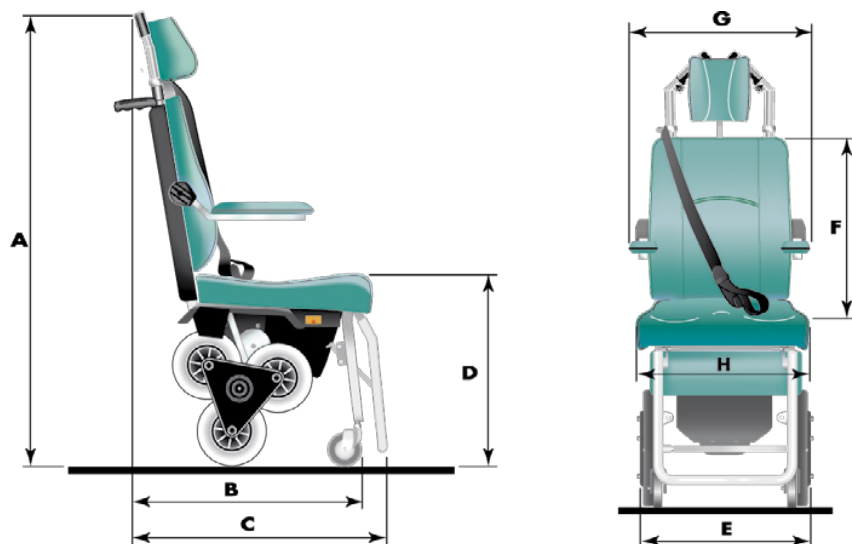

	2000/S (Stretto)	2000/L (Largo)
A	120	120
B	62	62
C	80	80
D	56	56
E	42,5	42,5
F	53	53
G	49	54
H	40	44
 Kg	60	60

SPAZI MINIMI DI MANOVRA

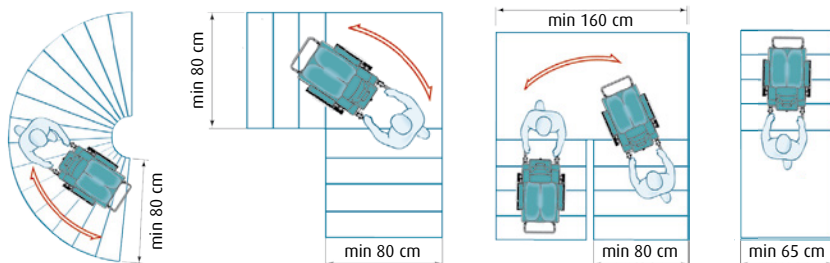

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso massimo trasportabile **130 kg**;
- Sistema elettronico che gestisce la fase di marcia, mantenendo costante la velocità in **entrambi i sensi di marcia**;
- Velocità di salita per gradino **3 sec**;
- Batteria ricaricabile **12V 26Ah**, sigillata al piombo, senza manutenzione;
- Motore **12V 150W**;
- Autonomia di salita: **70 piani**, con massimo peso trasportabile;
- Indicatore dello stato di carica della batteria durante la marcia;
- **Caricabatteria esterno**;
- Led bicolore indicante il raggiungimento dello stato di carica della batteria durante la fase di ricarica;
- Freno elettromagnetico negativo ad inserimento automatico attivo sul triangolo di movimentazione;
- Freno ad inserimento automatico che agisce sulle ruote di ciascun grappolo;
- **Dispositivo di sicurezza** che interviene, in caso di anomalia, sul sistema di trasmissione bloccando il movimento del mezzo;
- Cavalletto d'appoggio che consente di posizionare il mezzo in assoluta stabilità sulla scala in caso di emergenza;
- Manici di guida regolabili in altezza;
- Braccioli alzabili;
- Comandi elettrici di marcia posizionati sui manici di guida;
- **Pulsante d'emergenza**;
- Pulsanti di accensione e spegnimento;
- Profondità minima del gradino: **12 cm**;
- Altezza del gradino compresa tra **4 - 20 cm**;
- A richiesta versione per il superamento di gradini di altezza fino a **24 cm**;
- **Mezzo con interruttore a chiave di abilitazione**;
- Spazio minimo di manovra su pianerottolo a forma di L: **80x80 cm**;
- Spazio minimo di manovra su pianerottolo a forma di U: **80x160 cm**;
- Larghezza minima della scala **65 cm**;
- Inclinazione massima superabile su scala di tipo diritto **40°** pari al **84%** di pendenza;
- Raggio minimo della scala a chiocciola **130 cm**;
- Inclinazione massima della carreggiata interna utile sulla scala a chiocciola **40°**, pari ad una pendenza del **84%**;
- Durante l'utilizzo su scale, l'accompagnatore non deve lasciare il montascale, eccetto che in casi d'emergenza;
- Ruote antidrucciolo e antimacchia;
- Poltrona con imbottitura anatomica a differente densità con rivestimento ignifugo antimacchia;
- Cintura di sicurezza;
- **Segnalatore acustico**: dispositivo elettrico di segnalazione, attivo durante la marcia, nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente.
- **Garanzia: 24 mesi.**

T.G.R. si riserva, nell'evoluzione tecnica dei suoi prodotti, di modificare gli articoli illustrati. Le immagini e i dati riportati potranno quindi subire variazioni.

NB: Nell'uso seguire attentamente e attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni e avvertenze riportate sul libretto di istruzioni.



TGR srl

Via Lombardia, 12 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - Italy

Telefono: 051 6523511

www.tgr.it - email: tgr@tgr.it

T.G.R. GmbH

Löffelholzstraße 20, Haus 8 Ost

90441 Nürnberg - Germany

Tel. (+49) 0911 94184700 - Fax (+49) 0911 94184701

<http://www.tgr-deutschland.de>

e-mail info@tgr-deutschland.de