



EUROAUSILI
SISTEMI E ACCESSORI ANTIDECUBITO



LINEA TERAPEUTICA

EURO SOFT

EURO SOFT PRO
EURO SOFT EVO
EURO SOFT




sistemi antidecubito a bassa pressione alternata con compressore elettronico per regolazione automatica.

LINEA TERAPEUTICA EURO SOFT



MATERASSO EURO SOFT PRO

- 20 elementi ad aria realizzati in nylon-poliuretano con sezione a otto singolarmente sostituibili
- Celle di testa statiche
- Base di sicurezza in poliuretano espanso
- Sensore di inclinazione per regolazione pressioni automatico che evita l'effetto di sprofondamento
- Funzione trasporto: scollegato dal compressore il materasso rimane gonfio per 12 ore
- Presenza CPR sulla testa del materasso
- Superficie completamente radiotrasparente
- Rivestimento con ioni d'argento, impermeabile ai liquidi, traspirante al vapore acqueo, ignifugo, batteriostatico e facilmente sanificabile


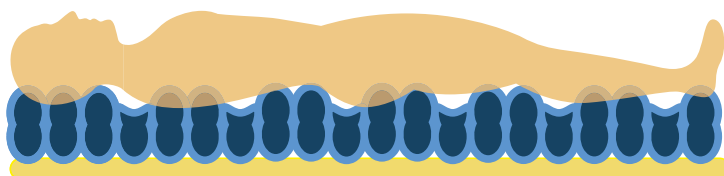


Funzionamento

Il principio di funzionamento di Euro Soft Pro è quello della bassa pressione alternata o statica. In modalità dinamica, il compressore gonfia in maniera alternata due di tre elementi consecutivi, ad eccezione dei tre elementi di testa che restano sempre statici per evitare movimenti fastidiosi al paziente. Il ciclo dinamico prevede lo scarico di un elemento su tre ogni 3 minuti, più un minuto in cui gli elementi sono alla stessa pressione, per una durata complessiva del ciclo di 10 minuti. In modalità statica, tutti gli elementi del materasso sono gonfi alla stessa pressione. In caso di emergenza è possibile sgonfiare rapidamente il materasso mediante la valvola CPR posta alla testa del sistema.



SENSORI

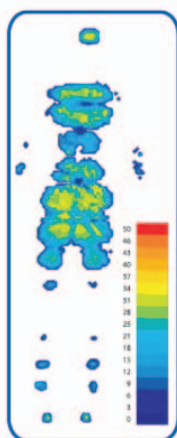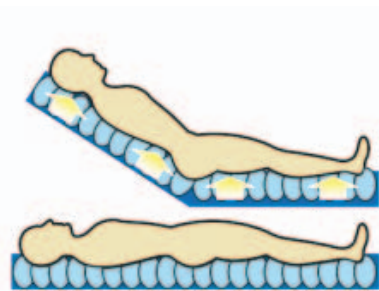

Sensori di inclinazione

Il sensore di inclinazione inserito all'interno del materasso consente al compressore elettronico di adeguare automaticamente il gonfiaggio ottimale in funzione della postura del paziente.

COMPRESSORE



- Regolazione elettronica delle pressioni di gonfiaggio
Permette il funzionamento alternato su 3 vie
- Funzione statica
- Funzione di gonfiaggio massimo (per facilitare operazioni di nursing)
- Blocco tastiera automatico
- Allarme acustico-visivo di mal funzionamento
- Spia di manutenzione
- Allarme per assenza rete opzionale
- Funzionamento poco rumoroso
- Basso consumo elettrico



PIELLE
Sistemi e accessori antidecubito



Management System
ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2012



www.tuv.com
ID 9105025193

LINEA TERAPEUTICA

EURO SOFT




Funzionamento

Il principio di funzionamento di Euro Soft è quello della bassa pressione alternata o statica. In modalità dinamica, il compressore gonfia in maniera alternata due di tre elementi consecutivi, ad eccezione dei tre elementi di testa che restano sempre statici per evitare movimenti fastidiosi al paziente. Il ciclo dinamico prevede lo scarico di un elemento su tre ogni 3 minuti, più un minuto in cui gli elementi sono alla stessa pressione, per una durata complessiva del ciclo di 10 minuti. In modalità statica, tutti gli elementi del materasso sono gonfi alla stessa pressione. In caso di emergenza è possibile sgonfiare rapidamente il materasso mediante la valvola CPR posta alla testa del sistema.


MATERASSO EURO SOFT

- 17 elementi ad aria realizzati in nylon-poliuretano con sezione circolare singolarmente sostituibili
- Celle di testa statiche
- Sensore di inclinazione per regolazione pressioni automatico che evita l'effetto di sprofondamento
- Funzione trasporto: scollegato dal compressore il materasso rimane gonfio per 12 ore
- Presenza CPR sulla testa del materasso
- Superficie completamente radiotrasparente
- Rivestimento con ioni d'argento, impermeabile ai liquidi, traspirante al vapore acqueo, ignifugo, batteriostatico e facilmente sanificabile

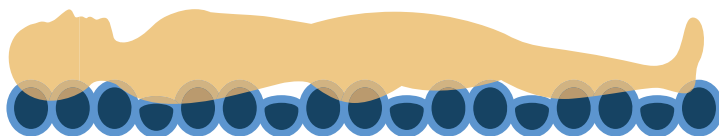

MATERASSO EURO SOFT EVO

- 17 elementi ad aria realizzati in nylon-poliuretano con sezione circolare singolarmente sostituibili
- Celle di testa statiche
- Base di sicurezza in poliuretano espanso
- Sensore di inclinazione per regolazione pressioni automatico che evita l'effetto di sprofondamento
- Funzione trasporto: scollegato dal compressore il materasso rimane gonfio per 12 ore
- Presenza CPR sulla testa del materasso
- Superficie completamente radiotrasparente
- Rivestimento con ioni d'argento, impermeabile ai liquidi, traspirante al vapore acqueo, ignifugo, batteriostatico e facilmente sanificabile

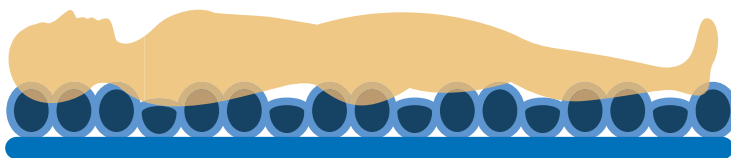

Funzionamento

Il principio di funzionamento di Euro Soft Evo è quello della bassa pressione alternata o statica. Il principio di funzionamento è lo stesso presentato dal sistema Euro Soft.

PIELLE
AUSILI
Sistemi e accessori antidecubito



Management System
ISO 9001:2008
EN ISO
13485:2012
www.tuv.com
ID 9105628193



LINEA TERAPEUTICA EURO SOFT

SPECIFICHE TECNICHE LINEA EURO SOFT			
Sistema	Euro Soft	Euro Soft Evo	Euro Soft Pro
Tipo di superficie	Sovramaterasso	Materasso	Materasso
Peso e dimensioni da gonfio standard	5 Kg, 200 x 90 x 13 cm disponibile anche in differenti misure (es. larghezza 80 – 85 cm)	5 Kg, 200 x 90 x 18 cm disponibile anche in differenti misure (es. larghezza 80 – 85 cm)	5 Kg, 200 x 90 x 23 cm disponibile anche in differenti misure (es. larghezza 80 – 85 cm)
Caratteristiche elementi gonfiabili	Nylon-poliuretano Sezione circolare	Nylon- Poliuretano sezione circolare	Nylon- Poliuretano sezione a otto
Tempo sgonfiaggio di emergenza (CPR)	10 secondi	10 secondi	10 secondi
Tempo gonfiaggio iniziale	30 minuti	30 minuti	30 minuti
Cover di rivestimento	Poliestere spalmato di poliuretano con ioni d'argento. Elastica nelle due direzioni, impermeabile ai liquidi e traspirante all'aria e al vapore acqueo, ignifuga, batteriostatica e antimicotica. Lavabile e facilmente sanificabile		
Caratteristiche tecniche del compressore	Alimentazione: 220-230 V AC – 50 Hz Potenza assorbita: 15 VA Fusibile: 250V, T500mA, 5 mm Classe di protezione elettrica: II Tipo di parte applicata: B Dimensioni: 27 x 23 x 13 cm Peso: 2 Kg Massima rumorosità a 1m di distanza: 25 dB:		
Conformità	Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e s.m.i		
Garanzia	2 anni		

PARTICOLARI TECNICI

Maniglia di fissaggio adattabile a qualsiasi letto, che scompare nel fondo a compressore sdraiato

Facile connessione compressore superficiale. Tubi con valvole di non ritorno per garantire la funzione trasporto.

Manopola CPR per lo sgonfiaggio rapido della superficie.



PIELLE
Sistemi e accessori antidecubito



Management System
ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2012
www.tuv.com
ID: 9105028193

