


Helix HD

Manuale Utente

Italiano, Versione 1.0.2A

HELIX HD

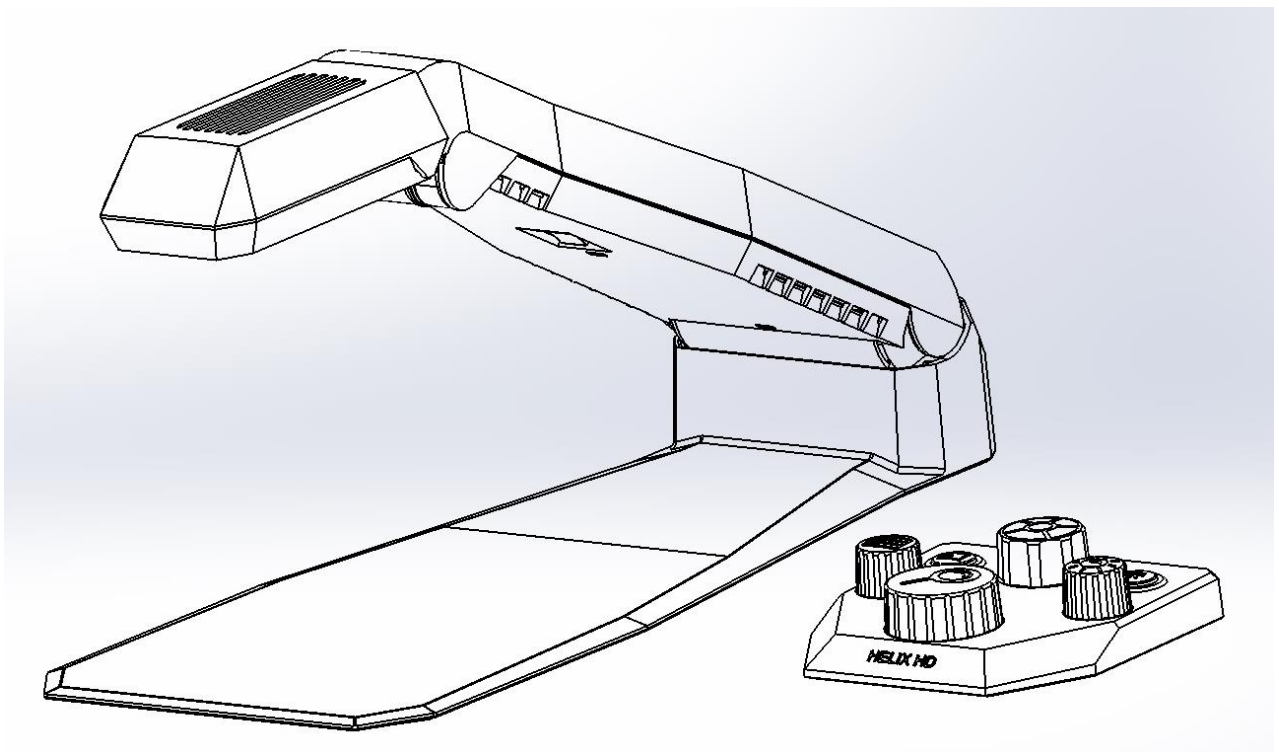

VisionAid International

Copyright (C) 2008-2017, VisionAid International Ltd, all rights reserved.

Table of Contents

Introduzione.....	4
Programma di Miglioramento	4
Email:	4
Posta:	4
Telefono:	4
Diritti e Proprietà intellettuale	5
Avvertenze di Sicurezza.....	6
Linee Guida di Sicurezza per portatori di Pacemaker	6
Linee Guida di sicurezza generali.....	6
Contenuto della Confezione	7
Apertura.....	8
Preparazione all'utilizzo.....	8
Apertura dell'Helix HD.....	9
Chiusura dell'Helix HD per il trasporto	10
Collegamento:	11
Collegamento di uno schermo	11
Selettore connessione HDMI	12
Collegamento alimentazione	12
Inserire le batterie nel Control Pad.....	13
Accensione e Spegnimento.....	13
Posizionare dei documenti	14
Regolare l'altezza della telecamera	14
Abbassare la testa della telecamera (ingrandimento elevato).....	14
Alzare la telecamera (basso ingrandimento)	14
Tasierino di Controllo Wireless (Control pad).....	15
Copertura Magnetica	15
Ingrandimento	16

Colori.....	16
Contrasto	17
.....	17
Guide di Lettura	17
Selezione sorgente	18
Impostazioni.....	18
Settings Menu Layout.....	19
Impostazioni.....	19
Guide di Lettura (Linee e Tendine).....	19
Luminosità dello schermo (10 - 100)	20
Combinazioni di Colori Personalizzate.....	20
Dimensioni testo dei Menù (1-20)	20
Lingua.....	20
Stato batteria del Control Pad (0-100%)	20
Impostazioni Avanzate	21
Informazioni su Helix HD	22
Uscita	22
Aggiornare il vostro Helix HD.....	23
Download	23
Preparare la chiavetta USB.....	23
Collegare la chiavetta UBS all'Helix HD	23
Installare gli aggiornamenti	23
Consigli e Suggerimenti – Risoluzione dei problemi	24
L'unità non si accende	24
Sullo schermo non compare nulla	24
L'immagine visualizzata non cambia	24
Sullo schermo compaiono macchie o imperfezioni.....	24
Il dispositivo non mette a fuoco correttamente	25
Il Control pad non funziona.....	25

Ripristino alle impostazioni di fabbrica.....	25
Termini e condizioni di vendita	26
Appendice A: Informazioni Tecniche.....	27

Introduzione

Congratulazioni per aver scelto il video ingranditore da tavolo Helix HD.

L'esclusivo sistema a doppia telecamera dell'Helix HD offre una gamma di ingrandimenti incredibilmente ampia, da 2 a 300 volte (correlata anche alla dimensione del monitor utilizzato), rendendolo la soluzione ideale sia per chi necessita di aver inquadrata l'intera pagina, sia per chi preferisce livelli di ingrandimento molto elevati. Il collegamento tramite porta HDMI lo rende compatibile con qualsiasi display (schermi TV o monitor per computer).

L'Helix Hd è inoltre dotato di un tastierino di controllo wireless semplice ed intuitivo, per offrire la massima semplicità di utilizzo.

Programma di Miglioramento

Chi, più di voi che usate quotidianamente i nostri prodotti, può aiutarci a svilupparne e migliorarne le caratteristiche? Se doveste avere idee e suggerimenti, non importa quanto piccoli, non esitate a contattarci

Email:

suggestions@visionaid.com

Posta:



Helix HD Suggestions
VisionAid International Ltd.
Bridge Lodge
Spalding
Lincolnshire
PE11 3AU
United Kingdom

Telefono:

+44 (0) 1775 711 977

Vi ringraziamo anticipatamente, e vi auguriamo un piacevole utilizzo del vostro nuovo video-ingranditore Helix HD!

Diritti e Proprietà intellettuale

Il software installato sull'Helix HD fa uso di librerie software di terze parti, che sono distribuite sotto le loro rispettive licenze.

Copyright (C) 2009-2016 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Copyright (C) 2000-2015, Intel Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2009-2011, Willow Garage Inc., all rights reserved.

Copyright (C) 2009-2015, NVIDIA Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2010-2013, Advanced Micro Devices, Inc., all rights reserved.

Copyright (C) 2015, OpenCV Foundation, all rights reserved.

Copyright (C) 2015, Itseez Inc., all rights reserved.

Copyright (C) 2015 The Qt Company Ltd.

I copyright delle terze parti sono dei rispettivi proprietari.

Avvertenze di Sicurezza

Linee Guida di Sicurezza per portatori di Pacemaker

Non utilizzare l'Helix HD vicino ad apparecchiature mediche non adeguatamente schermate.

Ci sono due magneti posizionati nella base dell'Helix HD e tre magneti posizionati all'interno del nel tastierino di controllo Wireless (Control Pad). Si tratta di Magnetite al Neodimio N42 22 x 11 x 2 mm.

Se siete portatori di Pacemaker non avvicinate nessuno di questi componenti al vostro petto.

Linee Guida di sicurezza generali


- Maneggiare l'Helix HD con cura, in quanto un utilizzo scorretto potrebbe causare danni ai componenti interni e l'annullamento della garanzia.
- Assicurarsi sempre di utilizzare l'apparecchio in condizioni di temperatura comprese fra 10° e 35° C. Non esporlo ad eccessivo calore, freddo o luce solare diretta.
- Mantenere l'apparecchio lontano da aree bagnate, pioggia o da altre superfici con liquidi, elevata umidità o reagenti chimici. Non immergere l'apparecchio in nessun tipo di liquido.
- In caso di malfunzionamenti non tentare di riparare l'apparecchio; ogni tentativo di riparazione non autorizzato comporterà l'annullamento della garanzia. In caso di malfunzionamenti, contattate il vostro rivenditore.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
- Scollegare sempre l'Helix HD dalla rete elettrica prima di pulirlo. Utilizzare solo un panno soffice per pulirlo sulle superfici esterne. Non utilizzare detersivi o prodotti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- L'inserzione di batterie di tipo o formato differente da quello indicato all'interno dell'apparecchio, può provocare l'esplosione delle stesse.
- Qualsiasi utilizzo del ReadEasy Evolve diverso da quanto descritto in questo manuale, farà decadere la garanzia.

Contenuto della Confezione

La confezione del vostro Helix HD contiene:

1. Video ingranditore da tavolo Helix HD.
2. Tastierino di controllo wireless (Control Pad) per Helix HD (con copertura magnetica).
3. 2 Batterie ministilo (AAA) NON RICARICABILI
4. Cavo HDMI
5. Alimentatore.
6. Guida rapida.
7. Manuale Utente.

Se uno qualsiasi di questi oggetti non dovesse essere presente all'interno della confezione, contattate immediatamente il vostro rivenditore.

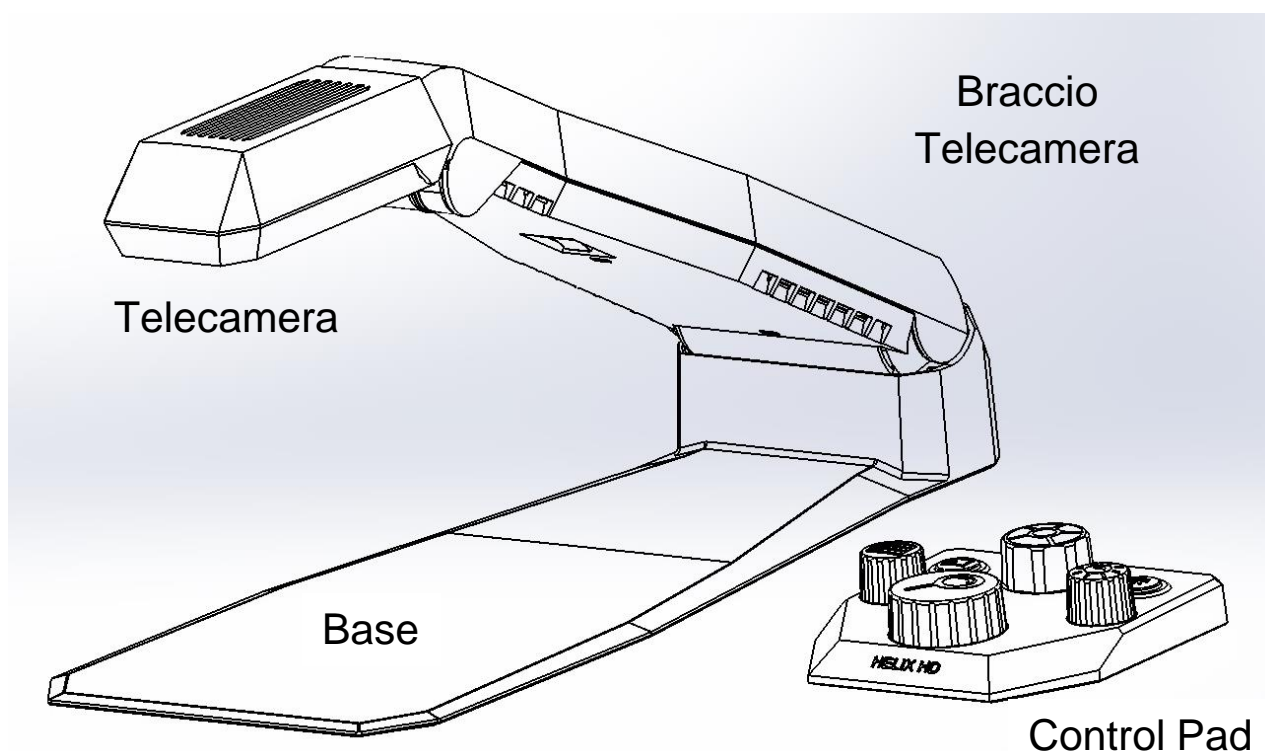

Apertura

Aprire con cautela la confezione ed estrarre la Guida Rapida ed il Manuale utente. Rimuovere lo strato di materiale protettivo ed estrarre il cavo HDMI (all'interno di una busta di plastica).

Sollevarre l'Helix HD fino ad estrarlo dalla scatola (il Control Pad è collocato sotto al braccio della telecamera, nella posizione di trasporto). Posizionare l'Helix Hd, con lo strato protettivo inferiore, su una superficie piana.

Estrarre l'alimentatore e le 2 batterie AAA dallo scomparto presente all'interno della scatola.

Preparazione all'utilizzo

Assicurarsi di posizionare l'Helix HD su una superficie pulita, in piano e sufficientemente ampia da consentirvi di inserire gli oggetti desiderati al di sotto della telecamera. Per una migliore qualità delle immagini si consiglia di NON posizionare l'Helix HD direttamente al di sotto di una fonte di luce intensa, o alla luce del sole.

Apertura dell'Helix HD

1) Posizionare l'Helix HD su di una superficie piana e stabile.



2) Posizionare una mano sulla base e con l'altra sollevare la parte frontale del braccio della telecamera. sollevare il braccio della telecamera dalla posizione di trasporto fino al **secondo** scatto (posizione superiore, braccio inclinato a circa 30 gradi)



3) Afferrare la parte terminale della fotocamera (posizionata sotto al braccio della stessa) e, con cautela, farla ruotare verso il basso, verso di sé e successivamente verso l'alto (circa 160 gradi) fino a posizionarla parallelamente con la base del dispositivo. Questa è la **prima** posizione (superiore), e si utilizza per i livelli di ingrandimento più bassi. Per ulteriori informazioni, leggere il paragrafo " Regolare l'altezza della telecamera " a pagina **Errore. Il segnalibro non è definito..**



4) Rimuovere il Control Pad dalla posizione in cui è riposto.



Chiusura dell'Helix HD per il trasporto

Per chiudere l'Helix HD e prepararlo al trasporto, seguire le istruzioni di apertura nell'ordine inverso.

Collegamento:

Tutte le porte di collegamento dell'Helix HD sono collocate nel pannello sul retro del dispositivo.

Collegamento di uno schermo

IMPORTANTE:

Prima di inserire un connettore HDMI, assicurarsi che il lato piatto del connettore sia rivolto verso l'alto. Eventuali danni causati da un errato inserimento, annullano la garanzia.

- 1) Inserire uno dei connettori del cavo HDMI nella presa "MON" situate sulla sinistra del pannello posterior.
- 2) Inserire l'altro connettore del cavo HDMI in uno schermo compatibile.



Selettore connessione HDMI

L'Helix HD integra un selettore di connessione HDMI che può essere utilizzato per collegare una sorgente video aggiuntiva allo schermo, come un lettore DVD oppure un computer. Questa funzione consente di alternare facilmente le immagini ingrandite dell'Helix HD con quelle dell'altra sorgente.

- 1) Inserire il cavo HDMI proveniente dal vostro dispositivo (es. Lettore DVD o Personal Computer) nella presa "IN".
- 2) Per visualizzare sullo schermo le immagini provenienti dal dispositivo collegato, è possibile sia spegnere l'Helix HD sia premere il pulsante "sorgente video esterna" situate nell'angolo superiore sinistro del Control Pad (come descritto nella sezione "Tasierino di Controllo Wireless (Control pad)" a pagina 15). L'Helix HD deve essere collegato al suo alimentatore perchè questa funzione risulti abilitata.

Collegamento alimentazione

- 1) Inserire il connettore rotondo dell'alimentatore nel presa rotonda "PWR" posta sulla destra del pannello posteriore.



- 2) Inserire la spina dell'alimentatore in una presa a muro.

Inserire le batterie nel Control Pad

Rimuovere il coperchio situato nel lato inferiore del Control Pad.

Rimuovere le 2 batterie AAA dalla confezione di plastica.



Inserire 2 batterie AAA nel vano, prestando attenzione che il verso corrisponda ai simboli + e -.

Accensione e Spegnimento

L'interruttore di accensione e spegnimento si trova nella parte inferiore del braccio della telecamera, a circa 12 cm dal fondo e 22 cm dal fronte.

Per accendere l'Helix HD, premere il pulsante verso il retro del dispositivo.

Dopo l'accensione, le luci dell'Helix HD lampeggeranno ad indicare l'avvio. Serviranno circa 10 secondi per poter vedere il logo Helix HD sullo schermo.



Se sullo schermo non dovesse comparire alcuna immagine, controllare di aver selezionato la giusta sorgente video (per ulteriori dettagli consultare il manuale del vostro schermo).

Per spegnere l'Helix HD, premere il pulsante verso di voi.

Posizionare dei documenti

La telecamera dell'Helix HD è situata nel lato inferiore della testa del braccio mobile. Posizionare i documenti o gli oggetti che si desidera ingrandire sulla base del dispositivo, con la parte interessata direttamente sotto alla fotocamera.

Regolare l'altezza della telecamera

L'Helix HD dispone di due posizioni a differenti altezze per la telecamera: la posizione "alta" per i bassi livelli di ingrandimento, e la posizione bassa per i livelli di ingrandimento più elevato. È bene ricordare che in entrambe le posizioni, la testa della telecamera deve rimanere parallela alla base di appoggio.

Abbassare la testa della telecamera (ingrandimento elevato)

Con la telecamera ed il braccio in posizione "alta", afferrare la testa della telecamera ai lati ed abbassare il braccio fino a raggiungere la posizione bassa. (emette un click)



Quindi sollevare SOLO la testa della telecamera per riportarla parallela alla base di appoggio.

Alzare la telecamera (basso ingrandimento)

Con la telecamera ed il braccio nella posizione "bassa", afferrare i lati della telecamera ed alzare il braccio fino a portarlo in posizione alta (emette un click).

Quindi abbassare la testa della telecamera per portarla parallela alla base.


Tasierino di Controllo Wireless (Control pad)

Copertura Magnetica

Sollevando la copertura magnetica dal Control Pad, si scoprono tutti i pulsanti disponibili.

Se è sufficiente l'utilizzo delle sole funzioni base dell'Helix HD, è sufficiente collocare nuovamente al suo posto la copertura magnetica, al di sopra dei controlli dedicati alle funzioni avanzate.

Aspetto del Control Pad dell'Helix HD senza la copertura magnetica.

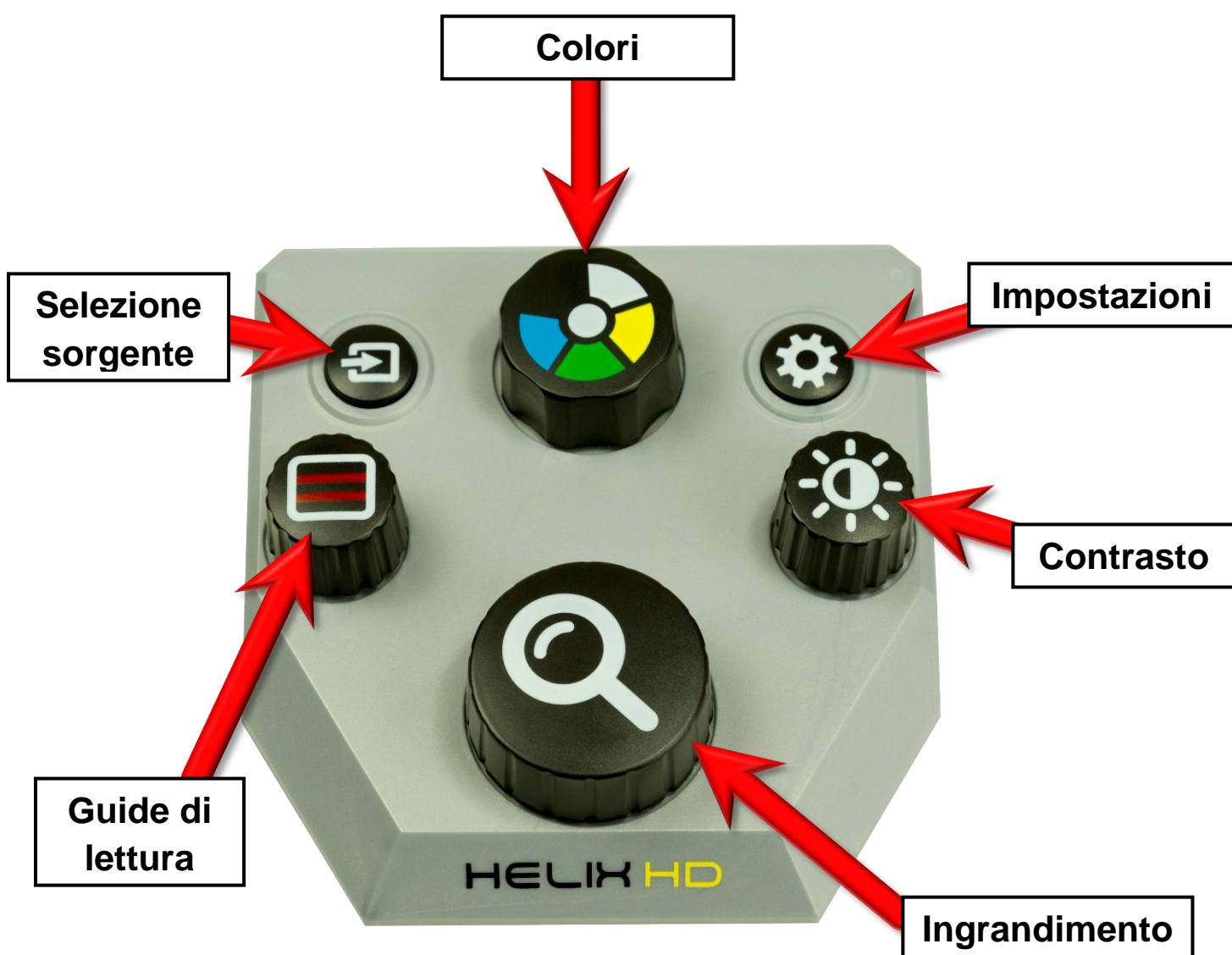

I nomi di pulsanti e rotori indicati in questa immagine verranno utilizzati per riferirti agli stessi all'interno del manuale

Ingrandimento

Ruotare: in senso orario per aumentare l'ingrandimento ed in senso antiorario per diminuirlo

Pressione rapida: modalità Scrittura, blocca la messa a fuoco automatica ed ottimizza le impostazioni della telecamera per la scrittura.

Pressione prolungata: modalità panoramica che riduce l'ingrandimento al livello minimo. Un rettangolo all'interno comparirà a video, indicando l'area inquadrata una volta ripristinato l'ingrandimento rilasciando il pulsante.

Colori

Pressione rapida: passa dalla modalità a colori reali per la visione di immagini, alla modalità colori ad elevato contrasto per la lettura.

Ruotare: in modalità colori ad elevato contrasto, ruotare la manopola permette di spostarsi fra i colori disponibili: bianco su nero, nero su bianco, blu su giallo, giallo su blu, verde su nero, nero su verde, giallo su nero e nero su giallo.

Se le combinazioni sopra elencate non fossero adatte alle vostre esigenze, potrete crearne di personalizzate. Una volta creata la propria combinazione di colori personalizzata, questa compare automaticamente assieme a quelle predefinite. Per creare la vostra combinazione di colori personalizzata, seguire le istruzioni descritte nel paragrafo Combinazioni di Colori Personalizzate a pagina 20.

Contrasto

Ruotare: in senso orario per aumentare il contrasto ed in senso antiorario per diminuirlo.

Pressione rapida: accende o spegne l'illuminazione integrate.

Pressione prolungata: abilita il fermo immagine. L'icona di un fiocco di neve verrà visualizzata nell'angolo superiore destro dello schermo. Si consiglia l'utilizzo per l'osservazione di oggetti senza doverli tenere costantemente fermi con le mani.

Guide di Lettura

Pressione rapida: permette di spostarsi fra le guide di lettura disponibili: due linee verticali, due linee orizzontali, tendine orizzontali, tendine verticali, linee multiple e riquadro per la firma.

Ruotare: permette di ridimensionare la guida di lettura selezionata

Pressione prolungata: disattiva le guide di lettura e salva le ultime impostazioni applicate. Effettuare nuovamente una pressione breve per attivare l'ultima guida di lettura utilizzata.

Selezione sorgente



Pressione rapida: permette di selezionare la sorgente video fra l'Helix HD ed un altro dispositivo ad esso collegato (per ulteriori informazioni leggere il paragrafo Selettore connessione HDMI a pagina 12).

Impostazioni



Pressione rapida: mostra a schermo le impostazioni dell'Helix HD.

Ruotare la manopola "Colori" per spostarsi fra gli elementi del menù. Premere brevemente la manopola "Colori" per confermare la selezione.

Selezionare "Torna alle opzioni" o premere brevemente il pulsante "Impostazioni" per tornare al menù precedente.

Per uscire dal menu Impostazioni, una volta nel menù principale selezionare "Esci" oppure premere brevemente il pulsante "Impostazioni".

Settings Menu Layout

Impostazioni

Guide di Lettura (Linee e Tendine)

Guidafirma

Semplice: impostazione predefinita (ruotando la manopola "Guide di lettura" vengono regolate assieme altezza e larghezza).

Avanzate: consente di regolare tutti i parametri del guidafirma, utile per riquadri più larghi (es. passaporto).

Quando il riquadro guidafirma viene visualizzato:

1. Ruotare la manopola "Guide di lettura" per regolare la larghezza; pressione rapida per confermare.
2. Ruotare la manopola "Guide di lettura" per regolare l'altezza; pressione rapida per confermare.
3. Ruotare la manopola per regolare la posizione orizzontale; pressione rapida per confermare.
4. Ruotare la manopola per regolare la posizione verticale; pressione rapida per confermare.

Spessore delle linee (1-10)

Consente di regolare lo spessore delle linee delle guide orizzontali, verticali e del guidafirma.

Spessore delle linee della modalità "linee multiple" (1-10)

Consente di regolare lo spessore della modalità "Linee multiple"

Colore delle linee

Consente di selezionare il colore delle linee delle guide orizzontali, verticali, "linee multiple" e del guidafirma.

Opacità delle Linee (10-100)

L'impostazione predefinita è 100 (nessuna trasparenza).

Consente di regolare l'opacità delle linee delle guide orizzontali, verticali, "linee multiple" e del guidafirma.

Opacità delle tendine (10-100)

L'impostazione predefinita è 100.

Consente di regolare l'opacità delle tendine orizzontali e verticali.

Indietro

Luminosità dello schermo (10 - 100)

Consente di regolare la luminosità al livello desiderato (10 è il meno luminoso mentre 100 è il più luminoso).

Combinazioni di Colori Personalizzate

Colore del testo (in ordine alfabetico)

Aquamarina, Arancione, Azzurro, Beige, Bianco, Ciano, Giallo, Giallo Chiaro, Kaki, Nero, Rosa Chiaro, Rosso, Salmone, Turchese, Verde e Verde Chiaro

Colore dello sfondo

Stesse possibilità di quelli elencati per il testo, qui sopra.

Indietro

Dimensioni testo dei Menù (1-20)

L'impostazione predefinita è 14. Consente di regolare la dimensione del testo in tutti i menù per soddisfare le esigenze di ognuno.

Lingua

Inglese (Inghilterra), Danese, olandese, francese, tedesco, polacco, russo, italiano, giapponese, coreano, portoghese, inglese (Stati Uniti), arabo, cinese, norvegese, spagnolo (altre disponibili).

Stato batteria del Control Pad (0-100%)

Impostazioni Avanzate

Controllo messa a fuoco per scrittura

Bloccato: impostazione predefinita. L'autofocus rimane attivo finché non viene selezionata la Modalità Scrittura. Per ulteriori informazioni leggere il paragrafo Ingrandimento a pagina 16.

Manual: quando è attiva l'opzione "Manuale", effettuare una pressione rapida della manopola "Colori" per selezionare la Regolazione manuale della messa a fuoco. Ruotare la manopola per regolare la messa a fuoco. Effettuare nuovamente una pressione rapida della manopola per tornare alla messa a fuoco automatica.

Illuminazione

Automatica: impostazione predefinita. L'Helix HD seleziona automaticamente il livello di illuminazione.

Spenta: per inquadrare oggetti lucidi. Es. carta patinate, lo schermo di un telefono, ecc.

Bassa: per l'uso in ambienti molto luminosi.

Media: per l'uso con carte opache. Es. riviste e giornali.

Alta: per l'uso in ambienti bui o poco illuminati.

Frequenza della rete elettrica

È necessario selezionare il valore della linea elettrica del proprio paese per evitare che sfarfallio nelle immagini.

50 Hz

60 Hz

Rilevamento dimensioni dello schermo

Automatico: impostazione predefinita. L'Helix HD cerca di rilevare automaticamente la dimensione dello schermo.

Manuale: Effettuare una pressione rapida della manopola "Colori" per selezionare l'opzione e modificare le dimensioni dello schermo impostate.

Dimensioni dello schermo (pollici)

Con il Rilevamento dimensioni dello schermo in manuale, inserire qui le dimensioni del proprio schermo.

Questa informazione consente al vostro Helix HD di indicare correttamente il livello di ingrandimento selezionato.

Ripristino delle impostazioni predefiniti

Premere brevemente la manopola "Colori" per entrare nel menù di ripristino. Un avviso comparirà sullo schermo per chiedere conferma della volontà di effettuare il ripristino. Selezionare OK per confermare o Annulla per tornare al menù precedente.

Indietro

Informazioni su Helix HD

Nessun aggiornamento disponibile tramite chiavetta USB

(Per gli aggiornamenti leggere a pagina 23)

Informazioni sul produttore

Informazioni su VisionAid International

Informazioni sul distributore italiano

Informazioni sul distributore italiano

Versione del Software

Numero di Serie

Licenze Open source

Indietro

Uscita

Aggiornare il vostro Helix HD

Il software del vostro Helix HD è completamente aggiornabile. Se nuove funzionalità verranno rilasciate, sarà possibile scaricare gli aggiornamenti dal sito di VisionAid International. Contattate il vostro rivenditore per sapere se sono disponibili dei nuovi aggiornamenti.

Per effettuare l'aggiornamento sono necessari un computer ed una chiavetta USB 2.0 da almeno 4 Gb di capacità.

Download

Dopo aver contattato il vostro distributore, riceverete un link da cui scaricare l'ultima versione del software sul vostro computer.

Preparare la chiavetta USB

Copiare i file che avete scaricato nella cartella principale della chiavetta USB.

Collegare la chiavetta UBS all'Helix HD

Collegare la chiavetta USB alla porta USB situata nel pannello posteriore del vostro Helix HD. La chiavetta USB può entrare in un solo verso, occorre quindi prestare attenzione durante l'inserimento. Forzare la chiavetta USB all'interno della porta in maniera errata può danneggiare il dispositivo e la chiavetta USB; eventuali danni di questo genere non sono coperti dalla garanzia.

Installare gli aggiornamenti

Seguire questo percorso all'interno del menù Impostazioni

- Impostazioni
 - Informazioni su Helix HD
 - Installa immagine: versione del software che sarà installata. (effettuare una pressione rapida per installare).

L'installazione può richiedere fino a 5 minuti. NON spegnere l'Helix HD né scollegare la chiavetta USB durante il processo. Dopo che l'installazione sarà terminata il vostro Helix HD si riavvierà automaticamente e completerà il processo di aggiornamento.

Consigli e Suggerimenti – Risoluzione dei problemi

L'unità non si accende

- Controllare che la spina dell'alimentatore sia collegata al pannello posteriore
- Assicuratevi che l'alimentatore sia collegato ad una presa alimentata.
- Assicuratevi che l'interruttore di accensione sia in posizione "ON" (premuta lontano da voi).

Sullo schermo non compare nulla

- Assicuratevi che la spina del cavo HDMI sia completamente inserita all'interno della porta MON sul retro dell'Helix HD.
- Controllare che l'estremità opposta del cavo HDMI sia completamente inserita nell'apposita porta del vostro schermo.
- Assicuratevi di aver selezionato correttamente la fonte video dello schermo. Fare riferimento al manuale di istruzioni dello schermo.
- Se è stato collegato un dispositivo video aggiuntivo alla porta IN sul pannello posteriore dell'Helix HD, assicuratevi che il selettore HDMI sia impostato sulla sorgente corretta. (vedere a pagina 12).

L'immagine visualizzata non cambia

- Assicuratevi che il Fermo Immagine non sia attivo (immagine di un fiocco di neve nell'angolo superiore destro dello schermo); premere o ruotare un qualsiasi pulsante del Control Pad per disattivare il fermo immagine.

Sullo schermo compaiono macchie o imperfezioni

- Spegnerne l'Helix HD e pulire la lente della telecamera (posta nel lato inferiore della testa mobile) ed asciugare con un panno asciutto privo di pelucchi.

Il dispositivo non mette a fuoco correttamente

- Assicuratevi che la modalità Scrittura non sia abilitata (vedere a pagina 16).
- Controllare che l'oggetto che si desidera inquadrare non sia troppo vicino alla telecamera (deve trovarsi ad almeno 40 mm dalla testa della telecamera).
- Assicuratevi che il braccio dell'Helix HD sia posizionato all'altezza corretta per il livello di ingrandimento richiesto (vedere a pagina **Errore. Il segnalibro non è definito.**).

Il Control pad non funziona

- Assicuratevi che le batterie siano posizionate correttamente nell'apposito alloggiamento nel lato inferiore del Control Pad.
- Se il livello delle batterie è basso, un avviso comparirà sullo schermo per avvisarvi. In tal caso sostituire le batterie (vedere a pagina 13) con 2 batterie AAA.
- Se compare un avviso che informa che il Control Pad non è connesso, premere uno qualsiasi dei pulsanti sul Control Pad ed attendere 30 secondi affinché questo si colleghi all'Helix HD.
- Assicuratevi che il Control Pad non sia a più di 8 metri dall'Helix HD.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

- Seguire il seguente percorso per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica:
 - Impostazioni
 - Impostazioni avanzate
 - Ripristino impostazioni predefinite (pressione rapida per avviare il ripristino).

Termini e condizioni di vendita

Questo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore per 24 mesi dalla data di acquisto. Se doveste riscontrare problemi con il prodotto e non lo aveste acquistato direttamente da VisionAid International, vi preghiamo di contattare prima il vostro rivenditore.

Per tutti i resi e le riparazioni, contattate il vostro distributore.



Questo prodotto dispone di certificazione CE ed è pienamente conforme alla legislazione dell'Unione Europea



Il logo WEEE sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito o gettato con gli altri rifiuti domestici. Siete tenuti a smaltire tutte le vostre apparecchiature elettroniche o elettriche recandovi presso il punto di raccolta specificato per il riciclaggio di tali rifiuti pericolosi. La raccolta isolata e il corretto recupero dei rifiuti elettronici ed elettrici al momento dello smaltimento contribuiranno alla conservazione delle risorse naturali. Inoltre, un corretto riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche garantirà la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il recupero e i punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare l'autorità locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici, il negozio presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o il produttore dell'apparecchiatura.

© VisionAid International 2017

Appendice A: Informazioni Tecniche

Informazioni Generali	
Base di appoggio (PxL)	400 x 150 mm
Dimensioni (Chiuso) (PxLxA)	400 x 150 x 80 mm
Dimensioni (Aperto) (PxLxA)	400 x 150 x 210 mm
Peso Helix HD	1,10 kg
Peso Control Pad	0,16 kg
Connessioni video	HDMI & DVI
Modalità Colori	Colori Reali, 8 Colori ad alto contrasto predefinite ed 1 personalizzabile

Condizioni Operative	
Umidità Relativa	<70% senza condensa
Temperatura:	da 10 °C a 35 °C

Condizioni di trasporto e conservazione	
Umidità Relativa	<95%, senza condensa
Temperatura:	Da -20 °C a 60 °C