

50
YEARS

Thomashilfen

PIONEER
SINCE 1969

Testato in conformità
con la nuova norma di
sicurezza R129 –
protezione dagli
impatti laterali
inclusa!

 **fino a 50**
kg / 110.2 lbs
100 – 150 cm /
40 – 59"

Hercules Small

Percorrere le strade oggi pensando
alla sicurezza di domani!


Thomashilfen

THOMASHILFEN Hercules Small

"Sempre un passo avanti in termini di sicurezza"

Siamo entusiasti di presentare il nuovo seggiolino auto riabilitativo Hercules Small: leader nella sicurezza dei bambini in viaggio!


Questo seggiolino per auto riabilitativo non solo aderisce agli attuali standard di sicurezza, ma è anche progettato per soddisfare i requisiti futuri che entreranno in vigore a partire da settembre 2023. L'Hercules Small, testato secondo il più recente **standard R129** che considera sia gli **impatti frontali che quelli laterali**, offre un elevato livello di sicurezza e una protezione efficace per il tuo bambino.

Ma l'Hercules Small è **molto più di un semplice seggiolino per auto**: lo abbiamo dotato di funzionalità aggiuntive cruciali come la protezione dagli impatti laterali, guide per bacino e gambe e poggiatesta. Ognuno di questi elementi gioca un ruolo chiave nel soddisfare i rigorosi standard di sicurezza garantendo al tempo stesso il comfort e il sostegno del tuo bambino. Non c'è mai stato un modo più sicuro per garantire il comfort!

La norma sui seggiolini auto **R129** pone particolare enfasi su una maggiore protezione negli incidenti con impatto laterale e stabilisce requisiti più severi per il sistema di cinture di sicurezza e l'ancoraggio del seggiolino al veicolo. Oltre alla sicurezza in caso di incidente, altri aspetti come usabilità, ergonomia e anche l'utilizzo di materiali a basso inquinamento sono sottoposti a severi test

Testato in conformità con la nuova **norma di sicurezza R129** – protezione dagli impatti laterali inclusa!

Con **FUNZIONI** completamente nuove

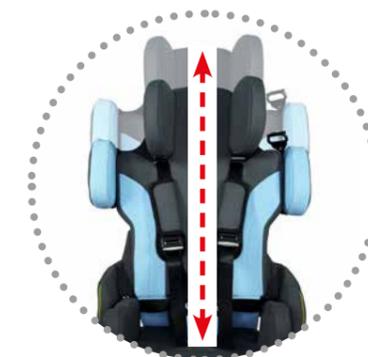

ALTEZZA DELLO SCHIENALE

Lo schienale può essere regolato in altezza di 24 cm in modo continuo, permettendo così di adattarsi in qualsiasi momento alla crescita del bambino.

La testa è mantenuta in una posizione ottimale dal poggiatesta regolabile in modo continuo e asincrono.

L'ampia scelta di accessori che crescono con il prodotto garantisce una lunga durata.



GUIDE PER LE GAMBE

Utilizzatori stretti e larghi, con una larghezza del sedile da 29 a 38 cm, siedono sempre ben supportati.


Le guide pelviche e per le gambe, che crescono con il paziente, sono continue e regolabili individualmente per ciascun lato, anche in modo asincrono.

PROTEZIONI DA IMPATTO LATERALE

offrono una protezione dagli impatti laterali particolarmente buona: assorbono le forze nel miglior modo possibile, soprattutto nella zona della testa e delle spalle. **Testati secondo i più recenti standard di sicurezza (R129).**



Da oltre 30 anni Thomashilfen offre seggiolini auto per bambini con esigenze speciali. Anche oggi utilizziamo il nostro know-how per sviluppare seggiolini auto per bambini e adulti. In essi confluisce tutta la nostra pluriennale esperienza attorno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari.

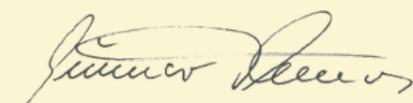
Gunnar Thomas, Inhaber

Pioneer

REHAB CAR SEATS

since
1988

UN TOUR ATTRAVERSO FUNZIONALITA' DI PRIMA CLASSE



PROTEZIONI DA IMPATTO LATERALE
offrono una protezione dagli impatti laterali particolarmente buona: assorbono le forze nel miglior modo possibile, soprattutto nella zona della testa e delle spalle. **Testati secondo i più recenti standard di sicurezza (R129).**



IMBRACATURA A 5 PUNTI
fornisce un supporto aggiuntivo e una posizione seduta comoda e sicura durante la marcia grazie ai morbidi spallacci: la lunghezza corretta della cintura viene regolata rapidamente tramite le due fibbie.

FIBBIA DELLA CINTURA AUTOMATICA

Gli spallacci possono essere agganciati individualmente nella fibbia a sgancio rapido, il che significa che il genitore o l'accompagnatore possono allacciarli più facilmente.



IMBOTTITURA DELLA FIBBIA
riduce la pressione della fibbia della cintura sulla sensibile zona addominale e nasconde la fibbia.




GUIDE PER LE GAMBE (SINISTRA E DESTRA)
vengono utilizzate per il supporto e il posizionamento nella zona della coscia. Possono essere regolate in modo indipendente.

PROFONDITÀ SEDILE
regolabile per l'adattamento individuale alla crescita del bambino.



POGGIATESTA

è regolabile in modo asincrono in larghezza (8,5 cm) e altezza (3 cm). Tramite accessori separati è anche regolabile in profondità, il che consente di prevenire il sovraccarico di stimoli.

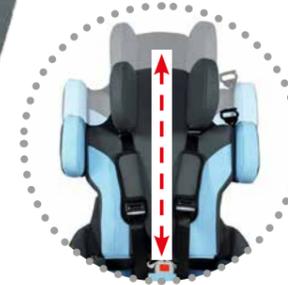

ALTEZZA SCHIENALE

può essere regolato in modo continuo (24 cm). In questo modo il seggiolino si adatta al bambino e consente per lungo tempo il supporto.



ACCESSORI: ANGOLO DI RECLINAZIONE
può essere regolato in modo continuo rispetto allo schienale con due maniglie rapide - senza alcun attrezzo: basta utilizzare i morsetti rossi a sgancio rapido.

CUSCINO DELLA SEDUTA

con imbottitura spessa per un piacevole comfort di seduta senza fastidiosa sudorazione. La fodera traspirante può essere completamente rimossa e lavata a 40°C - senza allentare le cinghie.

2 colori selezionabili:



azzurro rosso

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100





► Basi funzionali



Per far fronte al trasferimento di un bambino in continua crescita, la piastra girevole è un vero sollievo per la schiena. Lo sgancio è montato nella zona anteriore per garantire uno sgancio confortevole

LEVETTA (Fig. sotto)

facilita il trasferimento, a scelta il sedile può essere girato a sinistra o a destra. Levetta per la funzione di rotazione (fig. sopra).



In caso di controllo debole della parte superiore del corpo e della testa (ipotonico, "flaccido"), l'inclinazione regolabile del sedile è un supporto importante per evitare il "ribaltamento in avanti". Il bambino siede in una posizione di riposo rilassata e non deve svolgere alcun faticoso lavoro muscolare. L'angolo appropriato può essere regolato secondo necessità.

FUNZIONE DI TILTING

per il basculamento del seggiolino in più livelli, per una posizione di riposo rilassata durante la guida (0 - 10° o con estensione 12,5 - 20°).

► Buona posizione seduta



SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO (fissi)

forniscono un buon sostegno laterale e sostengono il torace



SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO (swing away)

forniscono un buon sostegno per il torace e facilitano i trasferimenti



IMBOTTITURA PER LE SPALLE

per ridurre la larghezza delle spalle



PROLUNGA AGGIUNTIVA (area del capo)

fornisce un'area più ampia su cui appoggiare la testa del bambino.

► Stabilità per il seggiolino auto



SEATFIX (dietro il sedile)

mantiene il seggiolino saldamente in posizione, anche durante la guida a "vuoto" senza bambino sul seggiolino.



BARRA STABILIZZATRICE

garantisce una tenuta sicura del sedile quando non è presente l'isofix nel veicolo.

Il sedile è sottoposto a sollecitazioni aggiuntive, soprattutto quando le funzioni di rotazione e basculamento vengono utilizzate quotidianamente. Sono necessari accessori per stabilizzare il sedile nell'auto, per una migliore maneggevolezza e una maggiore sicurezza per l'utente e l'assistente.



BRACCIOLI

forniscono un buon supporto per gli avambracci



TAVOLINO

promuove la verticalità e la postura del bambino e gli dà maggiore libertà con una sicurezza aggiuntiva (utilizzabile solo con i braccioli).



CUSCINO PER LA TESTA AGGIUNTIVO

fornisce una superficie di contatto ancora più morbida per la testa. Il riempimento in ogni camera (centro ed entrambi i lati) è rimovibile.



DIVARICATORE

migliora il controllo delle gambe e impedisce l'accavallamento delle stesse.

► Supporto sicuro per testa e piedi



SECONDA GUIDA PER LA CINGHIA (superiore)

come comoda opzione per utilizzare la cintura di sicurezza a 3 punti sia a destra che a sinistra.



PROLUNGA ADDIZIONALE PER POGGIATESTA (laterale)

protegge il bambino da sovraccarico sensoriale durante il viaggio in macchina.



POGGIAPIEDI (pieghevole)

facilita la salita e la discesa e impedisce lo scivolamento dal sedile (altezza e angolazione regolabili)




CRASH TEST prova di resistenza superata con successo in conformità alla R129.

► Utente e veicolo protetti in modo sicuro



GUIDA PER LA CINTURA DI SICUREZZA

per il posizionamento della cintura a 3 punti del veicolo. Intuitiva e sicura, evita errati fissaggi o la torsione delle cinghie. Crash tested!

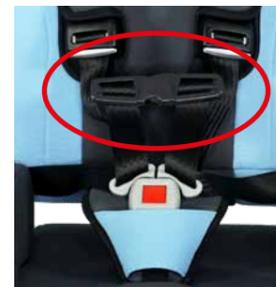

CLIP PETTORALE

impedisce pericolose torsioni delle cinture e le mantiene nel posto giusto



CUSCINO STABILIZZATORE

garantisce la massima superficie di appoggio tra il sedile del veicolo e la base del seggiolino per facilitare i trasferimenti.

Una panoramica completa degli accessori è disponibile nella scheda d'ordine sul sito: www.medimec.it



GRANDE MA PRATICO



SOLO 21.7 x 9.1 x 23.6" / 55 x 23 x 60 cm

Con pochi movimenti, il nuovo seggiolino auto per riabilitazione Hercules Small si ripiega in un formato sottile e maneggevole. Ciò non solo semplifica il montaggio in macchina, ma garantisce anche che il seggiolino possa essere facilmente trasportato e riposto anche in un bagagliaio con capacità limitata (in figura: VW Polo).



You Tube

Guarda il video:
Hercules Small è così facile e veloce da installare in macchina

Dimensioni e pesi	Hercules Small
Profondità seduta	31 - 42 cm / 12.2 - 16.5"
Larghezza seduta	29 - 38 cm / 11.4 - 15"
Altezza schienale (interna)	57 - 80 cm / 22.4 - 31.5"
Altezza poggiatesta	Schienale min: 33,5 - 36,5 cm / 13.2 - 14.4" Schienale max: 57 - 60 cm / 22.4 - 23.6"
Altezza spalle (alla guida per la cintura)	33 - 60 cm / 13 - 23.6"
Larghezza spalle (con guida)	26 - 36,5 cm / 10.2 - 14.4"
Angolo inclinazione schienale (max.)	90° - 145°
Basculamento (modello base)	0°
(con base 10°)	0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°
(con base 20°)	12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Lunghezza tibiale (con poggiapiedi)	16 - 42 cm / 6.3 - 16.5"
Altezza supporti laterali (bordo superiore)	28 - 34 cm / 11 - 13.4"
Distanza supporti laterali (max.)	20 - 33 cm / 7.9 - 13"
Dimensioni max complessive (L x A x P)	55 x 85 x 34 cm / 21.7 x 33.5 x 13.4"
Dimensioni min. piegato (L x A x P)	55 x 23 x 60 cm / 21.7 x 9.1 x 23.6"
Peso del seggiolino (modello base)	11,6 kg / 25.6 lbs
Altezza utente	100 - 150 cm / 40 - 59"
Peso max. utente	50 kg / 110.2 lbs

Caratteristiche standard:

Schienale con regolazione in altezza integrata; sedile con regolazione integrata della profondità e della larghezza; regolazione continua dell'angolazione dello schienale con leva a sgancio rapido; imbottitura traspirante con tessuto di rivestimento ignifugo: cuscino poggiatesta, cuscino schienale, cuscino pelvico, guide per le gambe, cuscino nella seduta, imbottitura inguinale; Cintura a 5 punti con imbottiture morbide; guida per cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo (utilizzabile a destra o a sinistra); protezioni per gli impatti laterali; opzioni di montaggio predisposte per tutti gli accessori; rivestimento sfoderabile, lavabile in lavatrice fino a 40°C.

GMFCS
Livello
III-V


Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany
Phone: +49 (0)4761 886-63 or -68 · Fax: +49 (0)4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com