


# EasyBelt - FlexiBelt

SystemRoMedic™



## Manuale d'uso

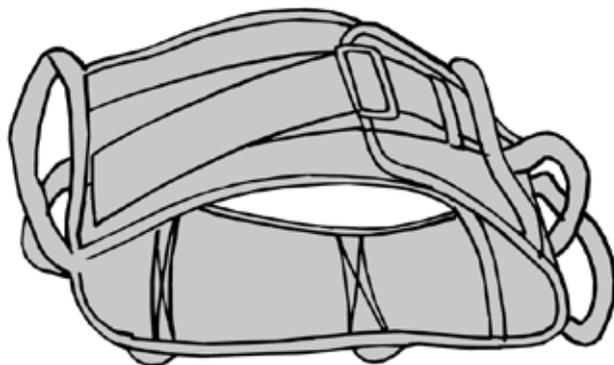

Max: 170 kg

EasyBelt e FlexiBelt vengono utilizzati a supporto di svariati situazioni di trasferimento. Non dovranno mai essere utilizzati per sollevamenti. La parte interna della cintura EasyBelt è rivestita in nylon, facilitando il lavaggio o la pulizia con panno e disinfettante. Il materiale morbido interno di FlexiBelt è confortevole e morbido a contatto con la pelle. Entrambi i materiali hanno una funzione di anti-scivolamento.

La linea System Romedic Handicare consiste in una serie di diversi modelli e dispositivi per il trasferimento assistito. La scelta del dispositivo dipende dalla situazione di trasferimento da eseguire e le capacità funzionali e necessità del paziente.

## Leggere sempre le istruzioni

Leggere sempre le istruzioni per dell'uso di tutti gli ausili per il trasferimento. Tenere sempre il manuale in un luogo accessibile agli utilizzatori del prodotto.

## Ispezione Visuale

Ispezionare sempre l'attrezzo prima dell'uso e dopo il lavaggio. Controllare le cuciture ed il resto del materiale per eventuali strappi. Se si notato segni di usura non utilizzare il prodotto.



## Ispezione Funzionale

Ispezionare sempre l'attrezzo prima dell'uso e dopo il lavaggio. Testare le cuciture e la tenuta. Tirare forte le maniglie in opposte direzioni (Fig. 1).




Chiudere la cintura e posizionare un piede sulla cintura tirando le maniglie in opposte direzioni (Fig. 2). Ripetere l'operazione con tutti i manici.

## Applicazione



1. Applicare la cintura attorno al paziente sotto il punto vita.
2. Allacciare la cintura e stringerla.

## Rimuovere la cintura

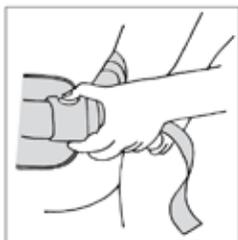

Slacciare la chiusura, allentare prima tutte le cinghie e rimuovere la cintura delicatamente.

## Utilizzare le EasyBelt e Flexibelt



Nei trasferimenti di posizione da seduta a eretta l'assistente o assistenti possono scegliere di lavorare posizionandosi al lato del paziente oppure davanti. Un vantaggio di lavorare davanti al paziente è quello di dare una sensazione più sicura e protetta. Se si effettua il trasferimento da seduti ad eretti con due assistenti, si consiglia di lavorare con una presa incrociata come da figura.

E' importante fare inclinare il paziente in avanti in modo da creare una naturale manovra di movimento tra l'uso della cintura ed il corpo del paziente.



Quando si assiste con due persone si consiglia che un assistente stia su ogni lato del paziente, afferrando in modo incrociato le maniglie dietro la schiena e tenendo la mano del paziente davanti.

Afferrare in modo incrociato dietro al paziente per maggiore supporto e una ottimale postura di lavoro.



Gli assistenti possono lavorare in coppia o da soli in base alle esigenze del paziente dato che EasyBelt/FlexiBelt sono dotati di manici verticali e orizzontali.

## Materiale:

EasyBelt: Poliamide, Nylon

FlexiBelt: Poliamide, Poliestere



## Lavaggio e manutenzione prodotto:

Leggere attentamente l'etichetta del prodotto individuale.

Non utilizzare ammorbidenti. Per assicurarsi una lunga durata appendere ad asciugare o asciugare in tamburo a bassa temperatura.

Art. N.	Modello	Misura (cm)	Punto vita (cm)	Manici	Materiale interno
RO6012	Easy Belt XS	75 x 12	45 - 70	5	Nylon
RO6013	Easy Belt S	105 x 12	60 - 100	7	Nylon
RO6014	Easy Belt M	120 x 12	70 - 120	9	Nylon
RO6015	Easy Belt L	135 x 12	100 - 160	22	Nylon
RO6002	Easy Belt Hug, XS	75 x 12	45 - 70	3 + 2 riposizionabili	Nylon
RO6003	Easy Belt Hug, S	105 x 12	60 - 100	4 + 3 riposizionabili	Nylon
RO6004	Easy Belt Hug, M	120 x 12	70 - 120	5 + 4 riposizionabili	Nylon
RO6005	Easy Belt Hug, L	135 x 12	100 - 160	6 + 5 riposizionabili	Nylon
RO6006	Easy Belt Hug, XL	150 x 12	115 - 175	7 + 6 riposizionabili	Nylon
RO6023	FlexiBelt S	105 x 12	60 - 100	7	Poliestere
RO6024	FlexiBelt M	120 x 12	70 - 120	9	Poliestere
RO6025	FlexiBelt L	135 x 12	100 - 160	11	Poliestere
RO6026	FlexiBelt XL	150 x 12	115 - 175	13	Poliestere
RO6072	Flexi Belt Hug, XS	75 x 12	45 - 70	3 + 2 riposizionabili	Poliestere
RO6073	Flexi Belt Hug, S	105 x 12	60 - 100	4 + 3 riposizionabili	Poliestere
RO6074	Flexi Belt Hug, M	120 x 12	70 - 120	5 + 4 riposizionabili	Poliestere
RO6075	Flexi Belt Hug, L	135 x 12	100 - 160	6 + 5 riposizionabili	Poliestere
RO6076	Flexi Belt Hug, XL	150 x 12	115 - 175	7 + 6 riposizionabili	Poliestere

## Accessori:

Support Straps – Art. N. RO6061

Possono essere utilizzati a supporto inguinale in combinazione con EasyBelt/ FlexiBelt.



## Distribuzione, Formazione in esclusiva per l'Italia



### Sago Medica S.r.l.

Via Zallone 25, 40066 Pieve di Cento (BO)

Tel: 051 686 0811

Fax: 051 686 1246

info@sagomedica.it

www.sagomedica.it

## Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200 Internet: www.handicare.com  
SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299 E-mail: info@handicare.se  
SWEDEN

