

Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100 Modena (MO) – Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com



KEYCLICKER



Keyclicker è un ausilio ideato da A.I.D.A. per persone con disturbo nella comunicazione verbale e con difficoltà di indicazione e di attenzione (come persone autistiche o con lievi handicap intellettivi).

KEYCLICKER permette di comunicare, scrivere ed utilizzare il computer digitando una **tastiera virtuale, attraverso un monitor sensibile al tocco (touch screen)**. Le tastiere virtuali sono riprese in parte da FaceMOUSE, quindi sono personalizzabili e possono essere utilizzate come fogli di lavoro a seconda delle esigenze.

KEYCLICKER include infatti oltre che una sintesi vocale, che legge ad alta voce quanto viene scritto, anche un'applicazione per costruire tastiere e fogli di lavoro personalizzati, dove possono essere inserite lettere, numeri, parole, immagini e suoni. E' possibile anche collegare tra loro più fogli di lavoro, in modo da limitare il numero totale di simboli presenti in un'unica schermata.

Il maggior vantaggio di KEYCLICKER rispetto ad altri comunicatori risiede però nella predizione inclusa nelle tastiere che risulta più funzionale rispetto alle predizioni standard. La cosiddetta "predizione" è un sistema che propone ciò che probabilmente si vorrà digitare a seconda di quanto è già stato scritto: in questo modo si riduce l'ampiezza dei movimenti richiesti per scrivere, quindi anche i tempi e la fatica.

In KEYCLICKER è possibile selezionare le lettere/simboli della tastiera virtuale semplicemente premendo col dito la lettera rappresentata sullo schermo, sensibile al tocco.

Sono previste 4 versioni di KEYCLICKER:

Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100 Modena (MO) – Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com

- **KEYCLICKER All-in-One:** include il software di scrittura/comunicazione e un **monitor touch-screen a uno schermo piatto da 18,5" con integrato un computer di ultima generazione** (Dual core 1,80GHz, senza ventola, RAM 2GB e Hard-Disk 160GB). Altre caratteristiche della macchina : connessione Wi-fi per permettere ovunque di collegarsi ad internet, lettore/masterizzatore DVD e comoda batteria con autonomia di circa un'ora (è possibile acquistare batterie aggiuntive a 30€ l'una). Sistema Operativo Win 7 prof ITA -DOWNGRADE Win XP PRO: si può scegliere quindi tra Win 7 prof e Win XP prof.

Peso circa 5,8Kg.

Certificato CE .

Garanzia 3 ANNI on-site !

In dotazione: una comoda tastiera e mouse wireless per l'assistente .

Software installati: software proprietario, Open Office, Antivirus




Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100 Modena (MO) – Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635


e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com

- **KEYCLICKER Standard:** include il software di scrittura/comunicazione e **un monitor touch-screen 17 pollici con inclinazione regolabile da collegare al computer, quindi adatto per una postazione fissa e per chi ha già un computer ,**

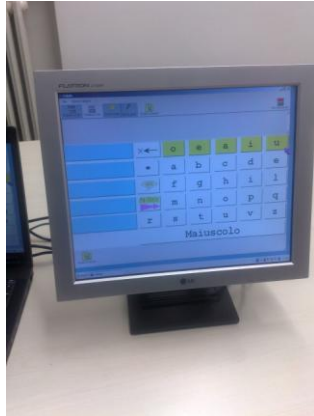

KEYCLICKER versione standard : è importante l'inclinazione del monitor

- **KEYCLICKER Infrangibile:** include il software di scrittura/comunicazione e **un Tablet-PC infrangibile di 12 pollici, ovvero un computer portatile di ridotte dimensioni, senza tastiera, in quanto si digita direttamente sullo schermo.**

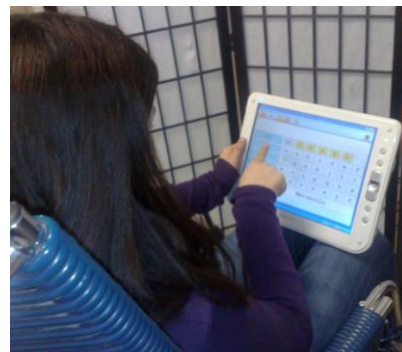

KEYCLICKER **infrangibile** è appunto progettato per poter cadere accidentalmente **ed è impermeabile alle gocce d'acqua, oltre ad essere piuttosto leggero e maneggevole** : quindi KEYCLICKER portatile è ideale per essere un comunicatore, sia di tipo alfabetico che simbolico.

Caratteristiche tecniche del KEYCLICKER infrangibile : infrangibile , impermeabile alle gocce d'acqua, Schermo 12", processore N270 1,60Ghz, 1GB RAM, batteria 3 ore, wireless , porte: 3 USB, 1 LAN, 1 VGA. Sistema operativo Windows XP embedded in lingua inglese (la lingua è ininfluente per l'utilizzo del software KEYCLICKER, in lingua italiana)

Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100 Modena (MO) – Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com

- **KEYCLICKER Fly:** include il software di scrittura/comunicazione e **un tablet-pc di 10 pollici, ovvero un computer portatile di ridottissime dimensioni, senza tastiera, in quanto si digita direttamente sullo schermo.**



A differenza del KEYCLICKER Infrangibile, il KEYCLICKER Fly non è progettato per subire urti consistenti, pertanto deve essere maneggiato con cura. Lo schermo è leggermente più piccolo rispetto alla versione infrangibile, ma il tablet PC di KEYCLICKER Fly ha il vantaggio di essere equipaggiato con un processore molto più veloce ed è dotato di Sistema Operativo Windows in lingua italiana.


Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100 Modena (MO) – Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com

Ecco ora alcune possibili tastiere di KEYCLICKER:

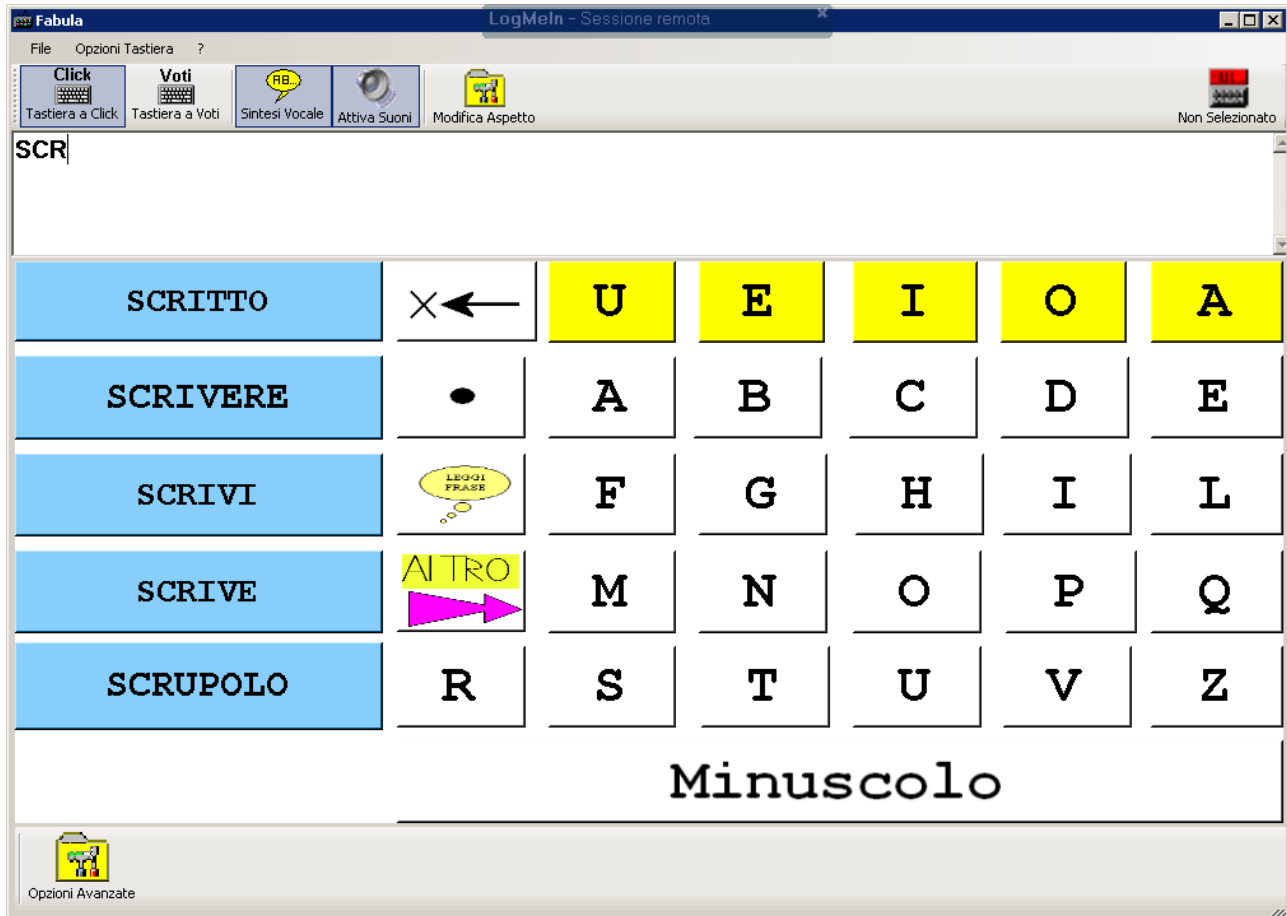


Tastiera alfabetica con predizione di parola a sinistra e predizione di lettera nella riga gialla

Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS


Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100 Modena (MO) – Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com

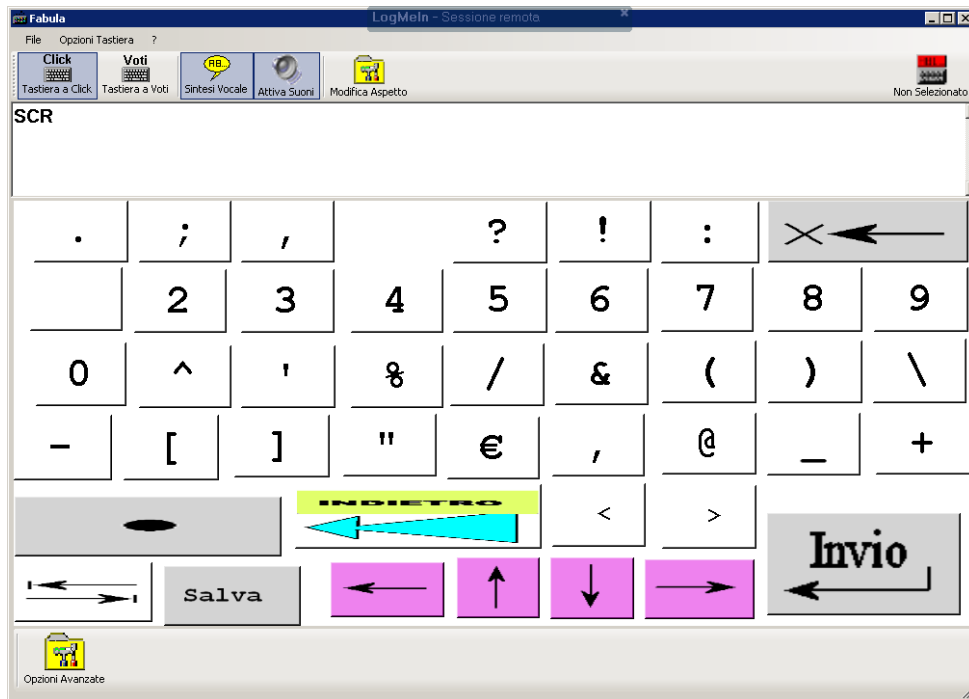

Numeri e punteggiatura

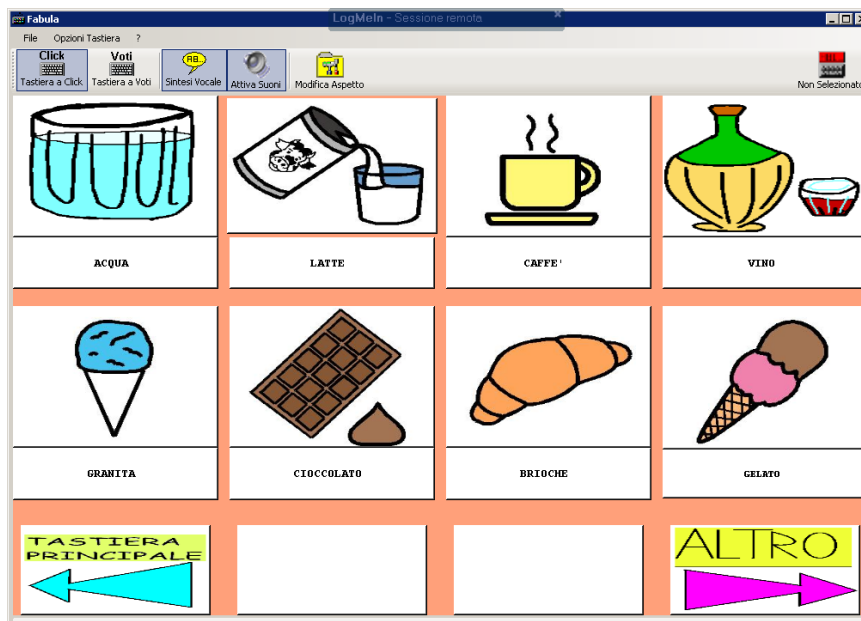


Esempio di tastiera simbolica con i disegni (categoria "CIBO")

Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100 Modena (MO) – Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com

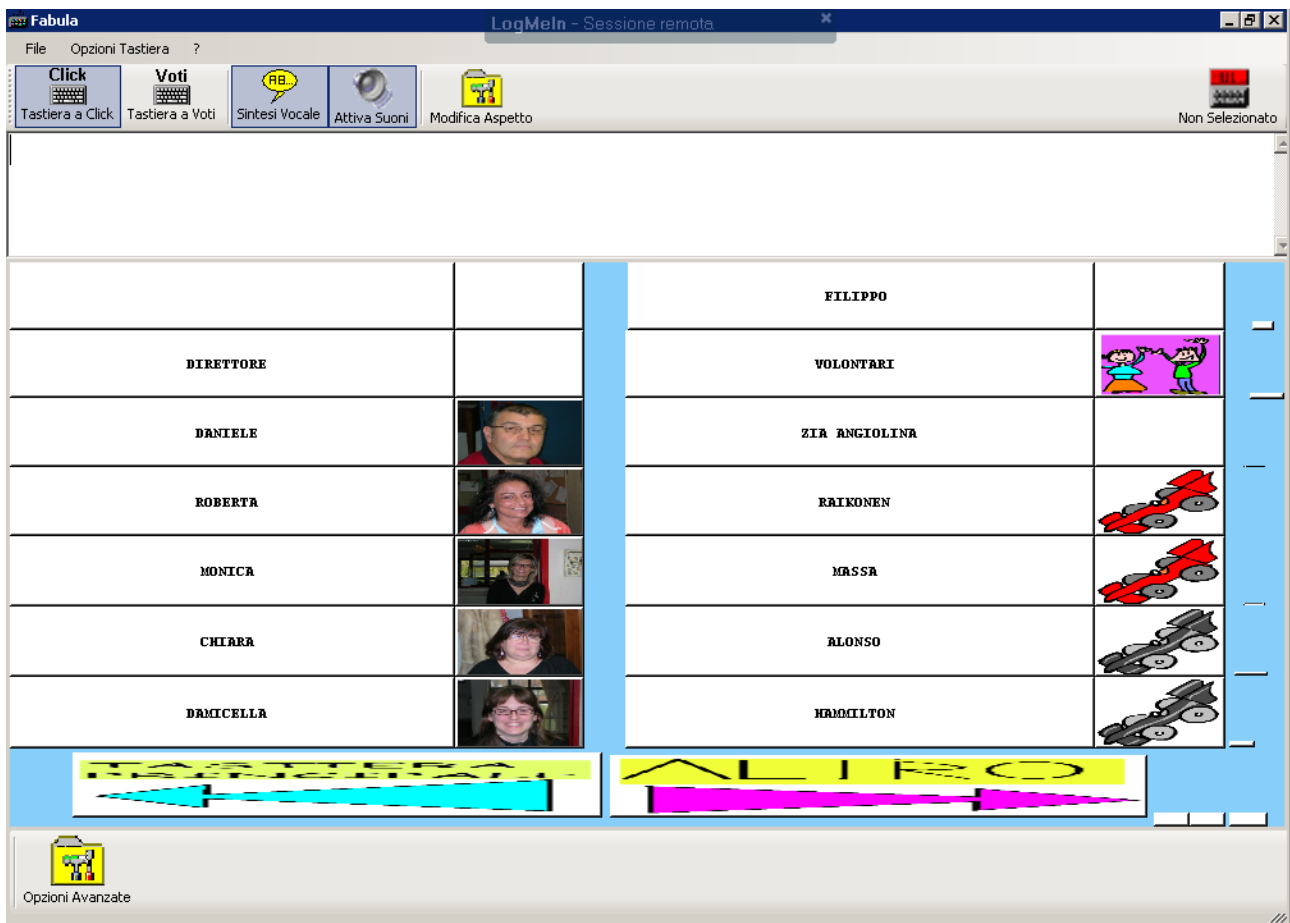

Esempio di tastiera con fotografie

In ogni modo le tastiere possono essere create o modificate a piacere, dal familiare, dall'insegnante o dall'amico della persona disabile, grazie ad un semplice software dato con KEYCLICKER

Con KEYCLICKER è anche possibile scrivere la matematica in modo semplice ed immediato, senza dover compiere complicate operazioni con il mouse.

Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100 Modena (MO) – Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com

EasyMath

$$2 + \frac{\sqrt{4}}{25^{a+z} - 5 + (2 \cdot 3^2)} =$$

Tastiera Virtuale - AIDA

File Opzioni Tastiera ?

Click Voti Scan Sintesi Vocale Attiva Suoni Modifica Aspetto Selezionato

1 2 3 + () × ←

4 5 6 - [] ↶ √

7 8 9 * { } e^x □/□

. 0 , \ = □ ← ↑ □ →

x a ABC... ← ↓ →

Inizia Scansione Pausa Scansione ricomincia Scansione Scansione a celle Scansione a Linee Opzioni Avanzate

KEYCLICKER può essere utilizzato anche con 2 monitor collegati al computer, dove uno ha la funzione di tastiera/foglio di lavoro, mentre l'altro monitor fornisce l'output del proprio lavoro, come ad esempio il testo che si ha scritto in word. Se si utilizza invece un solo monitor, la schermata dev'essere divisa in due parti, per tenere ad esempio la tastiera virtuale in basso ed in alto il documento Word che si sta scrivendo.

Cooperativa Sociale A.I.D.A. ONLUS

Sede Legale: via T.Pelloni 29, 41100 Modena (MO) – Centro Ausili: via XXV Aprile, 103 Soliera (MO)

Tel: 059442999 Cel: 389.0596888 (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635

e-mail: info@aidalabs.com – web: www.aidalabs.com

KEYCLICKER è quindi:

- Un potente strumento per svolgere attività didattiche (anche per la matematica) e riabilitative;
- Un comunicatore alfanumerico o simbolico per la CAA (“Comunicazione Aumentativa e Alternativa”), con sintesi vocale e riproduzione audio;
- Una avanzata tastiera virtuale che consente di scrivere al computer velocemente;
- Un accesso semplice ed immediato al computer tramite il tocco; **è possibile utilizzare tutte le applicazioni del computer, come word, excel, posta elettronica, internet, giochi, ecc...**

Potete contattare A.I.D.A. tramite:

- Internet: www.aidalabs.com
- Posta elettronica: info@aidalabs.com
- Cellulare: 389.0596888
- (Tele)FAX: (+39)-178.600.3635,

Oppure potete scriverci alla nostra e-mail personale:

- Ing. Simone Soria (disabile) – *Presidente A.I.D.A.*: soriasimone@aidalabs.com
- Ing. Emanuele Perini – *Responsabile tecnico A.I.D.A.*: periniemanuele@aidalabs.com