

Standz by JENX

medimec[®]



Uno standing unico e versatile che offre la possibilità del posizionamento prono, supino o eretto combinata alla abduzione delle gambe

- Ispirato dallo studio dei benefici clinici del posizionamento addotto e creato con la collaborazione di terapisti e assistenti di tutto il mondo, assicura la perfetta combinazione di posizionamento clinico e semplicità di utilizzo.
- Standz offre il posizionamento prono e supino ed il posizionamento di abduzione delle gambe per bambini dai 1 a 9 anni (Standz 1) e da 5 a 14 anni (Standz 2).
- La differente lunghezza delle gambe, il posizionamento del ginocchio e del piede e tutte le regolazioni si possono effettuare molto facilmente senza strumenti per consentire la massima personalizzazione ed il passaggio alle diverse posizioni cliniche necessarie per la terapia.
- La vasta gamma di accessori rende Standz molto versatile e consentono la massima personalizzazione all'utente.
- Standz può ospitare bambini con una vasta gamma di requisiti posturali.

Se avete bisogno di versatilità Standz è il prodotto giusto!

Standz by JENX

BLOCCO DI SICUREZZA


Serratura di sicurezza integrata per la regolazione dell'angolazione del telaio. Ideale per gli ambienti in cui c'è molta gente per prevenire l'attivazione accidentale di un meccanismo sbloccato.

GANCIO DI SUPPORTO PER TAVOLINO

che offre una comoda alloggiamento quando il tavolino non è in uso.

REGOLAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE GAMBE

ideale per adattarsi alla diversa lunghezza delle gambe, può essere eseguita in pochi secondi e bloccata saldamente nella corretta posizione senza l'utilizzo di utensili.

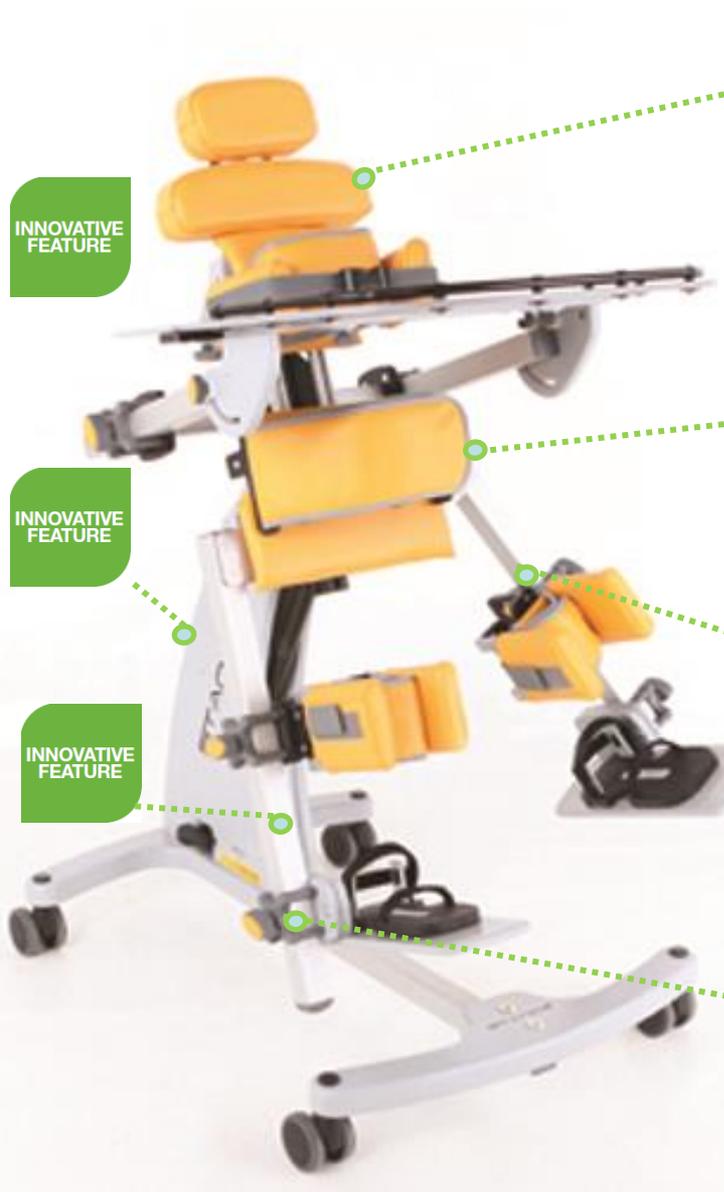

INNOVATIVE
FEATURE

FODERE ANTIMICROBO progettate per essere facilmente pulite, contengono un agente antimicrobo per aiutare il controllo delle infezioni poiché stare in posizione eretta aiuta il sistema digestivo e la gravità può prendere il suo corso,

INNOVATIVE
FEATURE

CALIBRI PER L'ANGOLAZIONE Nel telaio sono integrati gli indicatori del grado di angolazione di abduzione di ogni gamba. Di facile lettura, tali indicatori consentono di riposizionare il bambino in modo preciso e corretto ogni volta che fa terapia.

INNOVATIVE
FEATURE

ABDUZIONE INDIVIDUALE DELLE GAMBE

Standz offre la possibilità di regolare indipendentemente ogni gamba da 0 a 30 gradi di abduzione a seconda delle esigenze cliniche del bambino. La regolazione avviene semplicemente attraverso un pomello, per cui l'azione è rapida e facile da regolare per ogni sessione di terapia.

INNOVATIVE
FEATURE

REGOLAZIONI SENZA CHIAVI Non dovrai più cercare la chiave brugola della giusta misura perché le manopole ad alette sono progettate per dare una presa confortevole e consentire un bloccaggio efficace con il minimo sforzo. *LE REGOLAZIONI DELLA CRESCITA NON SONO MAI STATE COSI' FACILI!*

Standz by JENX ... COLORI DISPONIBILI



Standz by JENX

Stare in piedi è un ottimo modo per migliorare la prospettiva di tuo figlio sul mondo e il suo sviluppo fisico

Migliora la circolazione sanguigna e la pressione




Aiuta la digestione, l'intestino e lo svuotamento della vescica



Incoraggia lo sviluppo muscolare e delle ossa



I bambini traggono enormi vantaggi psicologici dalla posizione eretta e importanti benefici fisici e di sviluppo.

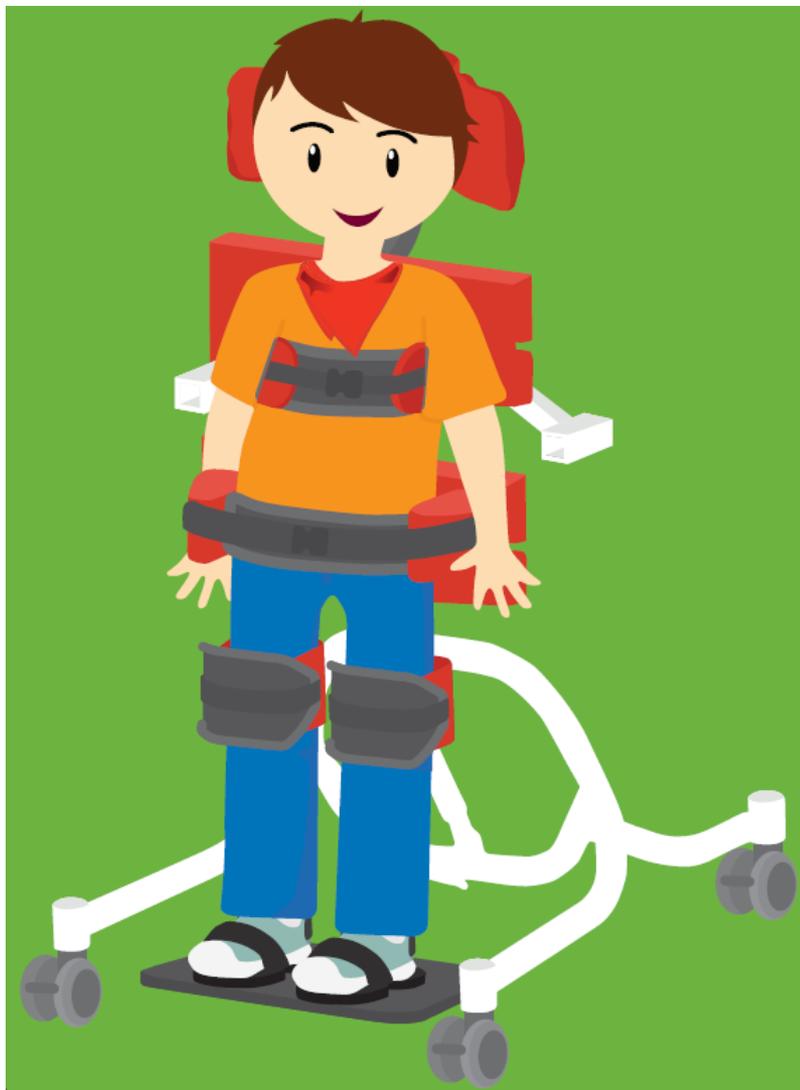

Fornisce nuove prospettive e modalità di partecipazione



Aiuta la respirazione e a dialogare



Aiuta ad alleviare la pressione creata dalla posizione seduta



Supporti bacino, cosce e piedi in modo che i bambini possano unirsi alle attività quotidiane



Fornisce opportunità per incrementare le abilità sociali



Standz by JENX

Standz è un prodotto modulare ed è quindi possibile scegliere specifici accessori per rispondere alle esigenze di ogni bambino.

Dotazione di base:

- Base con 4 ruote piroettanti bloccabili;
- Meccanismo di inclinazione con rilascio a pedale e blocco di sicurezza
- Poggiagambe contrassegnati chiaramente con numeri per un facile posizionamento delle gambe
- Movimento di abduzione indipendente da 0 a 30 gradi delle gambe
- Pedane singole con movimento plantare e flessione dorso
- Calibro angolazione per leggere l'angolo di abduzione del telaio - Intervallo dell'angolo del telaio di 0 - 90 gradi
- Supporti pelvici
- Supporti del tronco
- Supporti per le ginocchia con cinturini
- Tavolino multiposizione con estensioni laterali
- Supporto per alloggiamento tavolino
- Fodere di rivestimento disponibili in quattro colori
- Sandaletti
- Poggiatesta planare (come da immagine), anatomico o Multigrip *per avere la configurazione prono/supina*



Standz by JENX

Accessori:

- POGGIATESTA MULTIGRIP TM => L'originale e innovativo poggiatesta Jenx Multigrip TM è disponibile in tre taglie differenti e ha staffe di aggancio altamente flessibili, regolabili in altezza, profondità e angolazione.



- POGGIATESTA ANATOMICO => Poggiatesta semplice e confortevole che da un minimo supporto alla testa del bambino. Montato su una staffa flessibile, consente la regolazione in profondità, altezza e inclinazione.




- SUPPORTO PELVICO => Da utilizzare in posizione prona, il supporto pelvico offre una superficie di contatto completa per facilitare l'estensione del bacino e prevenire la rotazione pelvica e la flessione dell'anca



- PROLUNGA SUPPORTO PELVICO => Da utilizzare in combinazione con il supporto pelvico, la prolunga offre supporto per la parte alta della schiena. In combinazione con il poggiatesta, aiuta a mantenere una posizione della testa neutra per quei bambini che iper allungano il collo e la testa quando sono in piedi in posizione prona.




- PROLUNGA SUPPORTO PER SPALLE => Un semplice poggiatesta ma efficace per sostenere le spalle quando si utilizza Standz in posizione supina

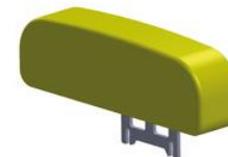

- SUPPORTI GINOCCHIA MULTIASSE => Da utilizzare solo in posizione supina quando è necessario assecondare la flessione fissa del ginocchio



- CINTURINI PER CONTROLLO ROTAZIONE GINOCCHIO => Queste cinghie consentono il controllo della rotazione interna o esterna del ginocchio.

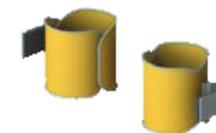

Statica 3 in 1 con abduzione degli arti inferiori per bambini e ragazzi



Standz 2 è stato realizzato per rispondere all'**esigenza riferita da medici, fisioterapisti e genitori di tutto il mondo** di continuare a beneficiare dei vantaggi dello Standz durante la crescita del bambino.

Dai 5 ai 14 anni

Fino a 70 kg

Fino a 1.60 m



Cosa differenzia Standz 2 dal fratello minore?

- La regolazione della **flesso-estensione delle caviglie** non è più continua ma a **step di 5°** (per garantire stabilità nonostante il maggior peso dell'utente)
- I **supporti laterali** per il bacino e per il tronco sono **swing-away** (per facilitare l'accesso all'ausilio in posizione supina) e sono **intercambiabili** a seconda delle esigenze
- La **pettorina** è disponibile come accessorio (per evitare anteposizione delle spalle)





Cosa differenzia Standz 2 dal fratello minore?

- È dotato di una **maniglia posteriore** su cui può essere montato in qualsiasi posizione il dispositivo per modificare l'inclinazione della statica (*per rendere l'azione più ergonomica per il genitore*)
- Sono disponibili come accessori i **poggiagomiti imbottiti** (*per evitare lesioni da decubito*) e i **blocchi per i gomiti**
- I **supporti per il tronco** sono **flessibili** (*per abbracciare in modo confortevole il tronco stimolandone la muscolatura*)



Cosa differenzia Standz 2 dal fratello minore?

- La regolazione dell'**abduzione degli arti inferiori va da 5° a 30° con step da 5°** (*l'abduzione di 10°, cioè 5°+5°, corrisponde alla postura fisiologica in stazione eretta; la regolazione a step consente una maggior stabilità del posizionamento*)
- Si può scegliere tra **due diverse prolunghe per lo schienale** a seconda dell'età e delle dimensioni dell'utente (*segue la crescita del bambino*)
- I **protrattori delle spalle** rientrano nella configurazione standard e sono diversi a seconda della prolunga scelta per lo schienale (*bloccano i movimenti di estensione dell spalle*)



Standz 1 by JENX

<i>INFORMAZIONI IMPORTANTI: Alcune misure minime e massime sono ottenute tramite l'utilizzo di accessori aggiuntivi.</i>	Misure	U.M.	Standz 1 Prono	Standz 1 Supino
Età di utilizzo	approx.	Anni	1 – 9 anni	1 – 9 anni
Altezza utente	max	mm	1380	1380
Peso utente	max	Kg	45	45
Larghezza torace	min-max	mm	180-300	180-300
Larghezza bacino	min-max	mm	180-300	180-300
Larghezza tra le ginocchia (da centro a centro)	min-max	mm	120	120
Abduzione gambe	min-max	Gradi	0-30°	0-30°
Altezza (da piano sandalo a parte alta tavola di supporto superiore)	min-max	mm	580-1000	580-1000
Altezza (da pavimento a parte superiore)	In pos. orizzontale	mm	810	810
Altezza (da pavimento a parte superiore)	In pos. verticale	mm	1080	1080
Angolazione pedana	Dorso-pianta	gradi	10° - 25°	25° - 10°
Inclinazione telaio	Orizz.-vertic.	gradi	5° - 90°	5° - 90°
Misura base	Largh.x lungh.	mm	635x900	635x900

Standz 2 by JENX

Dati Tecnici

<i>INFORMAZIONI IMPORTANTI: Alcune misure minime e massime sono ottenute tramite l'utilizzo di accessori aggiuntivi.</i>	Misure	U.M.	Standz 2 Prono	Standz 2 Supino
Età di utilizzo	approx.	Anni	5 - 14	5 - 14
Altezza utente	min-max	mm	990 - 1600	990 - 1600
Peso utente	max	Kg	70	70
Larghezza torace	min-max	mm	220-360	220-360
Larghezza bacino	min-max	mm	250-370	250-370
Larghezza tra le ginocchia (da centro a centro)	min-max	mm	220	220
Abduzione gambe	min-max	Gradi	0-30°	0-30°
Altezza (da piano sandalo a parte alta tavola di supporto superiore)	min-max	mm	820-1160	820-1160
Altezza (da pavimento a parte superiore)	In pos. orizzontale	mm	900	900
Altezza (da pavimento a parte superiore)	In pos. verticale	mm	1130	1230
Angolazione pedana	Dorso-pianta	gradi	15° - 15°	15° - 15°
Inclinazione telaio	Orizz.-vertic.	gradi	0° - 90°	90° - 0°
Dimensione base	Largh.x lungh.	mm	760x1070	760x1070

Standz by JENX



Standz by JENX

Per maggiori informazioni contattaci:

medimec[®]

MEDIMEC INTERNATIONAL SRL

Via Proventa n. 52 – 4808 Faenza (RA)

Tel. 0546/46870 Fax 0546/46467

medimec@medimec.it

www.medimec.it

